

MONTERINGSANVISNING



SITSBREDDNINGSSATS

Art.nr. 14 401 (breddar 5 cm)

Art.nr. 14 402 (breddar 10 cm)

OBS! 14 402 ej möjlig på stolar med 20"- eller 24"-hjul.

1. Sätt fast röret (1) inuti det befintliga sidostödsfästet på sitsramen med skruven (2). Skruva fast fästet (3) med skruvarna (4) (4 st) och kontrollera att det sitter stadigt.
2. Sätt i röret (5) i det främre sidostödsfästet och skruva fast fästet (6) med skruvarna (4) (4 st). Kontrollera att det sitter stadigt.

Observera!

Om sitsbreddningssatsen skall monteras på rullstol typ 500 (24"-hjul), måste även hjulbreddningssats, art.nr. 14 501 monteras.

Satsen innehåller följande :

pos.	art.nr.	benämning	antal
14 401			
1	14 460-5	Fäströr långt	2
2	81 121	Skruv MRX 6x10	2
3	14 450-5	Fäste	2
4	81 293	Skruv K6S M6x10	16
5	14 465-5	Fäströr kort	2
6	14 440-5	Fäste främre	2
14 402			
1	14 460-5	Fäströr långt	2
2	81 121	Skruv MRX 6x10	2
3	14 455-5	Fäste	2
4	81 293	Skruv K6S M6x10	16
5	14 465-5	Fäströr kort	2
6	14 445-5	Fäste främre	2

