

MONTERINGSANVISNING

Fäste för Flexi-rygg sb45 på Rullstol sb38, alt. Flexi-rygg sb52 på Rullstol sb45

Art.nr. 14254-1

Stasen innehåller följande delar:

1. Bult	4 st
2. Bricka	4 st
3. Ryggöra Flexi	4 st
4. Skruv	4 st
5. Mutter	4 st

Följande verktyg behövs:

- Insexnyckel, storlek 3 mm.
- Fast nyckel, storlek 13 mm.
- (Alt. HD-verktyg 10-13 nyckel.)

Montera enligt följande:

1. Demontera befintlig ryggplatta eller Flexi-rygg, samt befintliga ryggöron.
2. Trä på de nya ryggöronen (3) på rygg-ramen (7). Se till att de placeras åt rätt håll, se bild 1 och 2. Drag åt skruvarna (4) en aning, men inte helt.
3. Montera Flexi-ryggen (6) på de fyra ryggöronen (3) med hjälp av bult (1), bricka (2) och mutter (5), se bild 1 och 2. Drag inte åt skruvarna helt. (Brickan (2) används endast på rullstol utan bålstödsfästen. På rullstol med bålstödsfästen placeras dessa mellan Flexi-rygg och ryggöra, se separat monteringsanvisning, art. nr: 95162. Observera att speciella bålstödsfästen krävs för bred flexi-rygg!)
4. Sätt tillbaka körbygeln i ryggramen för att säkerställa att ryggramen inte blir skev.
5. Placera de övre ryggöronen (3) c:a 3 cm under ovankant på ryggramen (7) och de nedre ryggöronen c:a 23 cm längre ner på ryggramen, se bild 2. Se till att allt är rätt placerat och i rätt vinkel.
6. Drag åt alla skruvar och muttrar ordentligt.
7. Montera vajerreglaget på Flexi-ryggen enligt separat monteringsanvisning, art.nr: 95162.

