

# Checklista Rekonditionering

## HD Balance

Art.nr. 95726

Modell				
1	Alla	Tvätt	Kontrollera att inget vatten kvarstår i ramar och detaljer och att inga fuktfläckar finns på ramar.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
2	Alla	Skador	Kontrollera att ramar inte är skeva och att inga sprickbildningar finns.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
3	Alla	Lackskador	Kontrollera att alla lackskador är åtgärdade.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
4	Alla	Sitsram / Benstödsinfästning	Kontrollera att sitsskenor är skadefria och sitter fast samt märkningen på vänster skena. Kontrollera att ledtapparna till ryggram och gasfjäderhållaren är låsta. Kontrollera att hylsorna i armstödsfästena är hela. Kontrollera att märkningen för tiltvinkel är hel. Kontrollera att benstödsinfästningen sitter fast.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
5	Alla	Sittplatta	Kontrollera att sittplattan är i gott skick (även kardborr). Sätt sittplattan på plats och kontrollera att djupjusteringen och spärren fungerar korrekt.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
6	Alla	Ryggram	Kontrollera att ryggfällningssprinten fungerar korrekt och går helt igenom fästörat. Kontrollera att ryggöronen sitter fast. Kontrollera att märkningen för ryggvinkel är hel.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
7	Alla	Flexirygg / Fäste huvudstöd	Kontrollera att ryggstycken/remmar är i bra skick och att flexiryggen är fastdragen. Kontrollera att hylsan i huvudstödsfästet är hel och att låsningen fungerar korrekt	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
8	Alla	Gasfjäder / Ryggreglage	Kontrollera att gasfjädern och ryggreglaget fungerar korrekt.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
9	Alla	Tipplås / Tiltreglage	Kontrollera att tipplåset ej kärvar och tippstången löper korrekt. Kontrollera att låsringarna är rätt monterade och låsta. Kontrollera att tiltreglaget fungerar korrekt.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
10	Alla	Länkhjul	Kontrollera att länkhjul, gaffel och axeltapp snurrar korrekt och inte har några anmärkningsvärda skador eller sprickbildningar.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
11	Alla	Hjulfästen / Skivbroms	Kontrollera att hjulfästena är rengjorda och att vridtappar och låstappar fungerar. Kontrollera att bromsskivorna inte är skeva och att de roterar OK. Kontrollera att bromsvajrar är korrekt åtdragna. Kontrollera att tvärröret är åtdraget.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
12a	24	Drivhjul / Drivringar	Kontrollera att hjulen inte skevar och att inte några ekrar är lösa. Kontrollera att drivtapparna i navet sitter fast. Kontrollera att däcken ser OK ut. Kontrollera att drivringarna är åtdragna och att de inte är vassa eller har onödigt stora repor. Kontrollera att hjulaxeln är fri från glapp och rost. Kontrollera drivhjulen går bra att ta bort och sätta fast. Gör ryckprov.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
12b	16	Drivhjul	Kontrollera att hjulen inte skevar. Kontrollera att drivtapparna i navet sitter fast. Kontrollera att däcken ser OK ut. Kontrollera att hjulaxeln är fri från glapp och rost. Kontrollera att drivhjulen går bra att ta bort och sätta fast. Gör ryckprov.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>

# Checklista Rekonditionering

## HD Balance

Art.nr. 95726

13	24 (16)	Däckbroms	Kontrollera däckbromsens funktion och att bromsbalken sitter fast ( gäller även 16" om däckbroms är monterad).	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
14	Alla	Körbygel / Bromshandtag med bromsvajer	Kontrollera att körbygelns höjdjustering fungerar korrekt. Kontrollera att körbygelskyddens kondition. Kontrollera att bromshandtagen fungerar korrekt och att bromsen fungerar rätt i bromsat läge med låshylsorna samt märkningen av dem. Kontrollera att låsmuttrarna på bromsvajrarnas ställskruvar är låsta. Kontrollera att bromsvajrarna ligger korrekt utmed ryggramen och att vajerclipsen är monterade.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
15	Alla	Tippskydd / Trampör	Kontrollera att rätt tippskydd är monterat. Kontrollera att tippskyddet löper och låser korrekt.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
16	Alla	Benstöd	Kontrollera att benstödens infästning och låsning på sitsramen fungerar korrekt. Kontrollera att benstödens vinkling fungerar korrekt Kontrollera inner- och ytterkuddarnas kondition. Kontrollera att märkningen för benvinkel är hel.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
17	Alla	Vadstöd	Kontrollera vadstödsfästets låsning och vadplattsklammerns funktion. Kontrollera att inga onödiga skador finns.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
18	Alla	Fotstöd	Kontrollera fotplattshållarnas funktion och låsning. Kontrollera att fotplattorna är fastdragna och går lätt att fälla upp. Kontrollera att fotplattorna ej har onödiga skador.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
19	Alla	Armstöd	Kontrollera att armstöden går lätt att sätta på plats. Kontrollera att funktionen på armstödens höjd- och längdjustering. Kontrollera att klädseln på armstödsplattor och sidostödsplattor är OK och att de är fastdragna. Kontrollera höjdmärkningen.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
20	Alla	Klädsel / Dynor	Kontrollera att dynor är hela och rena.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
21	Alla	Etiketter/Märkning	Kontrollera att följande etiketter är rätt monterade och oskadade enl. dok. 95764: CE-etikett ID-etikett med serienummer Modelletikett Maxviktetikett Transportfästetikett Ev. Serviceetikett Ev. Kunds id-nummer	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
22	Alla	Testkörning	Provkörning med bromsprov, tiltning, ryggfällning.	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>

Om samtliga punkter ovan är OK så godkänns rullstolen genom signatur nedan. Om någon punkt inte är OK (NOK) åtgärdas detta och rullstolen kan godkännas. Avvikelser rapporteras enligt rutin.

Datum	Serienummer	ID-nummer	(löpnummer)
Signatur			