

Skrotningsanvisning - HD Balance

Anvisningen är uppdelat i 2 avsnitt. Del A för uppdelning i brännbart avfall och återvinningsbart metallskrot i acceptabel nivå. Del B för uppdelning av i mer noggrann nivå. Med metallskrot menas blandat metallavfall. Metallen kan sorteras ytterligare genom att separera all aluminium som då kan säljas till ett högre värde. Detta kräver att alla stålkomponenter som skruvar, nitar, bussningar mm avlägsnas. För vägledning om detta kontakta HD Rehab.

Tabellens angivelser (Pos. och Blad) hänvisar till reservdelslistan sprängskissblad, art.nr. 95740.

A - Separering från brännbart material för acceptabel återvinning

Del	Del på rullstolen	Instruktion	Pos.	Blad	Avfallsort
1	Chassie	Ta bort alla tillbehör inkl. benstöd, armstöd och drivhjul.			Hanteras enl. nedan
2	Sittplattan	Ta bort sittbrickan, kastas.	30	0.2	Brännbart
3	Länkhjul	Ta bort länkhjulen genom att lossa centrumskraven, kastas.	6	A3.1	Brännbart
4	Ryggremar	Skär bort ryggremarna, kastas.	1-4	C2.1	Brännbart
5	Profilstyrning huvudstöd	Tryck loss styrningen, kastas.	11	C2.1	Brännbart
6	Körbygelskydd	Skär bort skydden, kastas.	32	0.2	Brännbart
7	Chassie	Hela chassiet kan därefter kastas.			Metallskrot
8	Drivhjul	Skär bort däcken, kastas. Resten av hjulet kan därefter kastas.	31	0.2	Brännbart Metallskrot
9	Benstöd vinkelställbara	Ta bort inner- och ytterkudde på knäleden, kastas. Resten av benstödet kan därefter kastas.	3, 5	D1.2	Brännbart Metallskrot
10	Vadstöd	Ta bort vadplattan, kastas. Resten av vadstödet kan därefter kastas.	11	D1.4	Brännbart Metallskrot
11	Fotstöd delat	Ta bort fotplattan, kastas. Resten av fotstödet kan därefter kastas.	1	D1.5	Brännbart Metallskrot
12	Fotstöd helt	Hela fotstödet kastas.			Metallskrot
13	Benstöd fast	Hela benstödet kastas.		D2.1	Metallskrot
14	Armstöd	Ta bort sidoplattan, kastas. Ta bort armstödsplattan, kastas. Resten av armstödet kan därefter kastas.	2 14	E1.1 E2.1	Brännbart Brännbart Metallskrot
15	Bålstöd samtliga modeller	Ta bort klädsel och dra bort stoppningen, kastas. Resten av bålstödet kan därefter kastas.		F1.1	Brännbart Metallskrot
16	Bord PC och Ek	Ta bort tappen, kastas. Resten av bordet kan därefter kastas.	7	F2.1	Metallskrot Brännbart
17	Huvudstöd (Nackstöd)	Ta bort klädsel och stoppning, kastas. Resten av huvudstödet kan därefter kastas.	1	F3.3	Brännbart Metallskrot
18	Sidostöd till huvudstöd/nackstöd	Ta bort klädsel och stoppning, kastas. Resten av sidostödet kan därefter kastas.	6	F3.4	Brännbart Metallskrot
19	Sits- och ryggdynor	Kastas hela.			Brännbart

B - Hel separering från brännbart material

Del	Del på rullstolen	Instruktion	Pos.	Blad	Avfallsort
1	Chassie	Ta bort alla tillbehör inkl. benstöd, armstöd och drivhjul.		0.1, 0.2	Hanteras enl. nedan
2	Sittplattan	Borra bort nitarna (5), ta bort skenan (4) och slå ut muttrarna (3). Resten av sittplattan kastas.	5, 4, 3	B2.1	Metallskrot Brännbart
3	Vajerreglage	Klipp av vajern och lossa vajerreglagen (33) och (34), ta bort spaken (2), kastas. Resten av reglaget kastas.	33, 34 2	0.2 C3.4	Brännbart Metallskrot
4	Körhandtag	Klipp av bromsvajrarna (36) och dra ut körhandtaget ur ryggramen. Skär bort körbygelskydden. Skär bort handtagen (8). Resten av körhandtaget kastas.	32 32 8	0.2 C3.3	Brännbart Brännbart Metallskrot
5	Flexiram	Skär bort remmar och ryggstycken, kastas. Lossa flexiramens skruvar (23) och ta bort brickorna (22), kastas. Tryck loss styrningen (11), ta bort pluggarna (6) och ratten (9). Resten av ramen kastas.	1-4 22 11, 6, 9	C2.1 0.1 C2.1	Brännbart Brännbart Brännbart Metallskrot
6	Planrygg	Tryck loss styrningen (8), ta bort ratten (7). Resten av ryggplattan kastas.	8, 7	C2.2	Brännbart Metallskrot
7	Ryggram	Lossa tapparna (12) och ta bort ryggramen (3), kastas.	12, 3	0.1	Metallskrot
8	Sittram	Lossa skruvarna (11) och tappnen (16), kastas. Ta bort styrningarna (6) och kåporna (4), kastas. Hela sittramen (2) och gasfjädern (14) kastas.	11, 16 6, 4 2, 14	0.1 B1.1 0.1	Metallskrot Brännbart Metallskrot
9	Hjulram	Borra bort eller slå ut styrningarna (11) kastas. Ta bort länkhjulen genom att lossa centrumskruven, kastas. Resterande hjulram kastas hel.	11 24	A1.1 0.2	Brännbart Brännbart Metallskrot
10	Drivhjul	Skär bort däcken, kastas. Resten av hjulet kastas helt.	1	A4.1	Brännbart Metallskrot
11	Benstöd vinkelställbara	Ta bort innerkudde (3) och ytterkudde (5) på knäleden, kastas. Tryck bort låsarmen (19), kastas. Resten av benstödet kastas.	3, 5 19	D1.2 D1.3 D1.2	Brännbart Brännbart Metallskrot
12	Vadstöd	Ta bort vadplattan (11) och ratten (8), kastas. Resten av vadstödet kastas.	11, 8	D1.4	Brännbart Metallskrot
13	Fotstöd delat	Ta bort fotplattan (1), kastas. Resten av fotstödet kastas helt.	1	D1.5	Brännbart Metallskrot
14	Fotstöd helt	Hela fotstödet kastas.			Metallskrot
15	Benstöd fast	Kastas helt.		D2.1	Metallskrot

Del	Del på rullstolen	Instuktion	Pos.	Blad	Avfallsort
16	Armstöd	Ta bort sidoplattan. Demontera klamrarna (5,6), kastas. Sidoplattan kastas. Ta bort armstödsplattan, kastas. Resten av armstödet kastas.	2 5, 6 1 14	E1.1 E3.1 E3.1 E2.1	Metallskrot Brännbart Brännbart Metallskrot
17	Bålstöd samtliga modeller	Ta bort klädsel och dra bort stoppningen, kastas. Resten av bålstödet kan därefter kastas.		F1.1	Brännbart Metallskrot
18	Bord PC och Ek	Ta bort tappen , kastas. Resten av bordet kan därefter kastas.	7	F2.1	Metallskrot
19	Huvudstöd (Nackstöd)	Ta bort klädsel och stoppning, kastas. Resten av huvudstödet kan därefter kastas.	1	F3.3	Brännbart Metallskrot
20	Sidostöd till huvudstöd/nackstöd	Ta bort klädsel och stoppning, kastas. Resten av sidostödet kan därefter kastas.	6	F3.4	Brännbart Metallskrot
21	Sits- och ryggdynor	Kastas hela.			Brännbart