

HD Balance mod. 24 och mod. 16 Referenstabell – balanseringslägen

Anpassningsnummer – se beställningsguide Markerad text (gul) anger EJ möjligt eller EJ rekommenderat

OBS! Vid tiltvinklar större än 20° eller vid ändring av balanseringsläget ska alltid tipprisken utredas.

OBS! Läs riskinformationen i infoblad 95707 innan rullstolen tas i bruk när andra tiltplåtar än standard används!

Pos Modell	Art.nr. Anpassn	Benämning anpassning	Tiltlägen Anpassningsnr Tilt	Art.nr. Sats	Kommentar	Art.nr. Tiltplåt	Benämning
1 24 och 16	-	Standard balansläge	Tilt 20° std *	-	* Tippstång std, övre stoppring i 5:e hålet uppifrån, undre stoppring i 1:a hålet nerifrån.	67051-6	Tiltplåt std svart
			67820-8 Tilt -5° - 20° **				
			67823-8 Tilt 0° - 30° ***	67825-1	** Tippstång std, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån, undre stoppring i 1:a hålet nerifrån.		
			67824-8 Tilt -5° - 30° ****	67825-1	*** Tippstång förlängd, övre stoppring i 5:e hålet uppifrån, undre stoppring i 1:a hålet nerifrån. För mod. 24 : Tvärröret flyttas till bakre pos. Använd skruvsats 62541-9.		
					**** Tippstång förlängd, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån, undre stoppring i 1:a hålet nerifrån. För mod. 24 : Tvärröret flyttas till bakre pos. Använd skruvsats 62541-9.		
2 24	67052-8	Anpassning Sitthöjd Ökad sitthöjd + 5 cm	Tilt 20° std *	69951-6	* Tippstång 67827-1 används, medföljer satsen.	67052-6	Tiltplåt höjd + 5 cm svart
			67820-8 Tilt -5° - 20° *		** Kompletteras med tippstång 67828-1, medföljer ej satsen. Ej rekommenderad anpassning. Hjulfästen bör monteras i det bakre läget samt tipprisken måste kontrolleras.		
			67823-8 Tilt 0° - 30° **				
			MÖJLIG Rekommenderas EJ				
			67824-8 Tilt -5° - 30° **				
			MÖJLIG Rekommenderas EJ				
2 16	67052-8	Anpassning Sitthöjd Ökad sitthöjd + 5 cm	Tilt 20° std *	69951-6	* Tippstång 67827-1 används, medföljer satsen.	67052-6	Tiltplåt höjd + 5 cm svart
			67820-8 Tilt -5° - 20° *		** Kompletteras med tippstång 67828-1, medföljer ej satsen. Ej rekommenderad anpassning. Hjulfästen bör monteras i det bakre läget samt tipprisken måste kontrolleras.		
			67823-8 Tilt 0° - 30° **				
			MÖJLIG Rekommenderas EJ				
			67824-8 Tilt -5° - 30° **				
			MÖJLIG Rekommenderas EJ				

Pos Modell	Art.nr. Anpassn	Benämning anpassning	Tiltlägen Anpassningsnr Tilt	Art.nr. Sats	Kommentar	Art.nr. Tiltplåt	Benämning
3 24	67053-8	Anpassning Sitthöjd Sänkt sitthöjd - 3 cm	Tilt 20° std * 67820-8 Tilt -5° - 20° ** (67823-8 Tilt 0° - 30° ***) Ersätts här av: 67821-8 Tilt 0° - 30° *** 67824-8 Tilt -5° - 30° N/A	69952-6	<p>* Hjulfäste främre läge: Tvärrör ska monteras i bakre – övre eller nedre position med medföljande skruv-mutter. Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, nedre stoppring 5:e hålet nerifrån. Ger tilt max 20°.</p> <p>* Hjulfäste bakre läge: Tvärrör ska monteras i bakre – övre eller nedre position med medföljande skruv-mutter. Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 8:e hålet nerifrån. Ger tilt max 15°. Med vajersats Broms typ2, art.nr. 82446, och stoppring i 5:e hålet nerifrån kan tilt 20° uppnås.</p> <p>* , ** , *** Benstöd: När benstöden är inställda i 90° läge kan länkhjulen slå i fotstöden när de är inställda i övre till medel position. Avhjälps om länkhjulen byts till art.nr. 67318, länkhjul 125 mm med förlängd gaffel.</p> <p>** Tilt -5° EJ möjligt. Med den övre stoppringen borttagen är -3° tilt möjlig. Rekommenderas EJ.</p> <p>*** Hjulfäste främre läge: EJ möjligt.</p> <p>*** Hjulfäste bakre läge: Med vajersats Broms typ2, art.nr. 82446, och undre stoppring i 1:a hålet nerifrån kan tilt 30° uppnås. Tippstång ska vara standard, övre stoppring i översta hålet, nedre stoppring i nedersta hålet.</p>	67053-6	Tiltplåt sänkt 3 cm svart
3 16	67053-8	Anpassning Sitthöjd Sänkt sitthöjd - 3 cm	Tilt 20° std * 67820-8 Tilt -5° - 20° ** (67823-8 Tilt 0° - 30° ***) Ersätts här av: 67822-8 Tilt 0° - 30° *** 67824-8 Tilt -5° - 30° N/A	69952-6	<p>* Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 5:e hålet nerifrån. Ger tilt max 20°.</p> <p>* , ** , *** Benstöd: När benstöden är inställda i 90° läge kan länkhjulen slå i fotstöden när de är inställda i övre till medel position. Kan avhjälpas om länkhjulen byts till art.nr. 67318 , länkhjul 125 mm med förlängd gaffel.</p> <p>** Tilt -5° EJ möjligt. Med den övre stoppringen borttagen är -2° tilt möjlig. Rekommenderas EJ.</p> <p>*** Med tippstång standard och övre stoppring i översta hålet, nedre stoppring i nedersta hålet kan tilt 30° uppnås.</p>	67053-6	Tiltplåt sänkt 3 cm svart

4 24	67056-8	Anpassning Sittenhet Framflyttad 3 cm	Tilt 20° std * 67820-8 Tilt -5° - 20° ** 67823-8 Tilt 0° - 30° *** 67824-8 Tilt -5° - 30°	69956-6	<p>Kräver adapterplatta. * Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre stoppring 5:e hålet nerifrån. Ger tilt max 20°.</p> <p>** Tilt -3° möjligt, med den övre stoppringen i översta hålet. Med den övre stoppringen borttagen är -5° tilt möjlig. Rekommenderas EJ.</p> <p>*** Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre stoppring i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 30°</p>	67056-6	Tiltplåt framflyttad 3 cm std höjd, svart
4 16	67056-8	Anpassning Sittenhet Framflyttad 3 cm	Tilt 20° std * 67820-8 Tilt -5° - 20° ** 67823-8 Tilt 0° - 30° *** 67824-8 Tilt -5° - 30° ****	69956-6	<p>Kräver adapterplatta. * Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre stoppring 5:e hålet nerifrån. Ger tilt max 20°.</p> <p>** , **** Tilt -3° möjligt, med den övre stoppringen i översta hålet. Med den övre stoppringen borttagen är -5° tilt möjlig. Rekommenderas EJ.</p> <p>*** Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre stoppring i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 30°</p>	67056-6	Tiltplåt framflyttad 3 cm std höjd, svart
5 24	67057-8	Anpassning Sittenhet Bakflyttad 3 cm	Tilt 20° std * 67820-8 Tilt -5° - 20° ** 67823-8 Tilt 0° - 30° *** 67824-8 Tilt -5° - 30° ****	69957-6	<p>* Tippstång std, övre stoppring i 4:e hålet uppifrån och undre stoppring 2:a hålet nerifrån. Ger tilt max 20°.</p> <p>** Tippstång std, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån och undre stoppring 2:a hålet nerifrån. Ger tilt -4° till 20°.</p> <p>*** Tippstång förlängd, övre stoppring i 4:e hålet uppifrån och undre stoppring 2:a hålet nerifrån. Ger tilt max 30°. Gäller för hjulfäste i både främre och bakre läge.</p> <p>**** Tippstång förlängd, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån och undre stoppring 2:a hålet nerifrån. Ger tilt -4° till 30°. Gäller för hjulfäste i både främre och bakre läge.</p> <p>* , ** , *** , **** Gäller samtliga fall: Tvårrör ska monteras i bakre – övre eller nedre position med medföljande skruv-mutter.</p> <p>* , ** , *** , **** Gäller samtliga fall: Benstöd: Kan EJ användas i 90° position utan att länkhjulen byts till art.nr. 67318 , länkhjul 125 mm med förlängd gaffel.</p>	67057-6	Tiltplåt bakflyttad 3 cm std höjd, svart

5 16	67057-8	Anpassning Sittenhet Bakflyttad 3 cm	Tilt 20° std *	69957-6	* Tippstång std, övre stoppring i 4:e hålet uppifrån och undre stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 22° .	67057-6	Tiltplåt bakflyttad 3 cm std höjd, svart
			67820-8 Tilt -5° - 20° **		** Tippstång std, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån och undre stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt -3° till 22° .		
			67823-8 Tilt 0° - 30° ***		*** Tippstång förlängd, övre stoppring i 4:e hålet uppifrån och undre stoppring 3:e hålet nerifrån. Ger tilt max 30° . Undre stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 34° . Rekommenderas EJ.		
			67824-8 Tilt -5° - 30° ****		*** Tippstång förlängd, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån och undre stoppring 3:e hålet nerifrån. Ger tilt -3° till 30° . Undre stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 34° . Rekommenderas EJ.		
					* , ** , *** , **** Gäller samtliga fall: Benstöd: Kan EJ användas i 90° position utan att länkhjulen byts till art.nr. 67318 , länkhjul 125 mm med förlängd gaffel.		
7 24	67059-8	Anpassning Sittenhet Bakflyttad 3 cm , Sänkt 3 cm	Tilt 20° std *	69959-6	* Hjulfäste främre läge: Tvårrör ska monteras i bakre – nedre position med medföljande skruv-mutter. Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 5:e hålet nerifrån. Ger tilt max 20° .	67059-6	Tiltplåt bakflyttad 3 cm sänkt 3 cm, svart
			67820-8 Tilt -5° - 20° N/A		* Hjulfäste bakre läge: Tvårrör ska monteras i bakre – nedre position med medföljande skruv-mutter. Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 8:e hålet nerifrån. Ger tilt max 15° .		
			67823-8 Tilt 0° - 30° N/A		* Benstöd: Kan EJ användas i 90° position utan att länkhjulen byts till art.nr. 67318 , länkhjul 125 mm med förlängd gaffel.		
			67824-8 Tilt -5° - 30° N/A				
7 16	67059-8	Anpassning Sittenhet Bakflyttad 3 cm , Sänkt 3 cm	Tilt 20° std *	69959-6	* Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 5:e hålet nerifrån. Ger tilt max 20° .	67059-6	Tiltplåt bakflyttad 3 cm sänkt 3 cm, svart
			67820-8 Tilt -5° - 20° N/A		** Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 30° .		
			67823-8 Tilt 0° - 30° **		* , ** Benstöd: Kan EJ användas i 90° position utan att länkhjulen byts till art.nr. 67318 , länkhjul 125 mm med förlängd gaffel.		
			67824-8 Tilt -5° - 30° N/A				