


# Bord och Stödbord - HD Balance

## Bruksanvisning / Monteringsanvisning

Sida 1 (2)



### Montering av bordsfästen:

①

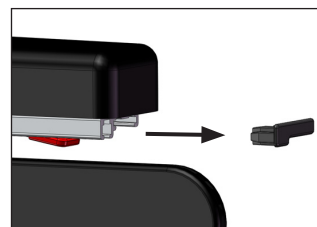




Dra ur de **BAKRE** plastpluggarna ur armstödsskenorna på vardera sida av rullstolen.

②

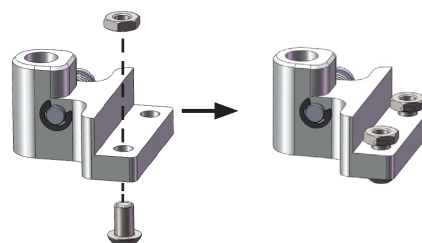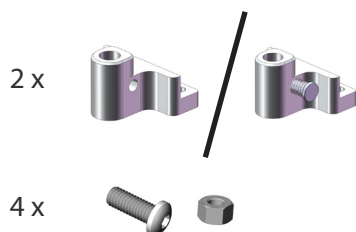



Montera skruvarna i bordsfästena. Skruva bara på muttrarna några få varv.

③

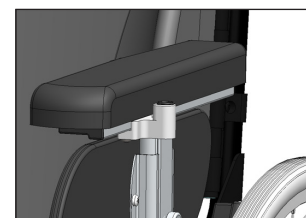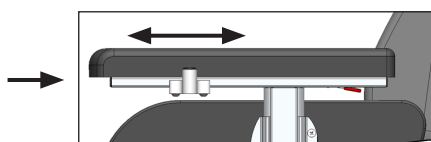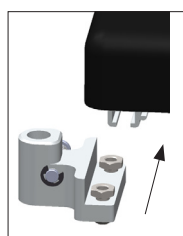

Trä i muttrarna, bakifrån, längs mutterspåret i armstödsskenan. Montera ett fäste på vardera armstöd. Skjut fästena så att de sitter i ungefär samma läge på båda sidor. Armstöden ska även vara ställda i samma höjdläge för att bordet ska sitta bra!

④

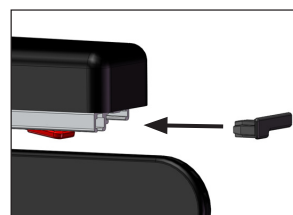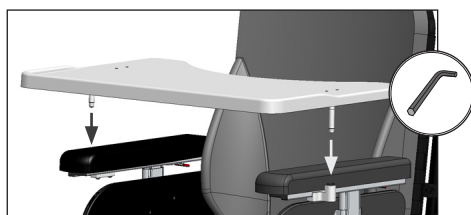


Placera bordet i fästena enligt bilden så att bordstapparna träffar hålen i fästena. Positionera bordet, genom att skjuta fästena längs skenan, så att det sitter i en bra position för brukaren och dra åt skruvarna. Sätt tillbaka plastpluggarna.

Nu är bordet klart att användas!




Se baksidan om ytterligare plats för brukaren krävs.

## Ytterligare justering av bordets position:

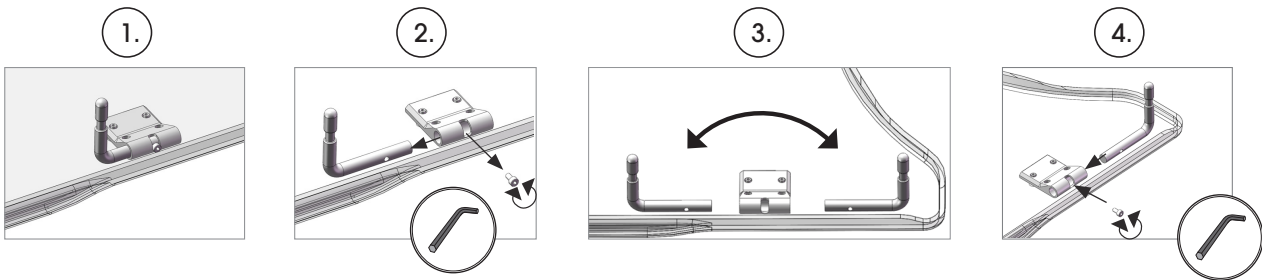

Genom att vända bordstapparna enligt bilderna ovan justeras bordets placering i djupled ca 85mm.


## Montera bordet:

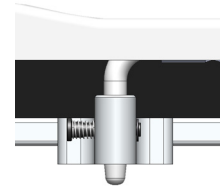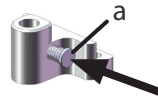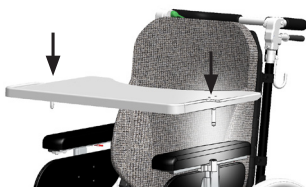

**UTAN LÅSNING:** För bordet så att bordstapparna träffar hålen i fästena på båda sidor och se till att tapparna glider ner ordentligt.

**MED LÅSNING:** För bordet så att bordstapparna träffar hålen i fästena på båda sidor och glider ner något. Tryck in knappen (a) för att bordstapparna ska glida ner i läge. När knappen släpps låses bordet. Prova att lyfta bordet för att säkerställa att låsningen tagit.

## Demontera bordet:

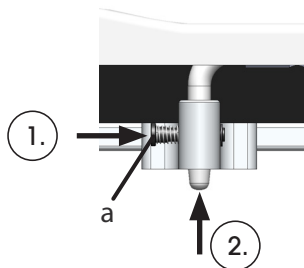

**UTAN LÅSNING:** Lyft bordet rakt upp så tapparna lossnar ur bordsfästena.

**MED LÅSNING:** Tryck och håll in låsknappen (a) på bordsfästet. Medan knappen är intryckt; tryck upp bordstapparna ur bordsfästet underifrån och fortsatt sedan med att lyfta bordet rakt upp.

## Användning och skötselråd

Bord i PC och trä är avsedda som avställningsyta vid brukarens dagliga aktiviteter som t.ex. i matsituationen.

Stödbordet är avsett att användas av brukaren för att med underarmarna aktivt ta stöd framåt, t.ex. för att stabilisera överkroppen.

Borden kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. För övrig information se Underhållsanvisning, art.nr. 95730.



- Bord bör ej användas som stöd för överkroppen om brukaren är hemiplegiker eller om risk för axelluxation finns.
- Övriga förekommande risker finns beskrivna i rullstolens bruksanvisning, art.nr. 95701.