

Fotplattspolstring, HD Balance

Bruksanvisning / Monteringsanvisning

Sida 1 (1)

Art nr: 62991-1 och 64991-1

Ingående delar:

2 x



Montering

Notera att storleken på fotplattorna är olika beroende på stolens sittbredd. Sb38-42 kräver den mindre modellen av fotplattspolstringen (art nr 62991) medan sb46-50 kräver den större modellen (art nr 64991).

1



2



3



4



1. Dra bort skyddsplasten från korborrhbandet.
2. Montera korborrhbandet på undersidan av fotplattan som bilden visar. Det ska placeras så att det matchar korborrhbandet på insidan av fotplattspolstringen.
3. Trä på polstringen enligt bilden. Tryck in fotplattan så långt det går. Fäst korborrhbanden i varandra.
4. Färdigt!

Användning och skötselråd



Använd ej skor på fotplattspolstringen.

Fotplattspolstringen ska rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. För övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.