


Art nr: 65986 / 65987

### Ingående delar


1 x



1 x

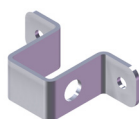

1 x

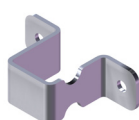


4 x (MRX M5 x 12)




### Montering

①

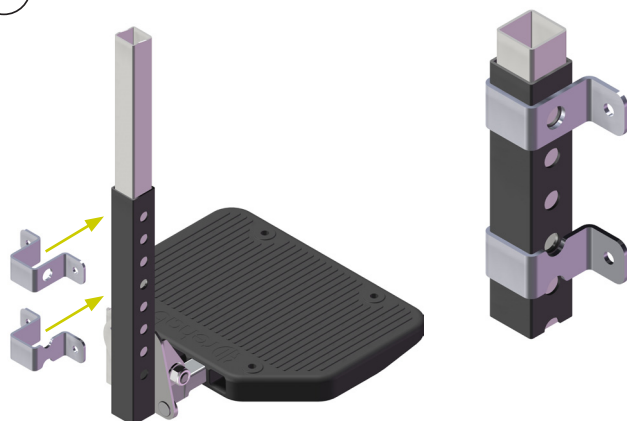

②

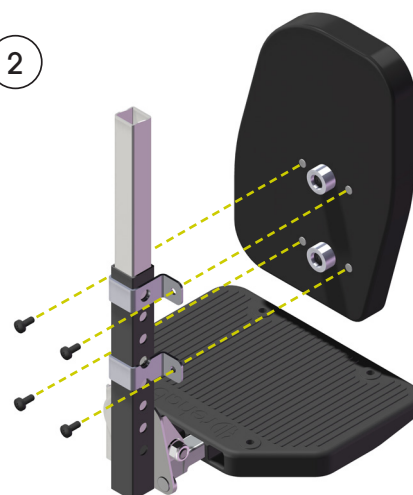

1. Tryck fast det övre och nedre fästena på fotplattshållare. **OBS:** Övre fästet placeras över 1:a hålet i röret. Nedre fästet placeras mellan 4:e och 5:e hålet i röret.

2. Fäst fotstödssida med 4 skruvar.

### Skötselråd

Fotstödsidorna kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. Byt alltid ut skadade delar omedelbart. För övrig information se Underhållsanvisning, art. nr. 95730.


Art. no.: 65986 / 65987

### Parts included


1 x



1 x

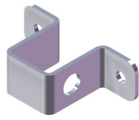

1 x

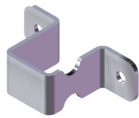


4 x (MRX M5 x 12)




### Assembly

1

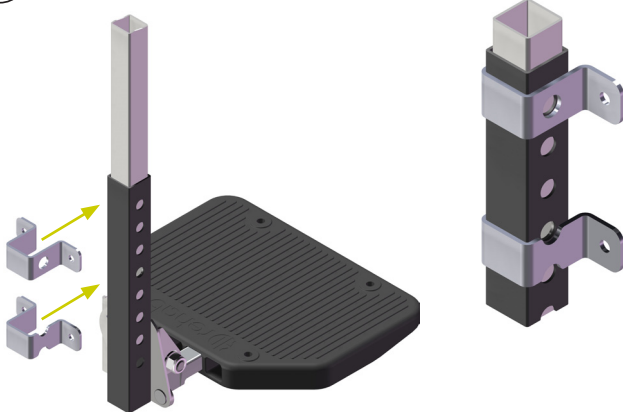

2

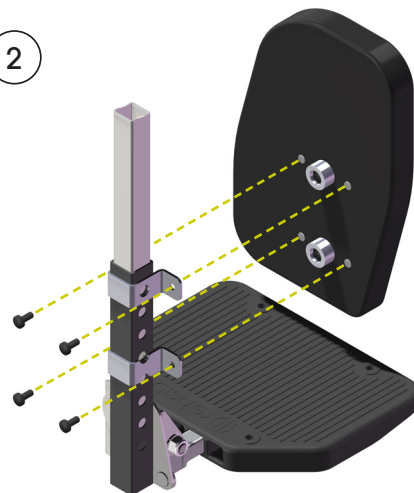

1. Push the upper and lower mounting brackets on to the footplate holder. **Note positions:** The top bracket fits over the first hole on the tube and the lower bracket fits between the 4th and 5th holes.

2. Fasten the footrest side in place with 4 screws.

### Care Instructions

The footrest side can be cleaned by wiping with soap and water. See the Maintenance Instructions, art. no. 95730-1. Always replace damaged parts immediately.