

Brickbord

Till HD Balance finns rullstolsbord i två olika material:

- Träbord (A) i ek, med uttag för bålen.
- PC-bord (polykarbonatbord) (B), med uttag för bålen. Det genomskinliga materialet ger sikt för den som kör och visuell kroppskontakt för den som sitter i stolen.

Båda borden finns med avlastningspolstring för armbågarna, (C och D). Alla bord är försedda med en liten sarg som förhindrar föremål att trilla av bordet.



Stödbord

Stödbordet (E) är polstrat och kan användas för att med underarmarna aktivt ta stöd framåt, t ex för att stabilisera överkroppen.



Bordfästen

Bordsfästen finns i två utföranden

- Standard (ej låsbara) (F)
- Låsbara (G)



Borden sätts på plats i fästena som monteras i befintliga skenor i armstöden.

Muggbord

Muggbordet (H) kan användas som ett alternativ när en mindre avställningsyta önskas. Det är försett med en nedsänkning där mugg, glas eller liknande kan placeras. Bordet kan vridas bort för att underlätta för brukaren att förflytta sig i och ur rullstolen. Till muggbordet används ett speciellt fäste med rotationslåsning (I). Fästet monteras i en befintlig skena på ett av armstöden.




Borden kan ställas i djup på tre olika sätt:

1. Justera bordsfästernas placering i armstödsskenan (insexnyckel).
2. Justera armstödsplattorna i djup genom att föra dessa framåt/bakåt.
3. Vänd bordstapparna för en placering av bordsskivan längre fram (insexnyckel). Denna inställning gäller ej muggbordet.

Mer information om hur inställningarna görs finns i Bruksanvisning/Monteringsanvisning Bord och Stödbord (art. nr. 95801).

Mått:

Tabell 1 - Mått	bredd [cm]	djup [cm]	Max avstånd ryggdyna - bordskant, a [cm]
Brickbord till sb38-42	61	40	37*
Brickbord till sb46-50	69	40	
Stödbord till sb38-42	61	35	
Stödbord till sb46-50	69	38	
Muggbord	28	22	-

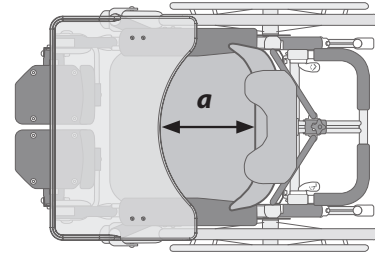

* Vid justering enligt punkt 1-3 ovan.

Tänk på:

- OBS! Det finns restriktioner om att låsa fast brukare i rullstolen mot dennes vilja. Det är upp till förskrivaren att hålla sig informerad om vilka regler som gäller i det enskilda fallet.
- Bord bör ej användas som stöd för överkroppen om risk för axelluxation finns.

Artikelnummer

Artikelnummer för bord och fästen finns i Beställningsguiden, art.nr. 95750.