

Det finns två alternativa stöd för brukarens huvud/nacke, Huvudstöd (A) och Nackstöd (B).



Huvudstöd

Huvudstödet ger ett lite större och fastare stöd för hela huvudet och är skålat, vilket ger ett bekvämt stöd åt sidorna. Den nedre delen är något avfasad för att inte ge ett tryck i nackgruppen, men huvudstödet kan vändas upp och ner om man önskar en tjockare och rundare form för att i stället fylla ut nackgruppen.

Huvudstödet finns i tre modeller:

Basic: Med fast huvudstöds kudde (C)

Side: Med sidoställbar huvudstöds kudde (D)

Side+: Med sidoställbar huvudstöds kudde och fästen för sidostöd (höger och vänster) (E)



Nackstöd

Nackstödet (B) är lite mindre, mjukare och fungerar som ett stöd i nackgruppen för den lite mer aktive brukaren.

Nackstödet finns i två modeller:

Side: Med sidoställbar nackstöds kudde (F)

Side+: Med sidoställbar nackstöds kudde och fästen för sidostöd (höger och vänster) (G)



Sidostöd

Sidostöd används då brukaren har ett ökat behov av sidostabilitet på en eller båda sidor. Sidostöden är vändbara och kan användas på höger eller vänster sida. Sidostöds kuddarna är de samma för huvudstöd och nackstöd. Byglarna skiljer dock i form.

Sidostöden finns i två modeller:



Fix: Sidostöds kudde med fast vinkel för huvudstöd (H)

Vario: Sidostöds kudde med ställbar vinkel för huvudstöd (I) och för nackstöd (J)



Inställningar

Huvud- / Nackstödet består av två delar. Ett ställrör (K) som monteras i fästet på rullstolsryggens baksida, samt ett huvud-/nackstödsrör (L) med kudde. Huvud- / Nackstödet går att ställa i höjd (24 cm) – djup (10 cm) med hjälp av rattar. Kuddens vinkel (M) samt vinkeln mellan huvudsstödsrör och ställrör (N) är reglerbara utan verktyg.

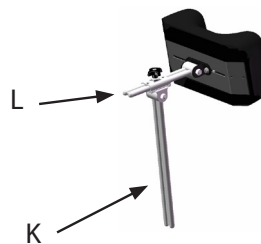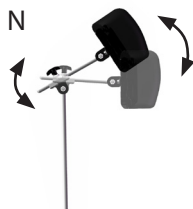

Tips!

Använd vårt profilstopp för att alltid kunna ställa in huvud-/nackstödet på samma höjd. Profilstoppet hittar du i Beställningsguiden.



Mått kuddar


Tabell 1 - Mått - kuddar

Typ av kudde	höjd [cm]	bredd [cm]	tjocklek [cm]
Huvudstöd	16	31	5 (mitt bak)
Nackstöd	13	28	6 (mitt bak)
Sidostöd	13	11,5	2,5

Tänk på:

Det är möjligt att förse Huvud-/Nackstödet med ett längre huvud-/nackstödsrör (O) för att öka ställbarheten framåt (10 cm).

⚠ Detta är ett specialutförande vilket behöver riskbedömas. Bedöm om fördelarna med detta specialutförande övervinner de tillkommande riskerna.

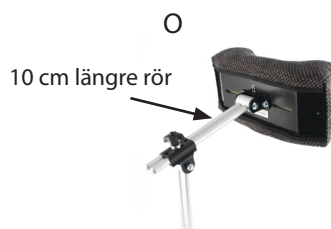

Klädsel

Huvud- och Nackstöd har som standard grå tygklädsel. Kan även beställas i svart Trevira eller i svart avspitbar Dartex. Alla klädsel är avtagbara och tvättbara i 60°. Klädsel finns även att beställa separat.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.