



Det finns tre alternativa fotstöd, Fotstöd delat (A), Fotstöd helt (B) och Fotlåda (C).

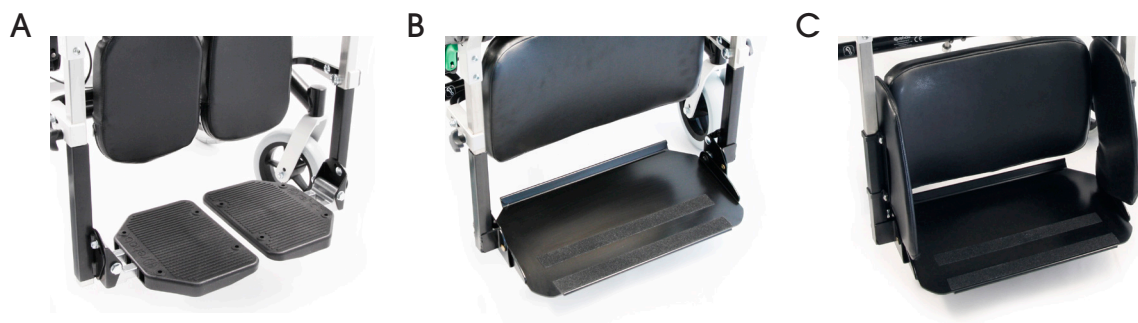

Justering

Fotstöden höjs och sänks stegvis med snäpplås (D). Fotstödsvinkel justeras med medföljande verktyg (E). Dessa inställningar kan göras på alla tre fotstödsvarianterna.

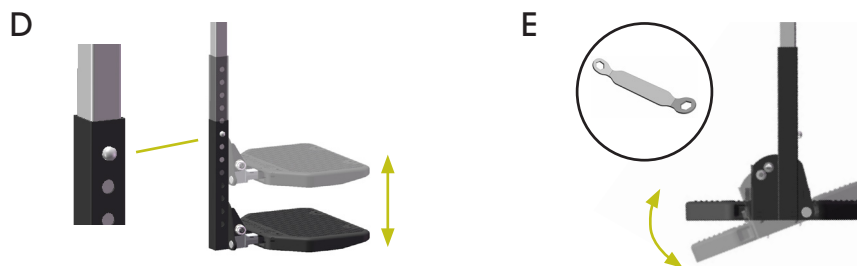

Fotstöd delat

Delade fotstöd ingår som standard till HD Balance, om inget annat val gjorts. De används även när det finns behov av separat inställning av benstödsvinkel och/eller fotstödshöjd. Fotstöden består av fotplatta (F) och fotplattshållare (G). Observera att fotplattan finns i två storlekar, en storlek till sittbredd 38 och 42 samt en storlek till sittbredd 46 och 50. Fotplattorna sidjusteras för att passa respektive sittbredd (H).

Fotplattorna kan justeras i djup genom montering i tre lägen, standard, främre och bakre position (I).



Fotstöd helt


Fotstöd helt finns som alternativ om brukaren har ett behov av en hel understödsyta för fötterna. Den är uppfällbar bakåt/uppåt, vilket underlättar i- och urstigning. Fotstöd helt består av en hel fotplatta (J) och fotplattshållare (K).



Fotlåda

Fotlåda används till brukare som behöver skydd vid ofrivilliga fot- och benrörelser. Fotlådan består av en hel fotplatta (L), fotplattshållare (M), sidopolstring (N) och vadplatta (O).

Vadplattan och sidopolstringen är klädda med vinylmaterialet Soft som är avtorkbart.

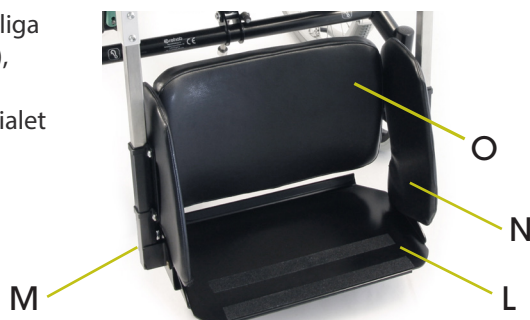

Fotplattshållare

Samtliga fotstöd finns med standard (P) eller kort fotplattshållare (Q). Hos brukare med behov av kortare benstöd används kort benstödsöverdel (R) i kombination med kort fotplattshållare (Q). Hos brukare med behov av längre benstöd används lång benstödsöverdel (S) i kombination med standard fotplattshållare (P). Dessa kombinationer gäller även fotlåda och helt fotstöd.




Tillbehör till fotstöd

Fotstödssida (T) monteras på de separata fotplattshållarna och används till brukare som t ex behöver skydd vid ofrivilliga fot- och benrörelser. Fotstödssidorna kan användas i stället för fotlåda när brukaren har behov av olika fotstödshöjd och/eller benstödsvinkel.

Hälband (U) finns till Fotstöd delat, en modell för båda fotstödsbredderna. Hälbanden används för att behålla fötternas position på fotplattorna.

Mjuk polstring finns som tillbehör till Fotstöd delat (V) samt till Fotstöd helt och Fotlåda (W) och används till brukare som sitter i rullstolen utan skor.

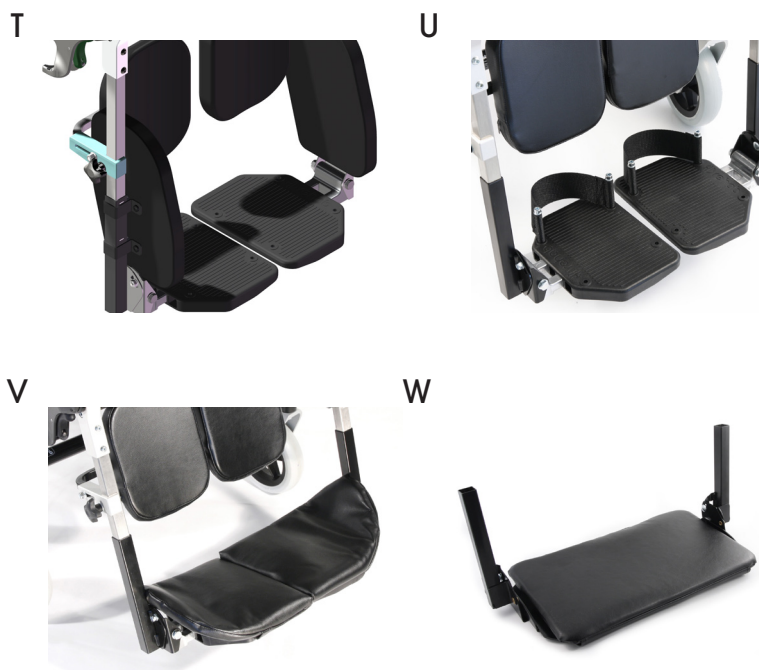


Mått

Tabell 1 - Mått fotplattshållare [cm]

Modell	Längd	Antal justeringshål	Avstånd mellan justeringshål
Standard	20	8	2
Kort	12	5	2

Obs: För funktionell längd, dvs sittplatta till fotplatta, se infoblad benstöd, art.nr. 95933.

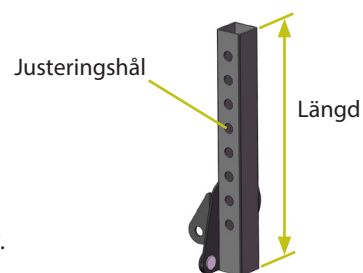


Tabell 2 - Mått fotplattor [cm]

Modell	Sb 38 Bredd / Djup	Sb 42 Bredd / Djup	Sb 46 Bredd / Djup	Sb 50 Bredd / Djup
Fotstöd delat	16 / 21	16 / 21	19,5 / 21	19,5 / 21
Fotstöd helt	35 / 22	39 / 22	43 / 22	47 / 22
Fotstöd fotlåda	35 / 22	39 / 22	43 / 22	47 / 22


Tabell 3 - Vinkel fotstöd

Modell	Vinkel
Fotstöd delat	20°
Fotstöd helt	20°
Fotstöd fotlåda	20°

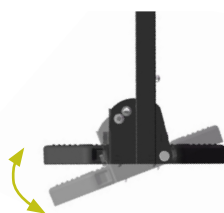

Tabell 4 - Mått sidopolstring/Fotstödssida [cm]

Modell	Höjd	Djup
Fotlåda standard	28	18
Fotlåda kort	28	18
Fotstödssida	24,5	16,5

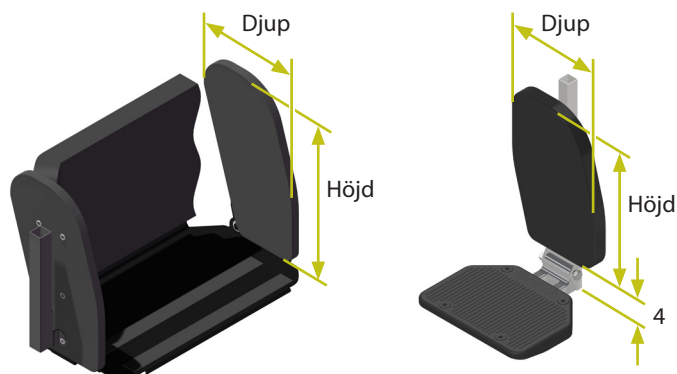

Tänk på

- Helt fotstöd i kombination med helt vadstöd ökar benstödens stabilitet och hållbarhet och bör användas till brukare med t.ex. kraftiga tonusväxlingar/spasticitet. Använd vinkelfasta benstöd för maximal hållbarhet.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.