

HD Balance finns med Sittdyna standard (A) eller Sittdyna lång +5 cm.

A



Sittdynan placeras normalt centrerad över sittplattan, så att sittplattan täcks. Dynan fästs på sitsen med kardborrband.

Sittdyna standard

HD Balance är utrustad med en formad sittdyna i formgjuten kallskum. Dynan har sittgrop och den främre delen är lätt formad för att ge stöd åt lårbenen. Framkanten på dynan är snedskuren för att minimera risk för tryck i brukarens knäveck.


Sittdyna lång

Det finns även en 5 cm längre sittdyna som passar till HD Balance med förlängt sittdjup. Utformning och funktion är densamma som för sittdyna standard.

Mått sittdynor

Tabell 1 - Mått sittdynor [cm]

Modell	Djup	Bredd	<i>a</i> = Höjd framkant	<i>b</i> = Höjd mitt bak
Standard	48	38, 42, 46, 50	9	7
Lång	53			

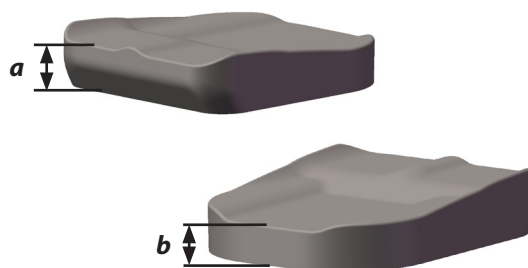

Klädsel

Sittdynorna har som standard grå Trevira tygklädsel. De kan även beställas i svart Trevira eller i svart avspritbar Dartex. Alla klädsel är avtagbara och kan tvättas i 60°. Klädsel finns även att beställas separat.

C



D



E



Överdragsklädsel

Till sittdyna standard och sittdyna lång finns även överdragsklädsel i svart Trevira som träs över befintlig klädsel. Överdraget kan fås med eller utan inkontinensskydd och är tvättbart i 60 grader.

Tänk på

- Sittdynor av formpressat kallsaum har en begränsad livslängd beroende på användning. Dynorna ska kontrolleras 1-2 gånger per år för brukarens komfort och säkerhet. Vid behov byts nedsuttna och uttjänta dynor ut.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.