

HD Balance kan utrustas med elfunktioner för sittstilt och ryggfällning vilket gör det möjligt för brukaren att själv ändra sittställning i rullstolen. Detta kan vara aktuellt för brukare med nedsatt bålbalans och/eller med hög risk för trycksår och med ett frekvent behov av att byta sittställning.

Handkontrollen (A) styr ett ställdon för tilten (B) och ett ställdon för ryggfällning (C). Båda dessa sitter placerade under sitsen. Handkontrollen kan skötas av antingen brukare eller vårdare beroende på vad som är lämpligt i det enskilda fallet. En individuell riskbedömning ska göras för att avgöra om brukaren självständigt klarar av att sköta handkontrollen. Handkontrollen har en hake som gör att den kan fästas/hängas på valfri plats. Se till att kabeln hänger så att den inte kläms eller är i vägen på något sätt.

OBS! Tilten kan inte begränsas eller utökas utan är alltid 0-20 grader. Detta gäller även ryggfällningen som alltid är 90-120 grader.



Laddning

Batteriet laddas så ofta som möjligt (med fördel under natten) och sker genom att laddaren kopplas till vägguttaget.

Tänk på

- Det går inte att manövrera tilt och ryggfällning manuellt på en rullstol som är utrustad med elställdon. Elfunktionen ersätter helt reglagen på körbygeln.
- Elfunktionerna går ej att kombinera med de balansplåtar som ger sänkt, framflyttad eller bakflyttad sitsenhet.
- Gör alltid en individuell riskbedömning innan brukaren får hantera manöverdosan själv.
- Klämrisker finns och det kan vara svårt att upptäcka om något hamnat i kläm i rörelsen. Var försiktig!
- Tänk på att om bord används finns risk att brukaren kläms mot detta när ryggen fälls upp. Detta kan leda till kvävning.
- Produkten bör ej användas av brukare med ökade krav på hållbarhet t ex vid kraftig tonusökning/spasticitet eller liknande rörelsemönster.
- Elställdon för rygg och tilt ökar rullstolens vikt med ca 5 kg. Komponenterna väger 6 kg men vid användning av elställdon tas andra komponenter, vilka väger ca 1 kg, bort från rullstolen.
- Max brukarvikt är 130 kg, dvs 5 kg mindre än om rullstolen inte är utrustad med elfunktioner.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.