

# KORTFATTAD BRUKSANVISNING FÖR HD-RULLSTOLAR




## Sits- och Ryggvinkling

Ryggstödet vinkling regleras med spaken till vänster på ryggens baksida, **a**. Frigör reglaget genom att föra spaken åt vänster.

Sitsenhetens vinkling regleras med spaken till höger på ryggens baksida, **b**. Frigör reglaget genom att föra spaken åt höger.

**Håll i körbygel** när detta utförs.

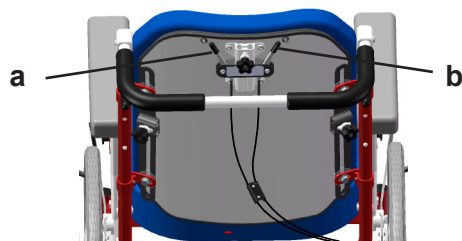

## Säkerhet

Innan rullstolen tas i bruk är det viktigt att användare och vårdare är väl förtrogna med hur stolen fungerar och ska användas. Läs hela bruksanvisningen och testa köregenskaper och funktioner.

Underhåll: Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att underhållsanvisningarna följs och reglage och bromsar testas regelbundet.

Tipprisk: Risken att rullstolen kan tippa bakåt ökar om väskor eller annat hängs på ryggstödet, spec. om stolen är tippad bakåt.

Klämrisk: På grund av de många inställningsmöjligheterna bör vårdaren vara uppmärksam på klämrisken, för både brukaren och vårdaren. Normalt är dock klämrisken liten.

Mer information kan hämtas på vår hemsida.

Hantverksdesign & Rehab.prod. AB  
Box 1263 18124 Lidingö Sweden  
Tel 08-767 04 80 Fax 08-767 50 00  
www.hantverksdesign.se

## Bromsar

Bromsen aktiveras genom att bromshandtagen trycks upp mot körbygel. För parkeringsbroms skjuts stopphylsan, **c**, framåt.




Kontrollera att hylsan fäster och att rullstolen är bromsad. Bromsa på båda sidorna.

Frigör bromsen genom att trycka upp bromshandtaget och dra hylsan bakåt.

Rullstolar med 24"-hjul har även en däckbroms för brukaren, **d**, på sidorna framför hjulen.

Bromsspaken förs framåt vid bromsning. Ska endast användas som parkeringsbroms.

**Läs den kompletta bruksanvisningen för mer information.**

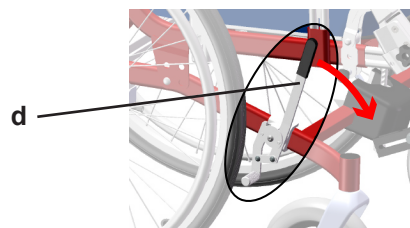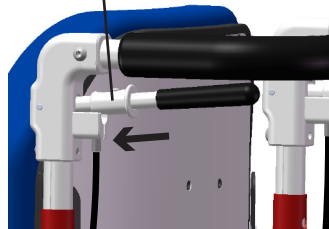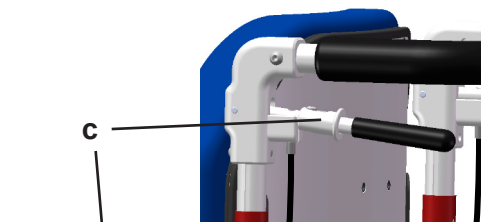


## Tippskydd

Rullstolen ska vara utrustad med tippskydd.

Tippskydden, **e**, dras ut genom att trycka in lås-snäppen, **f**. Se till att snäppen fjädrar ut i hålet när tippskyddet ändras.

**Ha alltid tippskydden utdragna vid tipprisk bakåt.**

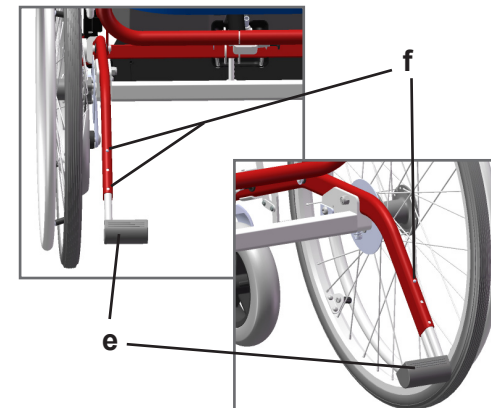

## Körbygel

Höjden på körbygel justeras genom att trycka in det ena snäpplåset, **g**, och föra körbygel på samma sida uppåt. Håll körbygel uppe och tryck in det andra snäpplåset. Ställ in körbygel i önskad höjd. Se till att bromsvajrarna lätt glider med uppåt.

**Kontrollera att båda snäppknapparna fjädrat ut i hålen och att bromsvajrarna löper fritt utmed ryggrören.**



## Benstöd

Benstödens vinkel regleras med tryckknappen på sitsramens sida, **h**. Ta tag i benstödsröret, tryck in knappen och för benstödet till önskat läge, (5 lägen, varav det innersta endast är avsett som transportläge).

### Borttagning av benstöden:

Lossa på ratten, **i**, och dra den utåt. Benstödet kan då vridas ut enl. nedre bild, lyftas upp och hakas av.



Dra åt ratten när benstödet hakats på igen.

### Inställning av vadstödens höjd:

Lossa på ratten, **j**, flytta vadstödet till önskad höjd och dra åt ratten. Djupinställning av vadplattan kräver verktyg.

### Inställning av fotstödens höjd:

Lossa ratten, **k**. Tryck in knappen, **l**. Flytta fotstödet till önskat läge, (8 hål). Dra åt ratten, **k**. Vinkelinställning av fotstödens vinkel kräver verktyg.

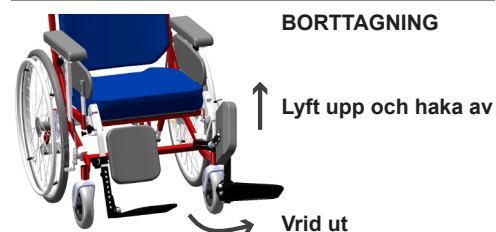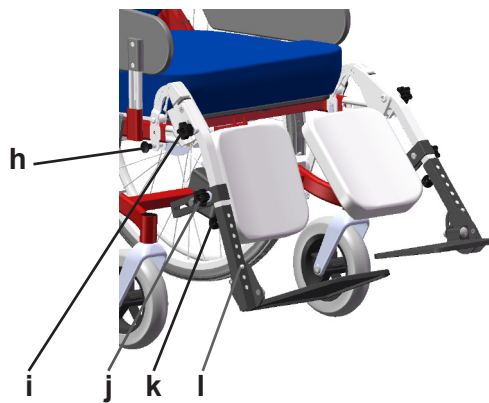

LÄS DEN KOMPLETTA BRUKSANVISNINGEN  
FÖR MER INFORMATION


## Armstöd

Armstöden tas av genom att fatta om armstödsdynan och lyfta rakt uppåt.

Höjdställning: Lossa vredet, **m**, ett par varv. Ställ in höjden. Armstödsröret har fördjupningar med 2 cm mellanrum som låsvredet "snäpper" i. Dra åt vredet. Inställningsområde är 8 cm.



Djupinställning: Armstödsplattan kan ställas i 4 lägen. Tryck in låsklappen, **n**, ställ in önskat läge.

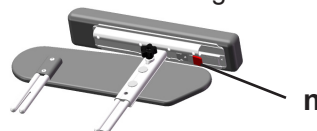

## Hjul

Samtliga hjul är som standard pump- och punkteringsfria. Lossa hjulen: Tryck in låsknappen, **o**, på undersidan av hjulfästet, lyft rullstolen en aning och ta loss hjulet.



Montering av hjulen: För in hjulaxeln, **p**, i hylsan, **q**, på hjulfästet, tryck in låsknappen, **o**, på undersidan av hjulfästet och tryck in hjulet så att de tre tapparna på hjulnavet passar i bromsskivans tre hål. Släpp låsknappen.

Kontrollera att  
hjulet sitter fast.



## Ihopfällning

Ta av armstöd, benstöd och eventuella tillbehör såsom bälstöd eller bendelare. Även sittdynan kan tas bort. Dra ut ryggfällningssprinten, **r**. Gasfjädern, **s**, faller då ner från fästet, **t**, och ryggstödet kan fällas fram. Ta ev. bort hjulen.

När gasfjädern åter ska fästas i ryggramen, kontrollera att sprinten låser på korrekt sätt.



## Transportfäste

Vid fastspänning i fordon ska spännordningen fästas i hjulramens sidorör, alternativt i tillbehöret transportfäste, **u**. Aldrig i hjul, sitsram, benstöd eller liknande. **Spänn inte för hårt, det kan skada rullstolens hjul och ramdelar. Spännbanden ska endast hålla kvar rullstolen i position.**

