

Uppackning - instruktion

VIKTIGT!

Art.nr. 95036



Gäller samtliga HD-Rullstolar

Rullstolarna genomgår en noggrann leveranskontroll innan de lämnar fabriken. Innan rullstolen tas i bruk bör trots det en funktionskontroll och allmän översyn göras för att säkerställa att ingen skada uppstått under transporten.

På grund av packningsskäl kan körbygeln i vissa fall vara borttagen ur ryggramen.

Följ nedanstående instruktion för körbygelns montering.

OBS! Var noga med att inte skada bromsvajrarna.

Läs bruksanvisningen innan rullstolen tas i bruk.

Körbygel

Rullstolen är normalt utrustad med hel körbygel (1).

- Stoppa ner körbygeln i ryggramen (2).
- Tryck in snäpplåset (3) och ställ körbygeln i önskat läge.
- Det finns 3 hål för olika höjdlägen.

OBS! Kontrollera att båda snäpplåsen har fjädrat ut i hålen på ryggrör.

OBS! Kontrollera att bromsvajrarna löper fritt och inte utsätts för åverkan. Bromsvajrarna ska ligga utmed ryggröret.



Separata körhandtag

Rullstolen kan alternativt vara utrustad med separata körhandtag (4).

Handtagen kan vid leverans vara invikta mot ryggen och skruvarna (5) är bipackade i en påse.

- Flytta körhandtagen till önskat läge. I körhandtagsrören finns ett gängat hål avsett för låsning i ryggramen.
- Skruva fast de medföljande skruvarna med brickorna mot ryggröret.
- Det finns 3 hål för olika höjdlägen.
- Det medföljande verktyget som är placerat under sitsen på rullstolens högra sida, kan användas.

OBS! Kontrollera att bromsvajrarna löper fritt och inte utsätts för åverkan. Bromsvajrarna ska ligga utmed ryggröret.

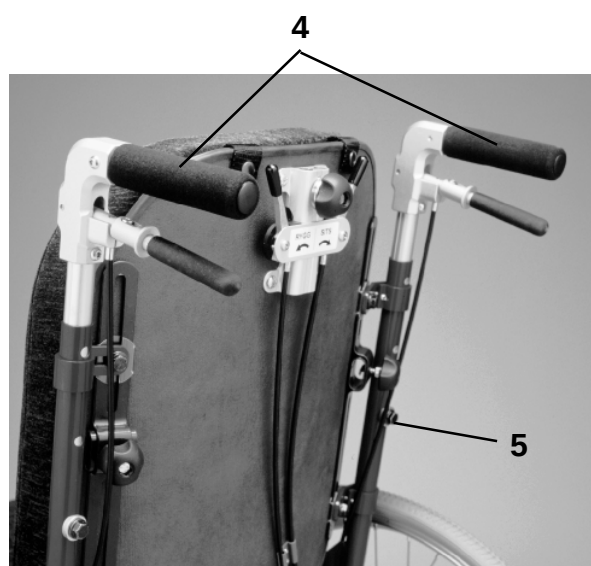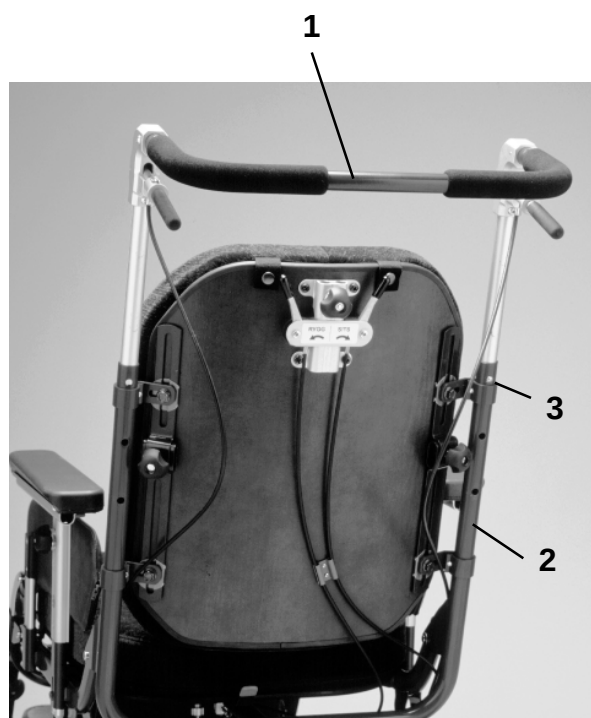

Hantverksdesign & Rehab. prod. AB

Box 1263 181 24 Lidingö Sweden tel. 08-7670480 fax. 08-7675000

Dokument: bruks-bilaga1 rev. D2