

Montering av droppflaskställning

Art.nr. 95103

Montering av droppflaskställning på HD-rullstolar

Droppflaskställning får monteras på HD-Rullstolar inom ramen för bibehållen CE-märkning om följande beaktas.

- Ingen åverkan får ske på rullstolens ramdetaljer. Borrning av mindre hål på hjulramens sidorör bakom hjulinfästningen tillåts dock.
- Kontrollera att problem eller risker ej uppstår när rullstolens regleringsmöjligheter används. Speciellt tipprisker och klämrisker måste kontrolleras.
- Infästningen bör i första hand göras på hjulramen, i andra hand på sitsramen och i tredje hand i ryggramen.
- Max vikt om utrustningen monteras på ryggramen är 6 kg, på sitsramen 10 kg och på hjulramen 20 kg. Observera att totalvikten (användare + utrustning) inte överskrider rullstolens maximalt tillåtna viktsbelastning.
- Förlängda tippskydd bör användas. Om ökad risk för tippning bedöms som mycket liten kan standard tippskydd användas. Dessa bör spärras i utdraget läge.
- Montering kan påverka funktionen och hindra användningen av eventuella tillbehör.
- Bör ej användas tillsammans med tillbehören väskkrok, förlängd tippstång och förlängd gasfjäder.
- Bruksanvisningen skall kompletteras med eventuell nödvändig information.
- Varningsskylt (-etikett) bör sättas på stolen.

Det åligger montören / ordinatorn att bedöma om risken ur säkerhetsaspekt är för stor. Detta varierar från fall till fall. Ökade risker kan ibland kompenseras, exempelvis kan ökad tipprisk bakåt minskas genom att begränsa sitstipp- och/eller ryggfällningsfunktionen. Om risken bedöms som för stor ska hållaren ej monteras.

Det förutsätts att allt arbete utförs och bedöms av kompetent personal på ett fackmannamässigt sätt.