

UNDERHÅLL av HD-Rullstolar

Art.nr. 95105

	Allmänna rekommendationer om underhåll. För att uppnå bästa säkerhet och lång livslängd bör rullstolen hållas ren och snygg. Eventuella fel och brister som uppstår bör genast åtgärdas. Hur stolen används påverkar även behovet av underhåll. Hård användning och mycket utomhusbruk kräver naturligtvis mer underhåll.	
	Hur ofta ?	Typ av underhåll
1	Löpande Kan utföras av vårdpersonal med rullstolens bruksanvisning som underlag. Ingen speciell fackkunskap är nödvändig.	Rengöring vid behov. Lackerade och ytbehandlade ytor: - Tvättas med normala allrengöringsmedel. Plastdetaljer: - Tvättas / avtorkas med normala allrengöringsmedel. Klädsel: - Tvättas med textiltvättmedel. - Avtagbar klädsel kan maskintvättas, se tvättråd i klädseln. Åtgärdande av ev. brister. Se bruksanvisningen.
2	Periodisk 1 – 2 gånger årligen Kan utföras av vårdpersonal med rullstolens bruksanvisning som underlag. Ingen speciell fackkunskap är nödvändig.	Översyn av rullstolens allmänkondition. - Allmän rengöring. - Kontroll av samtliga funktioner, även de som inte används. - Leder kan vid behov smörjas med en droppe olja. Även tippplåset, se bruksanvisningen, kan smörjas med några droppar olja, speciellt om det under en längre period inte har använts. OBSERVERA! Vid ev. smörjning av detaljer till skivbromssystemet, var noga med att ingen olja eller fett kommer på bromsskivan, då detta försämrar bromsverkan. Kromade rör och aluminiumprofiler med teleskopfunktion kan smörjas lätt med vaselin eller livsmedelsgodkänt fett.
3	Periodisk var 3:e år Efter 8 års ålder med 2 års intervall	Ordentlig översyn, rekonditionering. Ev. uppdatering av detaljer. Se speciell rekonditioneringsanvisning. Art.nr. 95106 och 95107. OBS! Detta ska göras av fackman.