



Motion Synergy (AV300)



Motion (AV400)

Motion Comfort+ (AV500)

bruksanvisning

amovida rullstolsdynor

bruksanvisning

Inledning

Amovida sittdyna är ett medicintekniskt hjälpmedel som bör provas ut av medicinskt behörig person. Dynorna är 6,5 cm höga och är i första hand avsedda att användas till på marknaden förekommande aktiv-/allroundrullstolar men kan även i vissa fall, efter bedömning, användas i andra rullstolar eller sittsystem.


Alla vårdare, anhöriga och assistenter i brukarens närhet bör av säkerhetsskäl ta del av informationen i denna bruksanvisning.

Beskrivning

Amovida rullstolsdynor finns i två olika produktgrupper. Produktgrupp 1 består av AV300. Produktgrupp 2 består av AV400 och AV500.

Max brukarvikt 200 kg.

Produktgrupp 1

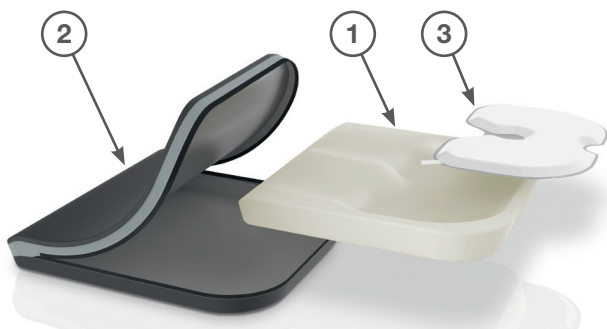

Motion Synergy (AV300) ISO 043303

1. Skumbas med halv sittgrop
2. Dynöverdrag, 3 mm 3D-mesh
3. Inlägg vitt Amovida Light Fluid (ALF)

Produktgrupp 2



Motion (AV400) ISO 043303

4. Skumbas med hel sittgrop
5. Dynöverdrag, 7 mm 3D-mesh
6. Inlägg av vitt Amovida Light Fluid (ALF)



Motion Comfort+ (AV500) ISO 043303

4. Skumbas med hel sittgrop
5. Dynöverdrag, 7 mm 3D-mesh
7. Inlägg vitt Amovida Light Fluid (ALF) samt grönt Phase Change Material (PCM)

amovida rullstolsdynor

Bruksanvisning

Dynorna består av skumbas, inlägg och dynöverdrag. Dessa delar ska alltid användas tillsammans som en komplett sittdyna och bör ej kombineras med andra dynor och överdrag då detta kan minska Amovidadynans funktion.

Inläggen består av trögflytande vätska av hög kvalitet. Om dynan ej används under en längre tid, t ex vid transport eller lagerförvaring kan en separation av vätskans beståndsdelar i inlägget uppstå. Innan användning är det därför nödvändigt att massera inlägget med händerna så att materialet blandas. Var noga med att dynan är plan och att materialet är jämnt fördelat när du lägger tillbaka dynan i dynöverdraget.

Undvik vassa föremål i närheten av dynan för att förhindra skada på denna.

Förskrivarinformation

Amovida sittdyna används förebyggande för personer med nedsatt rörlighet och/eller sensibilitet, som löper större risk att drabbas av tryck/rodnad eller hudskador. Regelbunden kontroll av huden bör göras för att upptäcka eventuell hudrodnad i god tid. Det är även viktigt att användaren byter ställning regelbundet.

Dynan kan användas t ex när:

- det finns behov av tryckavlastning/tryckfördelning
- det finns risk för skjuvning
- det finns behov av stötdämpning
- det finns behov av temperaturreglering (AV500)

Att placera dynan rätt

Se till att inlägget är ordentligt fäst och jämnt fördelat mot skumbasens sittgrop.

Placera sittdynan så att undersidans antihalkyta ligger säkert mot rullstolen med dynöverdragets handtag framåt. Viktigt: I modellen AV500 ska inläggets gröna sida vara uppåt, den vita sidan ska fästas mot skumbasen.

Vid lätt slackad sits kan det bli nödvändigt att gå upp en storlek i sittbredd på dynan. Vid kraftigt slackad sits bör utjämningskiva användas. Dynan bör få stöd av rullstolens sidostöd för bästa effekt.

Positionering

Som tillbehör finns ett anpassningskit bestående av fyra mindre kuddar med Amovida Light Fluid (ALF). Dessa placeras mellan inlägg och skumbas för önskad positionering av brukaren.

Kontraindikationer

Amovida sittdynor ska inte användas om:

- Brukaren redan har skadad hud (öppna sår, eksem etc)
- Brukaren är inkontinent och inget inkontinensöverdrag används. Inkontinensöverdrag finns som tillbehör.

Kontakta medicinsk personal om problem skulle uppstå vid användning av sittdynan.

Underhåll / Rekonditioneringsanvisning

Dynöverdrag: Maskintvätt 60°. Tvätta överdrag med dragkedjan stängd. Överdraget får ej torktumlas men kan torkas i torkskåp på låg temperatur.

Inlägg och skumbas: Rengöring med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.

Det är viktigt att skumbas, inlägg och dynöverdrag rengörs noggrant mellan brukare för att minimera risken för smittspridning.

När Amovidadynan inte används rekommenderas att den lagras plant i sin kartong i rumstemperatur. Utsätt inte dynan för extrem värme eller kyla. Låt dynan anta rumstemperatur före användning.

Skrotningsanvisning

Hela dynan hanteras som brännbart avfall.

Garanti

Amovidadynans garanti mot fabrikationsfel gäller två år från leveransdatum. Förväntad livslängd vid normal användning är 3 år förutsatt att dynan har använts enligt bruksanvisningen.

Brandtester

Brandtestad och godkänd enligt standarden EN 1021-1 och EN 1021-2.

Teknisk data

		Motion Synergy	Motion	Motion Comfort+	Passar till rullstol:	
					bredd i cm	djup i cm
Storlekar tillgängliga storlekar bredd och djup (cm) alla storlekar är 6,5 cm hög	XS	37 x 40	37 x 40	37 x 40	34...36	37...40
	S	40 x 40	40 x 40	40 x 40	37...39	37...40
	SL	40 x 45	40 x 45	40 x 45	37...39	42...45
	M	42 x 41	42 x 41	42 x 41	39...41	38...41
	L	45 x 45	45 x 45	45 x 45	42...44	42...45
	LL	-	45 x 50	45 x 50	42...44	47...50
	XLS	50 x 45	50 x 45	50 x 45	47...49	42...45
	XL	50 x 50	50 x 50	50 x 50	47...49	47...50
Vikt (g)	XS	900	1470	1730		
	S	970	1610	1870		
	SL	1100	1740	2000		
	M	1020	1740	2030		
	L	1160	2175	2570		
	LL	-	2230	2600		
	XLS	1360	2230	2600		
	XL	1480	2380	2750		
Färg	antracit / grå		antracit / grå / grön			
Produktkod	AV300	AV400	AV500			
Maximal användarvikt (kg)	200					
Material innerdyna - Lager 1	paraffinolja, lättviktsfyllning, silikonvax					
Material innerdyna - Lager 2	-	-	silikon med Outlast® PCM			
Skummaterial	Polyuretan					
Material fodral - Luftgenomsläpplig topp	Polyester					
Material fodral - Sida och bas	Polyester och Polyamid					