



# ***bruksanvisning***

*amovida anpassningskit*

## Viktigt


Använd bara Amovida anpassningskit tillsammans med följande Amovida rullstolsdynor:  
Amovida Motion (AV400) och Amovida Motion Comfort+ (AV500).

**För rätt placering av positioneringskuddar, konsultera medicinsk behörig person.**

Positioneringskuddar används endast om ytterligare positioneringsbehov i befintlig dyna finns. Positioneringskuddarna placeras alltid med veloursidan uppåt. De fästs med kardborre mellan skumbas och inlägg.

Exempel på placering av positioneringskuddarna:

1. Två kuddar placerade i de bakre hörnen i skumbasen. I detta fall stabiliseras bäckenet och hindras från att tippa bakåt vilket främjar en upprätt position av ryggraden. I extrema fall kan dubbla kuddar användas.
2. Kuddar placerade i varje hörn i skumbasen. I detta fall lyfts hela bäckenet för att öka djupet i sittdynan för att ytterligare avlasta tuber ischii.
3. Två kuddar placerade i varje hörn på vänster sida i skumbasen för att kompensera ett snett bäcken.
4. Två kuddar placerade i varje hörn på höger sida i skumbasen för att kompensera ett snett bäcken.

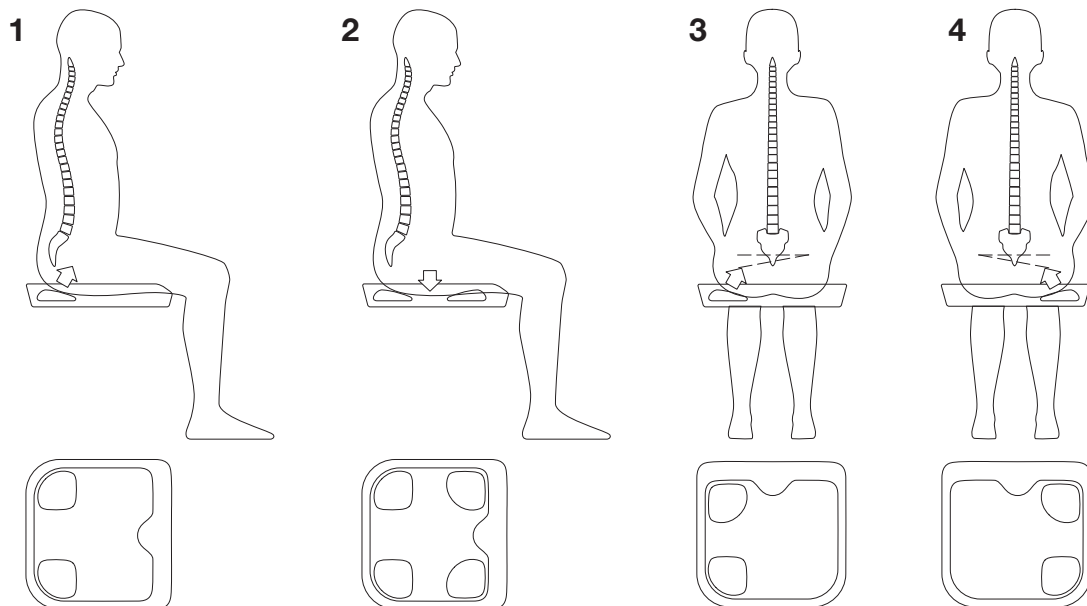

## Tvättinstruktioner

Positioneringskuddarna bör rengöras med en mjuk trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel.