

VIKTIGT!

Vissa tillbehör samt vissa specialutföranden av HD Balance medför ökade risker vid användandet av rullstolen. Dessa tillbehör och rullstolar är märkta med etiketten i figur 1 och finns beskrivna i detta dokument.

Vid oklarheter om vilket/vilka tillbehör/specialutförande som är aktuellt för en viss rullstol, kontakta alltid HD Rehab. OBS! En rullstol kan vara utrustad med flera tillbehör/anpassningar som medför förhöjda risker.

Kontrollera alltid underhållsanvisningen, 95730, om speciellt underhåll krävs för det specialutförande din rullstol är utrustad med.



Figur 1

Förhöjd sitsenhet


Rullstolen har balansplåtar i alternativt utförande som gör sitsenheten 50 mm högre (figur 2). Artikelnummer för dessa är 67052-6 (finns angivet på etikett på insidan av balansplåten).



- Rullstolen får en högre placerad tyngdpunkt vilket medför större risk att tippa, speciellt på lutande underlag.
- Vajrarna till broms, tilt och ryggfällning sträcks ut mer. Var uppmärksam så dessa inte skadas.

För Information om konfigureringsmöjligheter och begränsningar, se "Referenstabell - balanseringslägen" 95758.

OBS! Kontrollera alltid att brukaren verkligen har behov av en tiltplåt i specialutförande. Om "fel" brukare får en stol med specialtiltplåtar kan det innebära kraftigt förhöjda risker.

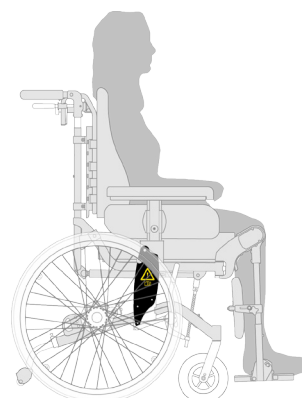


Figur 2

Sänkt sitsenhet

Rullstolen har balansplåtar i alternativt utförande som gör sitsenheten 30 mm lägre (figur 3). Artikelnummer för dessa är 67053-6 (finns angivet på etikett på insidan av balansplåten).

För Information om konfigureringsmöjligheter och begränsningar, se "Referenstabell - balanseringslägen" 95758.

OBS! Kontrollera alltid att brukaren verkligen har behov av en tiltplåt i specialutförande. Om "fel" brukare får en stol med specialtiltplåtar kan det innebära kraftigt förhöjda risker.

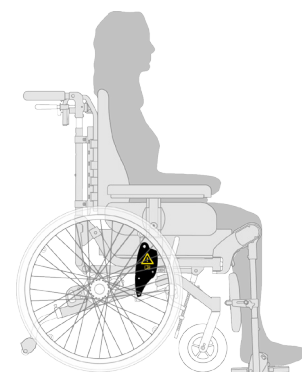


Figur 3

Framåtflyttad sitsenhet

Rullstolen har balansplåtar i alternativt utförande som flyttar sitsenheten 30 mm framåt (figur 4). Artikelnummer för dessa är 67056-6 (finns angivet på etikett på insidan av balansplåten).

För Information om konfigureringsmöjligheter och begränsningar, se "Referenstabell - balanseringslägen" 95758.

OBS! Kontrollera alltid att brukaren verkligen har behov av en tiltplåt i specialutförande. Om "fel" brukare får en stol med specialtiltplåtar kan det innebära kraftigt förhöjda risker.

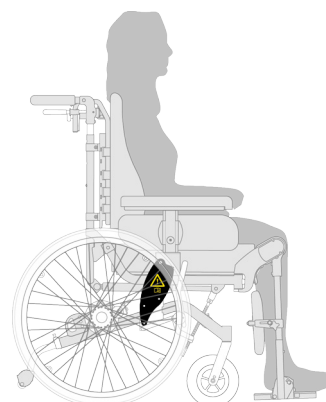


Figur 4

Bakåtflyttad sitsenhet

Rullstolen har balansplåtar i alternativt utförande som flyttar sitsenheten 30 mm bakåt (figur 5). Artikelnummer för dessa är 67057-6 (finns angivet på etikett på insidan av balansplåten).

För Information om konfigureringsmöjligheter och begränsningar, se "Referenstabell - balanseringslägen" 95758.

OBS! Kontrollera alltid att brukaren verkligen har behov av en tiltplåt i specialutförande. Om "fel" brukare får en stol med specialtiltplåtar kan det innebära kraftigt förhöjda risker.

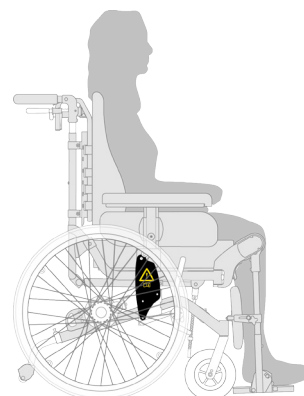


Figur 5

Utökad tilt bakåt

En rullstol utrustad med utökad sitstilt bakåt kan medföra förhöjd tipprisk för vissa brukare. Detta gäller speciellt brukare som är långa, benamputerade eller har kraftig överkropp men kan även gälla brukare med speciella rörelsemönster eller annorlunda kropps-konstitution.

Tänk på att inte hänga tunga saker på ryggen. HD Rehab rekommenderar att inte använda väskkrokar till rullstolar utrustade med utökad sitstilt bakåt.

En rullstol med utökad tilt bakåt är märkt enligt figur 6.

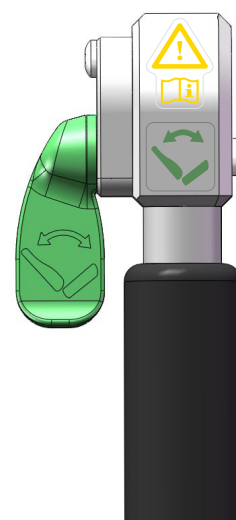

Figur 6

Utökad tilt framåt

Brukare som sitter i rullstolar utrustade med framåttilt (-5°) kräver extra uppmärksamhet så de inte glider ur stolen och skadar sig. Detta är speciellt viktigt om bälte används då bältet kan göra så att de inte får luft när de hasat ur rullstolen.

En rullstol med utökad tilt framåt är märkt enligt figur 6.

Utökad ryggfällning

En rullstol utrustad med utökad ryggfällning kan medföra förhöjd tipprisk bakåt för vissa brukare. Detta gäller speciellt brukare som är långa, benamputerade eller har kraftig överkropp men kan även gälla brukare med speciella rörelsemönster eller annorlunda kropps-konstitution som ofta sitter mycket tiltade bakåt.

Tänk på att inte hänga tunga saker på ryggen. HD Rehab rekommenderar att inte använda väskkrokar till rullstolar utrustade med utökad ryggfällning. En rullstol med utökad tilt bakåt är märkt enligt figur 7.



Figur 7. Märkning av rullstol med utökad ryggfällning.



Figur 8. Märkning av förstärkt rullstol.

Förstärkta ramar

Ramförstärkta rullstolar riskerar, trots sin förstärkning, att slitas ut snabbare än normalt eftersom dessa rullstolar generellt används vid förhållanden som ökar haveririsken. Var uppmärksam på sprickbildning i ramen och andra tecken som kan tyda på förslitning. En skadad rullstol ska alltid tas ur bruk omedelbart. Ramförstärkta rullstolar märks enligt figur 8.

Droppställningsfäste

Stolen är utrustad med tillbehöret droppställningsfäste, figur 9 & 10. Detta kan innebära ökad tipprisk, främst bakåt. Speciellt i situationer där en tung droppbehållare hänger högt och rullstolen tiltas/ryggfälls är risken hög. Var uppmärksam på detta och var noga med att använda möjligheten att rotera fästet för att åstadkomma en så vertikal position för droppställningen som möjligt för att minimera risken.

På grund av den tipprisk som uppstår när ryggstödet belastas med tunga vikter bör inte droppställningsfästet användas tillsammans med tillbehöret väskkrok.

Använd alltid tippskydd! Bedöms risken för hög kan drivhjulen flyttas till sin bakre position vilket gör rullstolen stabilare men något mer trög att köra.



Figur 9. Droppställningsfäste




Figur 10. Ryggfälld rullstol där fästet roterats för att droppställningen ska hållas vertikalt.

Elställdon tilt & rygg


Rullstol med elställdon kräver extra uppmärksamhet på klämrisker som uppstår då ramdelarna rör sig och vårdaren inte själv känner om det kärvar eller tar stopp. Kraften i ställdonen är stor! Om brukaren själv ska få hantera elfunktionerna är det viktigt att utvärdera om han/hon har förståelse för riskerna och bedöms klara av detta.

Då bord används och ryggen fälls upp är detta speciellt viktigt så inte brukaren trycks mot bordet.

Ställdonen är märkta enligt figur 11 (tiltfunktion) och figur 12 (ryggfällningsfunktion).

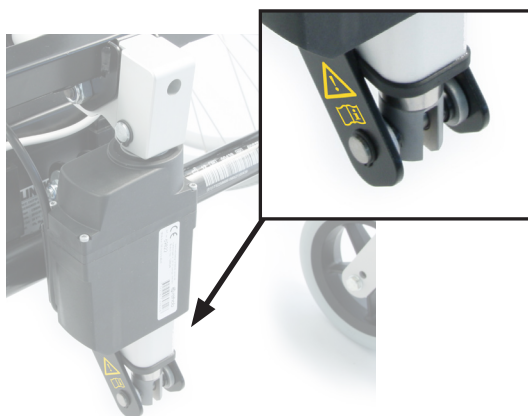

Figur 11

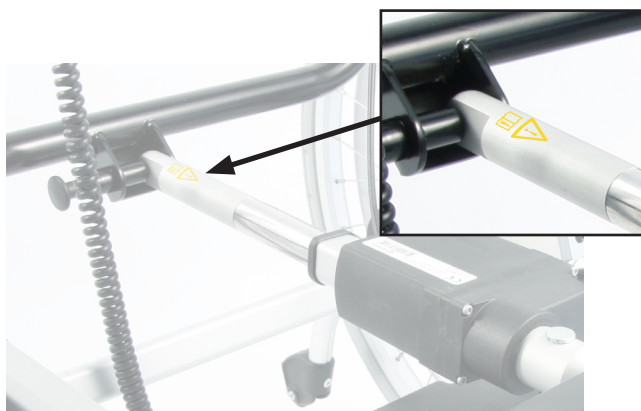


Figur 12

Ryggdistanser

Ryggdistanser, fig 13, åstadkommer ett kortare sitsdjup på rullstolen än vad som annars är möjligt.

Användning av ryggdistanser påverkar rullstolens balansering och ska bara användas i undantagsfall och för användare som verkligen behöver det korta sittdjupet.


Rullstolens tyngtpunkt flyttas och gör den mer tippbenägen framåt. Detta gör att brukare med en kropps-konstitution eller ett beteende som riskerar att tippa rullstolen framåt är särskilt utsatta för risk vid användandet av ryggdistanser.

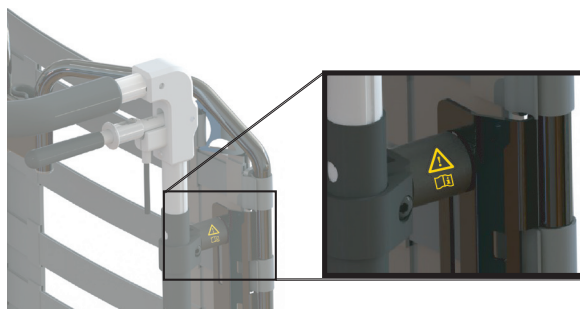

Figur 13,
ryggdistanser

Tippskydd

Tippskydden, fig 14, har en varningsetikett i standardutförande. Den varnar vårdaren för att tippskyddet inte är i aktiv position och bör återställas. Tippskyddet ska alltid vara i aktivt läge om möjligt.

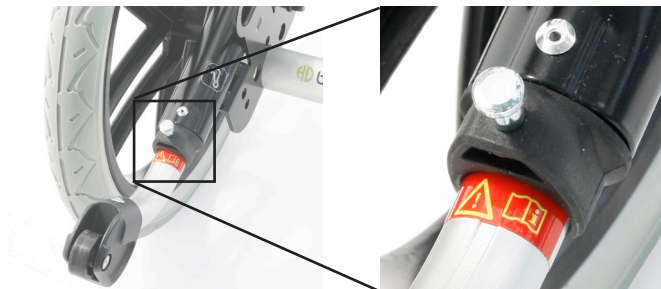

Figur 14,
Tippskydden

Syrgaskorg HD

Rullstolen är utrustad med tillbehöret Syrgashållare HD.

Syrgashållaren medför en förhöjd tipprisk, speciellt i tiltat läge.

Var uppmärksam på detta. På grund av den förhöjda tipprisken som uppstår när ryggstödet belastas med tunga vikter bör inte syrgashållaren användas tillsammans med droppställningsfästet eller väskkrok.

Använd alltid tippskydd! Bedöms risken för hög kan drivhjulen flyttas till sin bakre position vilket gör rullstolen stabilare men något mer trög att köra.



Specialanpassad produkt

Vissa specialanpassningar medför ökade risker och märks då med varningsetiketten. Se bifogat tillägg till bruksanvisningen för mer information om riskerna för den specifika specialanpassningen.