



Kortfattad bruksanvisning

Svenska

HD Balance Komfortrullstol

Denna bruksanvisning är ett
komplement till den fullständiga
bruksanvisningen.

Läs alltid den fullständiga versionen
innan rullstolen tas i bruk!

ALLMÄNNA SÄKERHETSASPEKTER:

- » Följ underhållsanvisningarna! Håll stolen ren och testa reglage och bromsar med jämna mellanrum.
- » Upptäcks en skada eller avsaknad av en detalj ska stolen tas ur bruk tills detta är åtgärdat.
- » Använd BARA godkända tillbehör!
- » Rullstolen bör framföras och användas med omdöme för att undvika onödiga risksituationer.
- » Rullstolen är inte avsedd att framföras av barn.
- » Var observant på tipprisen bakåt, den ökar för rullstolar med utökad tilt och om väskor eller liknande hängs på ryggstödet.

- » Brukare som är väldigt aktiva eller har ofrivilliga rörelsemönster kan tippa rullstolen om de greppar tag i fasta föremål. (t.ex. dörrkarmar, handtag) Ha god uppsikt över dessa brukare!
- » Var uppmärksam på brukarens situation i stolen. Viss klämrisk finns p.g.a de olika inställningsmöjligheterna.
- » Tänk på att brukaren inte alltid kan tala om att klämsituation uppstått.
- » Vissa klädesplagg är ej lämpliga på brukaren då dessa kan fastna i hjulen. Var speciellt försiktig med halsdukar och liknande då dessa kan dras åt runt brukarens hals om de fastnar.
- » Fäst ryggdynans stroppar runt flexiryggens rör för att undvika risk för tryck.
- » Vid lyft: Läs instruktionen för lyfthjälpmedlet noga och var uppmärksam på brukarens armar och ben under lyftet.

BRUKARVIKT

Den maximalt tillåtna brukarvikten finns angiven på rullstolen enligt:



TIPPSKYDD

Rullstolen ska alltid vara utrustad med tippskydd.


 » Ha alltid tippskydden utdragna vid tipprisk bakåt!

JUSTERING:




BROMSAR

Rullstolen kan vara utrustad med två olika bromstyper, färdbroms (a) för vårdaren samt däckbroms (b) för brukaren. De manövreras enligt pilarna.

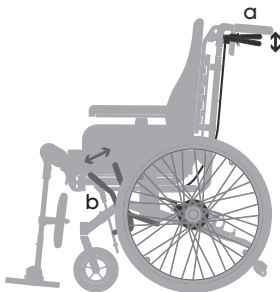

Parkeringsbroms manövreras enligt:
(Bromsa båda sidorna)

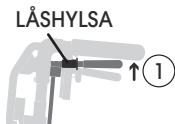

HJUL


TA LOSS HJUL:

- Tryck in låsknappen (e, sitter på undersidan för modell 16"), lyft rullstolen en aning och ta loss hjulet.

MONTERA HJULEN:

- För in hjulaxeln (c) i hylsan (d)
- Tryck in låsknappen (e) och tryck samtidigt in hjulet så de tre tapparna (f) passar i bromsskivans hål.
- Släpp låsknappen

 » Kontrollera att hjulet sitter fast!

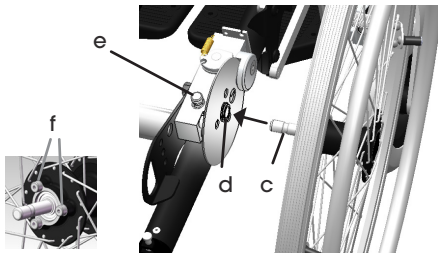

KÖRBYGEL


Höjden justeras i tre steg genom att trycka in det ena snäpplåset (g) och samtidigt föra körbygeln på samma sida uppåt eller nedåt. Håll körbygeln uppe/nere och tryck in det andra snäpplåset (h) så att justeringen kan slutföras. Se till att bromsvajrarna lätt glider med i rörelsen.

- » Kontrollera att båda snäpplåsen
 fjädrat ut i hålen och att bromsvajrarna löper fritt.




ARMSTÖD


BORTTAGNING / MONTERING:

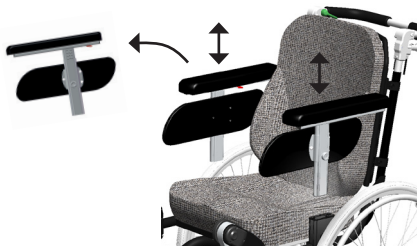

HÖJDINSTÄLLNING:

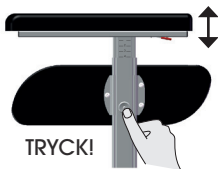


DJUPINSTÄLLNING:


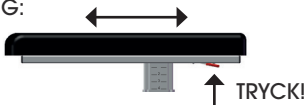


BENSTÖD

BORTTAGNING / MONTERING

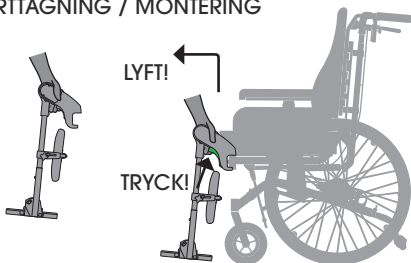

VINKLING & UTVRIDNING:

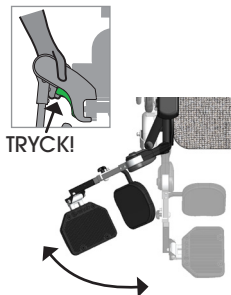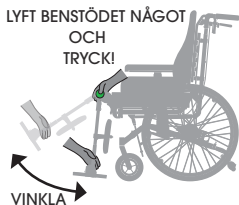

SKALOR & BRUKARKORT

Skalor och brukarkort (hänger på baksidan av ryggen) används för att brukarens sittställning ska bli i enlighet med förskrivarens rekommendationer.

SITSTILT:


Avläses i grader på etiketten som sitter på vänster sida av sitsramen.

RYGGVINKEL:

Avläses i grader på etiketten som sitter längst ner på vänster sida av ryggramen.

ARMSTÖD & BENSTÖD

Läget avläses på skalor enligt bilderna nedan:

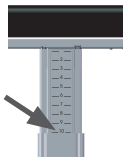

NAMN. Här står brukarens namn

The diagram shows a rectangular card template. At the top left is a stick figure icon. Below it are four icons: a chair with a curved arrow indicating backrest movement, a green double-headed arrow indicating arm movement, a chair with a vertical double-headed arrow indicating height adjustment, and a chair with a curved arrow indicating seat rotation. To the right of each of these four icons is a horizontal line for text entry. At the bottom left is the 'HDrehab' logo, and at the bottom right is an information icon (a book with an 'i').

RYGGVINKEL.
Här anges
rekommenderad
ryggvinkel.

TILTVINKEL.
Här anges
rekommenderad
tiltvinkel.

BENSTÖD. Här anges
rekommenderad
inställning för benstöden.

ARMSTÖDSHÖJD.
Här anges
rekommenderad
inställning för
armstödet.

BAKSIDA. På baksidan av kortet kan
övriga kommentarer lämnas.

TRANSPORT I FORDON

- Transportera med stolen i färdriktningen.
- Använd 4-punkts bandsystem för stolen och 3-punkts säkerhetsbälte för brukaren.
- Huvudstöd ska användas.
- Ta av alla tillbehör, ex: bord, bålstöd mm.
- OBS! Spänn inte fast stolen för hårt.




j. FRÄMRE FÄSTE

- Runt tvärröret.



i. BAKRE FÄSTE

- Genom öglan.


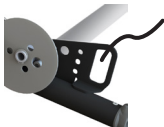


IHOPFÄLLNING AV RULLSTOLEN

- Tilta fram sitsen och ta av alla tillbehör, armstöden och dynorna.
- Håll i körbygeln och dra ut ryggfällnings-sprinten (k). Gasfjädern lossnar och ryggstödet kan fällas framåt.

ÅTERSTÄLLNING EFTER IHOPFÄLLNING

- Fäll upp ryggstödet och dra ut sprinten (k).
- Passa in sprinten genom gasfjädersnål (l) och helt genom fästets båda plåtar (m).

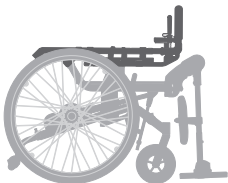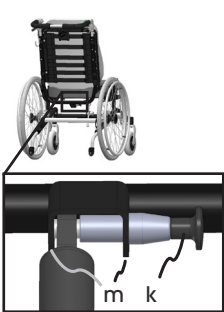

CHECKLISTA EFTER TRANSPORT:

- Kontrollera att ryggfällningssprinten (k) går helt igenom fästet (m).
- Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att tippskyddet är monterade och i rätt läge.
- Testa de viktigaste funktionerna; broms, ryggvinkling och sitstilt.



» Om sprinten inte är korrekt monterad kan fästet brytas sönder och brukaren tippas hastigt bakåt.

DOKUMENTINFORMATION:

ART. NR. : 95710 REVISION: C
PUBLICERINGSDATUM: 2017-02-21

TILLVERKARE:

HD Rehab
Tryffelsslingan 4
SE-181 57 LIDINGÖ

Telefon: 08 - 767 04 80

Fax: 08 - 767 50 00

www.hdrehab.se

info@hdrehab.se

**LÄS DEN KOMPLETTA BRUKSANVISNINGEN
(ART. NR. 95701) FÖR MER INFORMATION!**

DAGLIG FUNKTIONSKONTROLL:

För att säkerställa brukarens säkerhet bör en daglig funktionskontroll av de mest vitala delarna genomföras enligt nedan.

- » Testa bromsarna (både färdbrons och brukarbrons).
- » Kontrollera att sitstilt och ryggfällning fungerar.
- » Kontrollera att hjul och dynor sitter där de ska och är hela och rena.
- » Kontrollera att tippskyddet sitter i lämpligt läge.
- » Om stolen är utrustad med brukarkort så kontrollera att rullstolens inställningar överensstämmer med rekommendationerna på detta.