

Märkning

Dok. nr. 95964 Rev K 2025-09-29

Sida 1 (8)


Följande märkningar finns på HD Balance i standardutförande. Artikelnummer och storlek för varje etikett anges i Tabell 1 på sida 7.

OBS

* Stjärnmarkerade rubriker indikerar att denna/ dessa etiketter krävs för att rullstolens CE-märkning ska gälla. (För specialutföranden och tillbehör gäller detta bara om det aktuella utförandet/tillbehöret är monterat på rullstolen).

CE-MÄRKNING OCH IDENTIFIERING*

CE-etikett och ID-etikett ska sitta på framsidan av hjulramens främre tvärrör enligt Figur 1.

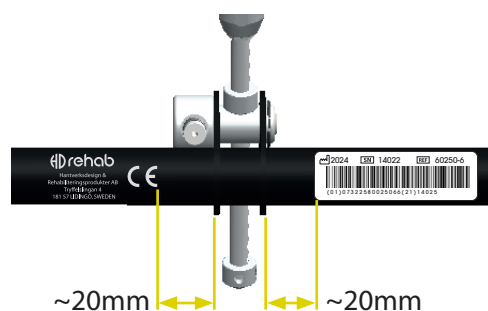


Figur 1

MODELLBETECKNING*

Modelletikett ska sitta på hjulramens bakre tvärrör enligt Figur 2.

HD balance	24	◀ 38 ▶
HD balance	24	◀ 42 ▶
HD balance	24	◀ 46 ▶
HD balance	24	◀ 50 ▶
HD balance	16	◀ 38 ▶
HD balance	16	◀ 42 ▶
HD balance	16	◀ 46 ▶
HD balance	16	◀ 50 ▶

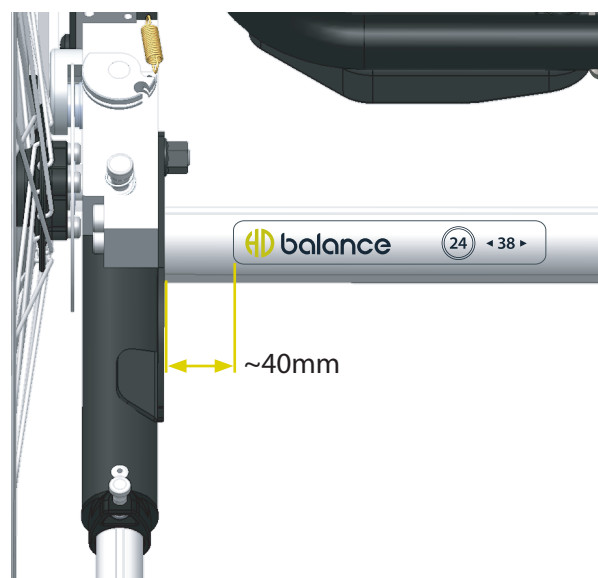

Figur 2

MAX BRUKARVIKT*


Brukarvikt-etikett ska sitta på sitsramens högra sidorör enligt Figur 3.



Figur 3

TRANSPORTFÄSTEN*

Fästpunkter är markerade på båda sidor av främre hjulram enligt Figur 4 och vid varje fäste bak enligt Figur 5.

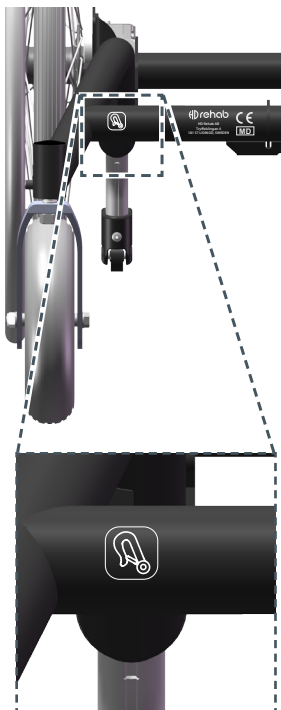

Figur 4




Figur 5

MARKERING AV PARKERINGSBROMS OCH TILTREGLAGE


Parkeringsbromsens etikett ska sitta på utsidan av båda bromshandtagen enligt Figur 6 och 7.

Ryggfällningsetikett ska sitta på ovansidan av vänster körhandtagsknuten enligt Figur 6.

Sitsiltsetikett ska sitta på ovansidan av höger körhandtagsknut enligt Figur 7.

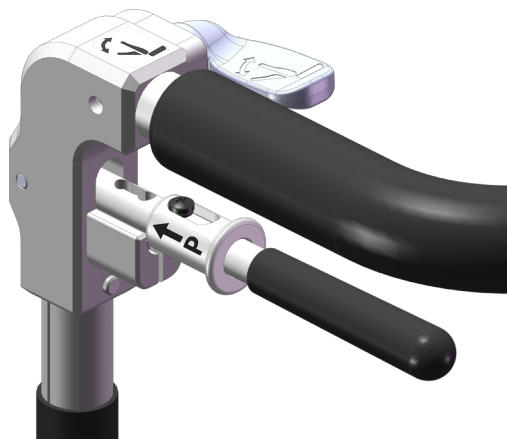

Figur 6

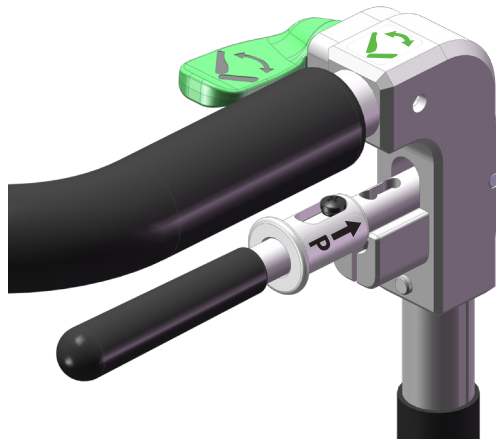

Figur 7

VARNINGSETIKETT TIPPSKYDD



Varningsetikett ska sitta på båda tippskydden enligt Figur 8.



Figur 8

SKALA FÖR ARMSTÖDSHÖJD


Etikett som indikerar armstödetets höjd ska sitta på båda armstöden enligt Figur 9.

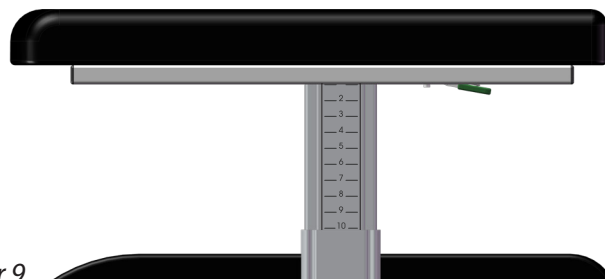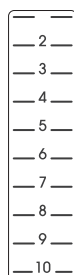

Figur 9

SKALA FÖR BENSTÖDSVINKEL


Etikett som indikerar benstödsinkel ska sitta på båda benstöden enligt Figur 10.

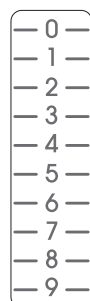

Figur 10

SKALOR FÖR SITSTILT


Etikett som indikerar sitstilt ska sitta på vänster ledplåtslåda med de svarta punkterna mitt för hållen i plåtladan enligt Figur 11.

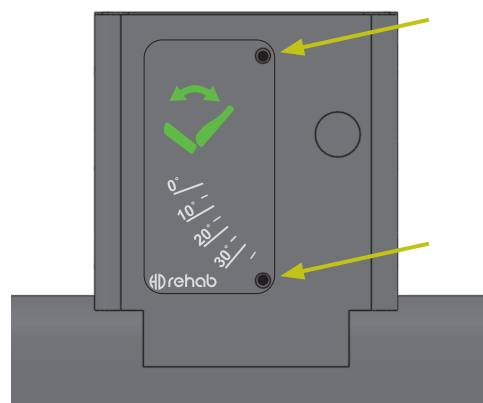

Figur 11

SKALA FÖR RYGGVINKEL


Etikett som indikerar ryggvinkel ska sitta på vänster sidan av ryggramen cirka 1 mm innanför plåtens kanter enligt Figur 12.

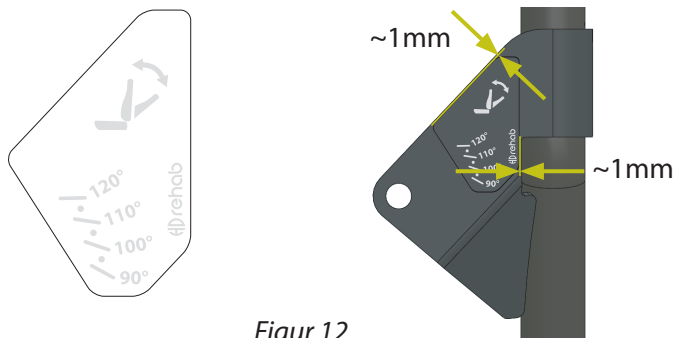

Figur 12

SKALA FÖR SITSDJUP

Etikett som indikerar sitsdjupet ska sitta på sittbrickans vänster skena enligt Figur 13.

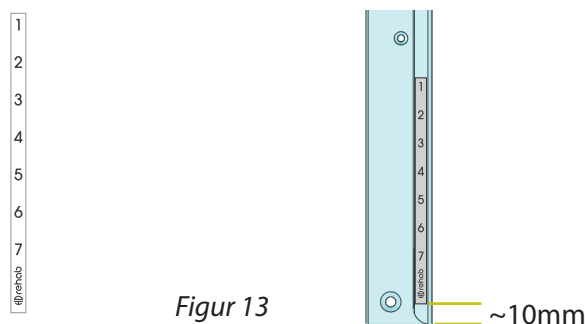


Figur 13

Märkningar vid specialutföranden och på vissa tillbehör

MÄRKNING AV TILTPLÅTAR I ALTERNATIVT UTFÖRANDE*


Varningsetikett (stor) ska sitta på utsidan av plåten enligt Figur 14.

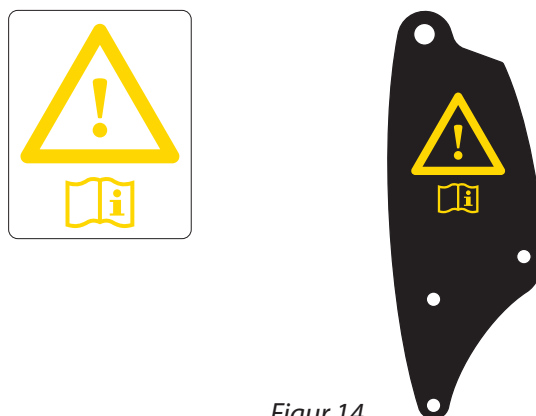

Figur 14

MÄRKNING AV UTÖKAD SITSTILT ELLER UTÖKAD RYGGFÄLLNING*

Varningsetikett (liten) sitta på ovansidan av respektive körhandtagsknutarna, framför tildetiketten, enligt Figur 15.

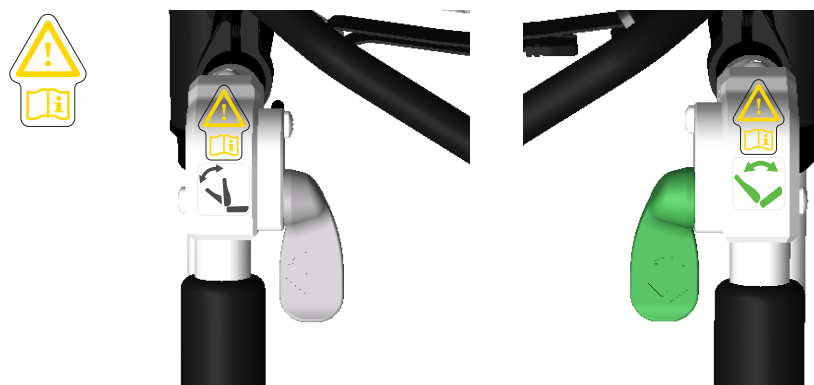

Figur 15

MÄRKNING AV FÖRSTÄRKTA RULLSTOLAR*

Varningsetikett (liten) ska sitta på en av förstärkningsplåtarna på hjulramen, enligt Figur 16.



Figur 16

MÄRKNING AV DROPSTÄLLNINGSFÄSTE*


Varningsetikett (stor) ska sitta på fästet enligt Figur 17.



Figur 17

MÄRKNING AV STÄLLDON FÖR SITSTILT*

Varningsetikett (liten) ska sitta på ställdon enligt Figur 18.

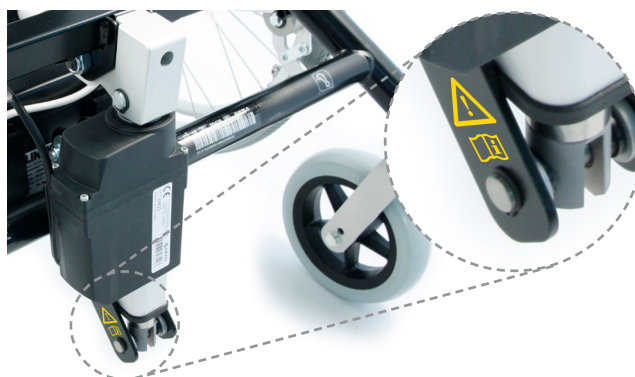

Figur 18

MÄRKNING AV STÄLLDON FÖR RYGGFÄLLNING*

Varningsetikett (liten) ska sitta på ställdon enligt Figur 19.



Figur 19

MÄRKNING AV FRIKOPPLINGSMEKANISM FÖR KNÅLED*


Etikett (vänster) ska sitta enligt Figur 20.
Observera att det finns även höger
utförande (på förfrågan).



Figur 20

MÄRKNING AV STÄLLRÖR BRÖSTSELE


Etikett som indikerar ställrörs
position ska sitta enligt Figur 21.
Observera att etiketten är den samma
som används för att indikerar
sitsdjup.

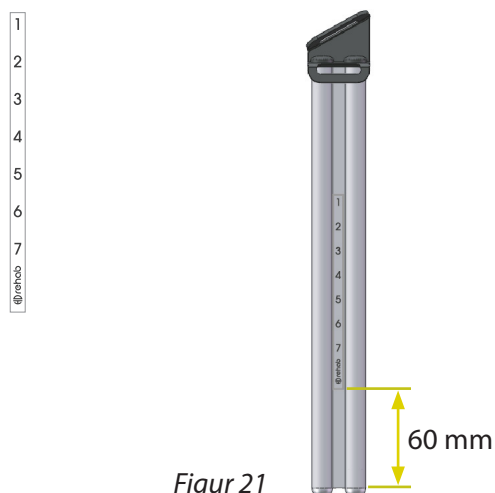

Figur 21

MÄRKNING AV HUVUDSTÖD OCH NACKSTÖD


Etikett ska sitta enligt Figur 22. Den
övre sidan av plåten har en böckad
kant vilken går att känna med
handen genom stoppningen.

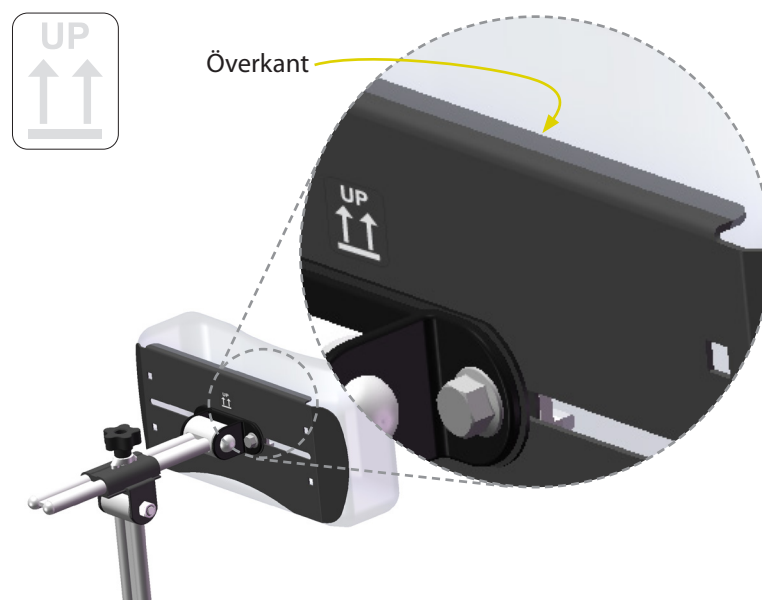

Figur 22

MÄRKNING AV RYGGDISTANSER*

Varningsetikett (liten) ska sitta på
varje ryggdistanser enligt Figur 23.

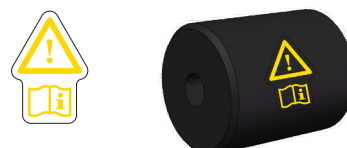



Figur 23

Artikelnummer och storlek

Tabell 1 - Artikelnummer och storlek för etiketter

Etikett	Art.nr	Beskrivning	Bredd (mm)	Höjd (mm)
	87218	CE-etikett	56	25
	87219	ID-etikett	80	24
	87230-1	Modelletikett 24-38	140	20
	87230-2	Modelletikett 24-42	140	20
	87230-3	Modelletikett 24-46	140	20
	87230-4	Modelletikett 24-50	140	20
	87231-1	Modelletikett 16-38	140	20
	87231-2	Modelletikett 16-42	140	20
	87231-3	Modelletikett 16-46	140	20
	87231-4	Modelletikett 16-50	140	20
	87206-4	Brukarvikt Max 135 kg	29	24
	87215-5	Transportfästen	20	20
	87216-5	Parkeringsbroms	7	18
	87227	Sitstilt	14	14
	87228	Ryggfällning	14	14
	87226	Varningsetikett tippskydd	60	10
	87211	Armstödsskala	24	95
	87212	Benstödsvinkelskala	15	55

Tabell 1 (Fortsätt)

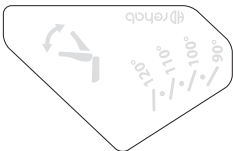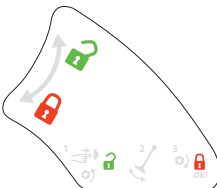Etikett	Art.nr	Beskrivning	Bredd (mm)	Höjd (mm)
	87214	Sitttiltskala	35	68
	87213	Ryggfällningsskala	36	56
	87210	Sittdjupskala / Bröstselefaste skala	6	120
	87224	Varningsetikett (stor)	40	50
	87224-5	Varningsetikett (liten)	13	20
	87225-1	Frikopplinsmekanism för knäled	86	74
	87223	Märkning av huvudstöd och nackstöd	14	18