

Vadband och Vadmatta HD Balance

Art nr: 63892-5, 63891-5 och 65891-5

Bruksanvisning / Monteringsanvisning


Sida 1 (1)

Ingående delar:

Vadband kpl, art nr: 63892-5




Vadmatta kpl, art nr: 63891-5, 65891-5

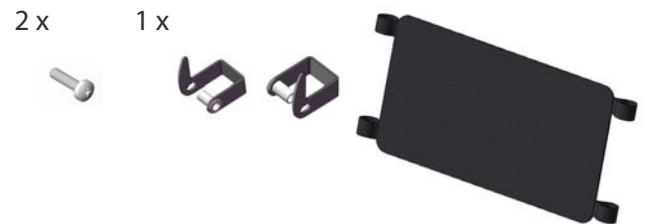

Montering

1

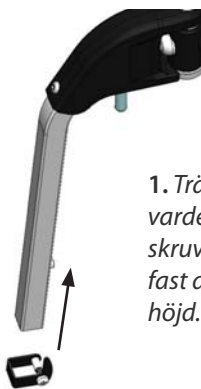

1. Trä på ett fäste på vardera benstöd med skruven utåt. Skruva fast dem på lämplig höjd.

2



2. Trä vadbandet eller vadmattans övre band runt benstödsrören ovanför fästena. Fäst banden på baksidan med hjälp av kardborrbanden. Vid montering av vadmattan ska även de nedre banden fästas runt rören.

3a



3b



3a-b. Klart! Justering av höjden kan göras genom att lossa lite på skruvarna och skjuta fästet längs med röret. Skruva sedan åt skruvarna.

Användning och skötselråd

Vadbandet och vadmattan tvättas enligt fastsydd anvisning. För övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.



- Vadbandet bör ej användas på vinkelställbara benstöd då detta kan innebära risk för skadligt tryck.