

Fäste bröstsele - HD Balance flexirygg

Art nr: 69720-1 och 69725-5

Bruksanvisning / Monteringsanvisning

Sida 1 (2)

Ingående delar:

Fäste bröstsele sats 2 st kpl: 69720-1




Bandfäste nedre, Fäste bröstsele: 69725-5



Montering


Montering av bröstselesfästet görs så här:

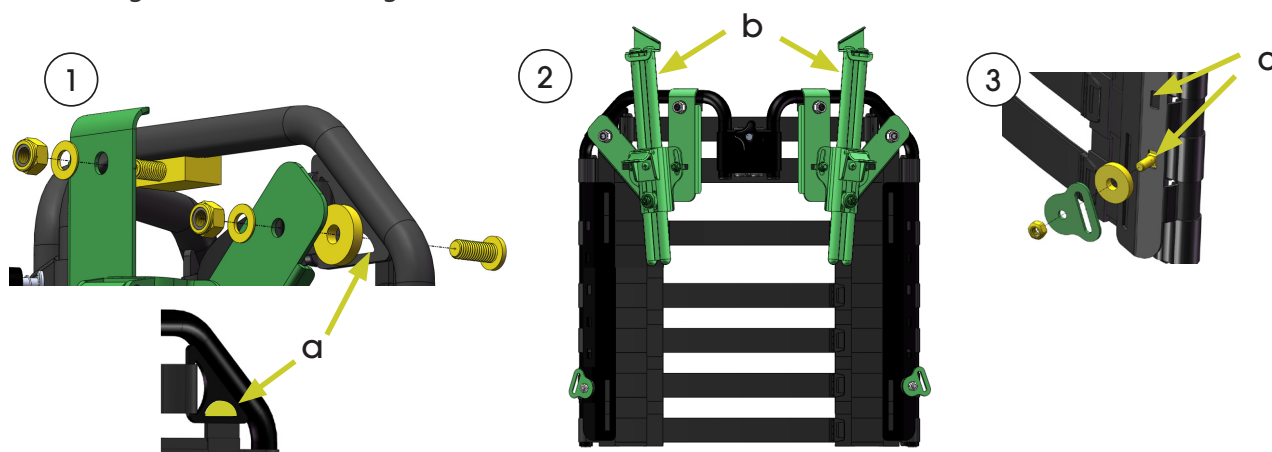

1. Montera fästplåtarna enligt bilden. Den yttre skruven ska monteras i hålet som är markerat med **a**. Obs! Om hållaren för brukarkort och kort bruksanvisning sitter i detta hål ska denna flyttas till en annan plats på stolen som anses lämplig. Dra åt muttrar så att plåten sitter stadigt.
2. Bilden visar hela bröstselesfästet monterat på en flexirygg. Montera ställrören (b) så att bandfästena lutar inåt.
3. Montera de nedre fästena i något av de rektangulära hålen (c) på vardera sida i flexiramen. På vilken höjd dessa ska fästas beror på brukare och typ av bröstsele.

Användning

Detta fäste är avsett att användas som fästpunkter för olika bröstselar och liknande produkter. Fästet passar till selar med en bandbredd på max 25 mm. Det är tillverkaren av bröstselen som ansvarar för att bröstselen är säkra att använda. Se bruksanvisning för respektive bröstsele för att se hur denna ska positioneras i förhållande till brukaren. Läs även "Tillåtna ändringar inom CE-märkning, HD Balance", art nr 95724.

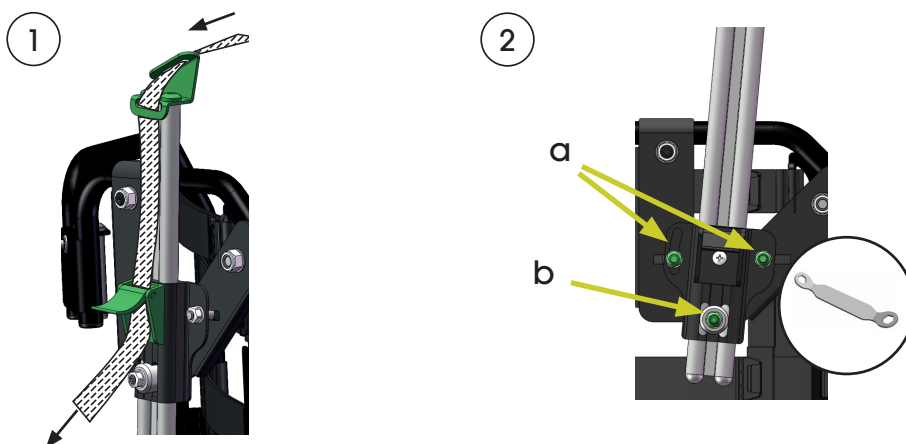

1. Bröstselsens övre band monteras enligt bild. Stäng spännet för att låsa bandet.
2. Önskad position för de övre bandens infästning uppnås genom att flytta ställrören i höjd- och sidled. Detta sker med hjälp av muttrarna markerade i bilden. Använd verktyget som följer med stolen. De två övre muttrarna (a) justerar sidledsförflyttningen och den nedre muttern (b) justerar höjden.



- Huvud-/nackstöd rekommenderas starkt om brukaren anses ha en risk att slå huvudet i ställrören. Var uppmärksam så att brukaren inte trycker undan huvudstödet då detta kan innebära en risk för brukaren.
- Var försiktig vid justering av höjden på ställrören då det finns en risk för klämning mellan ställröret och flexiramen.



Skötselråd

Bröstselesfästet kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. För övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.