

Polstring för hel fotplatta

Bruksanvisning / Monteringsanvisning

Sida 1 (1)

Ingående delar:

1 x



2 x



Montering

Placera kardborrbanden enligt följande bilder:

Placering på **HD Balance**

1



2a



1. Fäst det ena kardborrbandet längs med framkanten på fotplattans undersida.

2 a. (HD Balance) Fäst det andra kardborrbandet längst bak på fotplattans ovansida.


2 b. (HD500, HD600, HD650) Fäst det andra kardborrbandet 2 cm från fotplattans bakkant.

Placering på **HD500, HD600, HD650**

1



2 cm

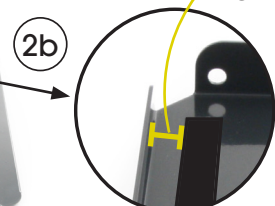

Placera polstringen enligt följande bilder:

3



4



5



3. Fäst vingen (A) på undersidan av fotplattan.

4. Fäst sedan polstringen mot kardborren på ovansidan av plattan.

5. Färdigt!

Användning och skötselråd

Polstringen kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. För övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.

Footplate pad - One piece

User manual / Assembly instructions

Page 1 (1)

Parts included:

1 x



2 x



Assembling

Attach the velcro strips according to the following pictures:

Positioning on **HD Balance**



1. On the underside of the footplate: Attach one of the velcro strips along the front edge.

2 a. (HD Balance) On the top of the footplate: Attach the other velcro strip at the rear edge according to the picture.

2 b. (HD500, HD600, HD650) On the top of the footplate: Attach the other velcro strip 2 cm from the rear edge according to the picture.

Positioning on **HD500, HD600, HD650**



Attach the pad according to the following pictures:



3. Attach the wing (A) on the underside of the footplate.

4. Then fasten the pad on the top of the plate.

5. Finished!

Use and Care instructions

The pad can be cleaned by wiping with soap and water. For further information, see the Maintenance Instructions, art. no. 95730-1.