

Fäste bröstsele - HD Balance planrygg

Bruksanvisning / Monteringsanvisning

Sida 1 (2)

Art nr: 69730-1 och 69725-5

Ingående delar:

Fäste bröstsele sats 2 st kpl: 69730-1

1 x



6 x



Bandfäste nedre, Fäste bröstsele: 69725-5

2 x




Montering

Montering av bröstselesfästet görs så här:


1




2

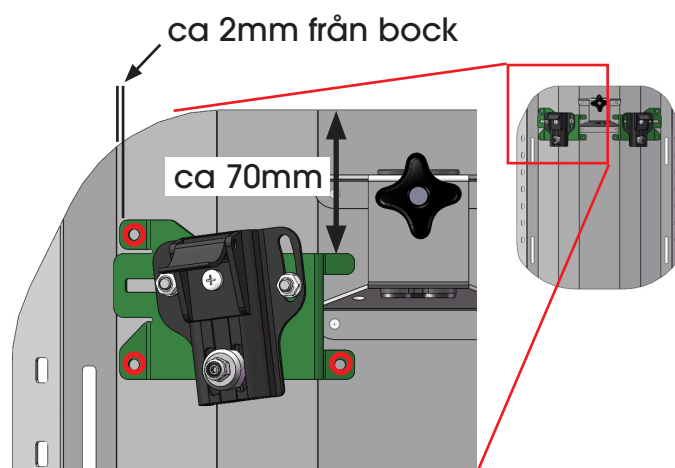


3

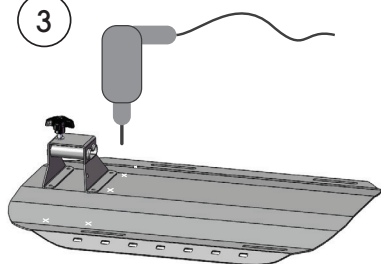

5

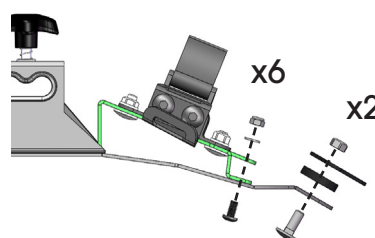


6

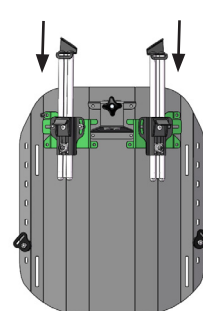

1. Ta bort ryggdynan och demontera planryggen från rullstolen genom att lossa de fyra muttrarna (a) och lyfta av ryggplattan.
2. Positionera bröstselefästet enligt bilden och markera fästets hålbild på ryggplåten (De tre rödmarkerade hålen). Utgå alltid från ytterkanten och placera fästet ca 2mm från plåtens bökning enligt bild. Andra änden av fästet hamnar olika långt från huvudstödsfästet beroende på vilken ryggbredd man har.
3. Gör likadant med andra sidans fäste.
4. Borra därefter hål med 6mm borr. Var noggrann så hålen hamnar rätt.
5. Montera fästena med de medföljande skruvarna. De nedre fästena (69725-5) placeras i valfritt hål längs sidorna.
6. Trä i ställrörsenheterna i fästena. Färdigt!

Användning

Detta fäste är avsett att användas som fästpunkter för olika bröstselar och liknande produkter. Fästet passar till selar med en bandbredd på max 25 mm. Det är tillverkaren av bröstselen som ansvarar för att bröstselen är säker att använda. Se bruksanvisning för respektive bröstsele för att se hur denna ska positioneras i förhållande till brukaren. Läs även "Tillåtna ändringar inom CE-märkning, HD Balance", art nr 95724.

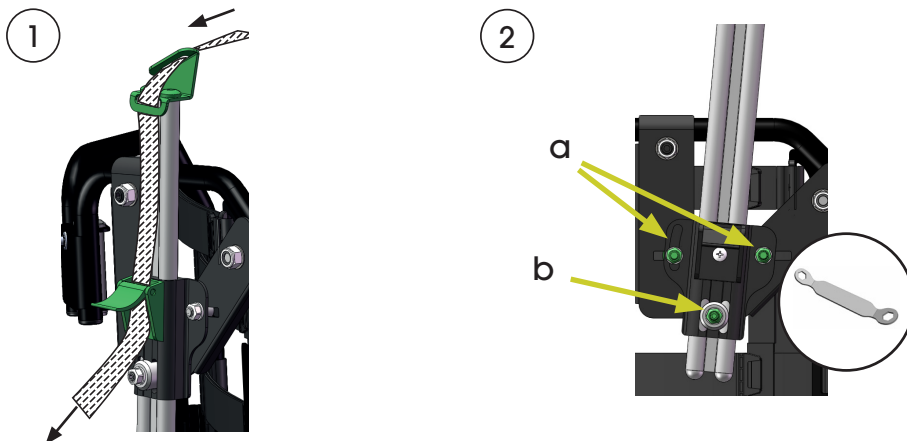

(På bilderna sitter fästet på en flexirygg men handhavandet är detsamma även för planrygg)

1. Bröstselens övre band monteras enligt bild. Stäng spännet för att låsa bandet.
2. Önskad position för de övre bandens infästning uppnås genom att flytta ställrören i höjd- och sidled. Detta sker med hjälp av muttrarna markerade i bilden. Använd verktyget som följer med stolen. De två övre muttrarna (a) justerar sidledsförflyttningen och den nedre muttern (b) justerar höjden.



- Huvud-/nackstöd rekommenderas starkt om brukaren anses ha en risk att slå huvudet i ställrören. Var uppmärksam så att brukaren inte trycker undan huvudstödet då detta kan innebära en risk för brukaren.
- Var försiktig vid justering av höjden på ställrören då det finns en risk för klämning mellan ställröret och ryggplattan.



Skötselråd

Bröstselesfästet kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. För övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.