

Avsedd användning

Ryggspärr används för att låsa ryggvinklingen i ett bestämt läge.

Ingående delar

1 x vajerreglage komplett,
med låsning




1 x skruv M6x22



Montering

OBS: Denna montering kräver teknisk kompetens.

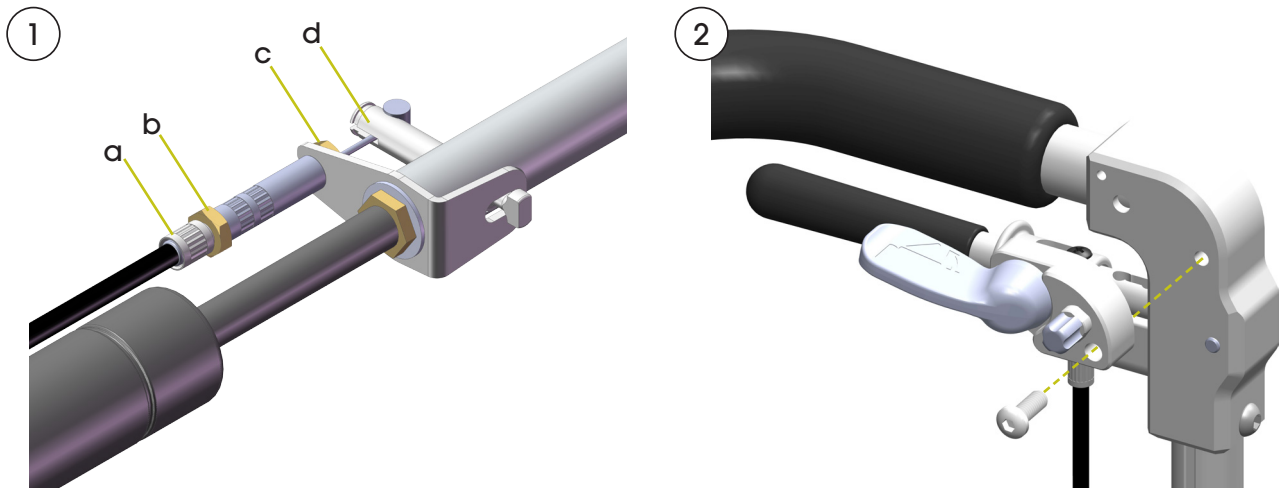


- ① Lossa muttern (b) och skruva in hylsan (a) helt så att vjern blir så slapp som möjligt. Lossa muttern (c) helt och trä ur hylsan ur plåten samt ändnippeln ur tappnen (d). Lossa de klamrar som håller vjern utmed ryggramen.
- ② Lossa skruven och ta bort reglaget från körbygeln. Montera nytt vajerreglage och skruv på körbygeln.
- ③ Anslut vajer enligt ① (omvänd ordning).
- ④ Justera vjern enligt följande:
Lossa muttern (b i bild ①) och skruva in hylsan (a) helt så att vjern blir så slapp som möjligt. Notera att det då finns ett spel i reglaget som gör att den första delen av rörelsen sker utan att vjern påverkas alls.
Skruva ut hylsan (a) så att detta glapp försvinner nästan helt och lås med muttern (b).
- ⑤ Testa att ryggfällningen fungerar bra och kontrollera att vjern inte är spänd vid låst läge. Tappnen (d) måste gå helt tillbaka i sitt spår när reglagespaken släpps.

Användning

Ställ in önskad ryggvinkling med reglaget. Lås därefter positionen genom att skruva åt låsskruven.

Om ändring av ryggvinkeln önskas, skruva ut låsskruven. Ställ in ny position med reglaget och skruva därefter in låsskruven.

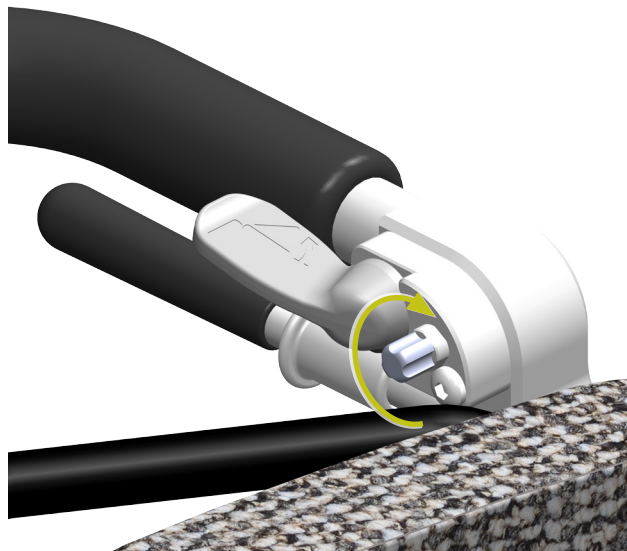

Skötselråd

Byt alltid ut skadade delar omedelbart. För övrig information se *Underhållsanvisning*, dok. nr. 95730.