

Positioneringsbälten 2-punkt och 4-punkt

Art.nr: 13541 och 13542

Bruksanvisning

Sida 1 (1)

Viktig säkerhetsinformation från tillverkaren John GmbH

Våra bältesystem, inklusive spännen, är endast avsedda för positionering av brukare i rullstol. De kan användas även då brukaren sitter i ett sittskal. Bältesystemen får inte användas som säkerhetsbälte eller för att späna fast rullstolen i ett fordon.

Innan bältet börjar användas måste kunden utföra ett funktionstest.

John GmbH tar inget ansvar för följdskador.

Ytterligare säkerhetsinformation från HD Rehab

- Det är viktigt att fästena placeras på rätt ställen så att brukarens position blir bra. Låt alltid behörig personal montera dessa.
- Speciella restriktioner för användande av bälte kan finnas.
- Individuellt anpassad information för användande av bälte måste fås från förskrivaren i varje enskilt fall.
- Var uppmärksam vid användning av positioneringsbälte. Risk finns att brukaren glider ner i stolen och fastnar i bältet om det är felmonterat eller dåligt åtdraget. Detta kan medföra nedsatt blod/syretillförsel och risk för kvävning för brukaren.
- Kontrollera alltid att bältet är låst ordentligt vid användning.
- Spänn om möjligt bältet med brukaren i upprätt position. Om bältet spänns i nedvinklad ryggsposition finns risk för klämning vid uppvingling.
- Var uppmärksam på lösa bälten, de kan fastna i hjulen och orsaka hastigt stopp eller klämning.