

ALLMÄN INFORMATION

Respine är en CE-märkt medicinteknisk produkt av klass 1.

Avsedd användning



Respine är ett sittstöd som är avsett att användas av personer med nackskada. Respine ska användas i situationer som kräver sittande under långa stunder i miljöer där speciellt anpassade sittmöbler inte finns. Produkten ska underlätta och lindra de symptom som kan uppstå vid sittande för personer med nackskada.

Respine är portabel och avsedd att användas (främst vid passivt sittande) i olika inomhusmiljöer t.ex. på stolar i mötessalar, bio- och teatersalonger och på stolar vid matbord i hemmiljöer. Produkten är inte avsedd att användas i fordon eller i andra transportmedel.

Leveranskontroll

- Kontrollera att produkten inte har några synliga skador.
- Eventuell transportskada ska snarast anmälas till transportbolaget.

Ingående komponenter i produktförpackningen

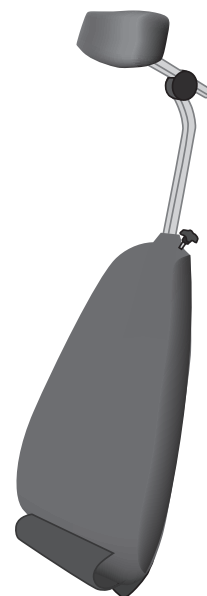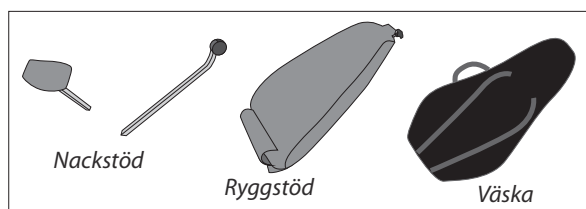

Vikt: 850 g

Mått hopfäld: 8 x 28 x 51 cm

Allmänna säkerhetsaspekter


Innan du börjar använda Respine är det viktigt att du läser igenom hela bruksanvisningen.

- Kontrollera alltid innan du använder Respine att den står stadigt och rakt lutad mot stolens ryggstöd. Respine passar inte på alla sittmöbler. Till exempel kan den fungera sämre på mjuka eller instabila möbler. Var alltid uppmärksam och försiktig när du sätter dig så att Respine inte välter.
- En upprätt sittställning är den skonsammaste för rygg och nacke, men ännu viktigare är att sitta varierat. Byt sittställning ofta. Var uppmärksam på att inte sitta på ett sätt som gör att du behöver spänna dig. Sitt bekvämt. Om du upplever att symtomen från din nackskada blir sämre i samband med användandet ska du sluta använda Respine och rådfråga en sjukgymnast eller motsvarande.
- Respine är gjord för att vara lätt och smidig och tål därför ingen hårdhänt hantering. Hantera den varsamt både vid sittande, transport och vid justering av de olika funktionerna.
- Var uppmärksam på risken för trycksår som kan uppstå om du sitter alltför länge utan att byta ställning. Om du har nedsatt känsel bör du vara extra uppmärksam när du använder Respine då risken finns att du inte märker om du börjar få trycksår.
- Om produkten är trasig eller sliten (t.ex. nedsuttna dynor) ska detta åtgärdas. Beroende på skadans omfattning bör produkten tas ur bruk tills reparation har utförts eller slitna delar har bytts ut.


Varningar

Utöver dessa "allmänna säkerhetsaspekter" finns ytterligare situationer du bör vara uppmärksam på. Se bilderna nedan. Även under andra avsnitt i bruksanvisningen finns det fler varningar. Läs dessa noga. De är markerade med denna symbol: 


Var uppmärksam på följande situationer:

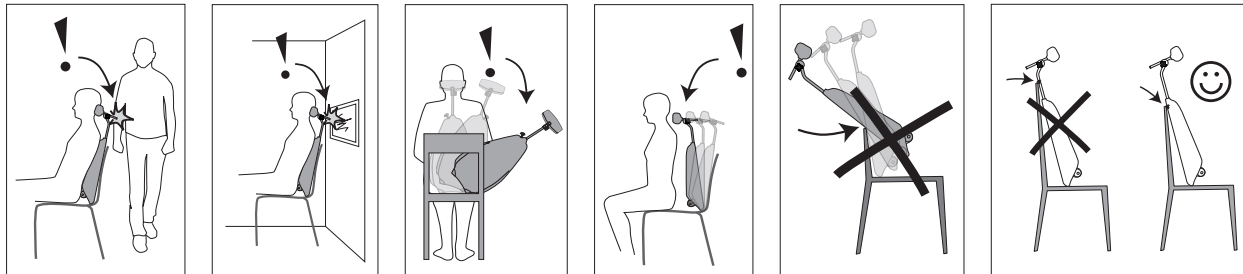


Låt inte röret luta mot stolsryggen

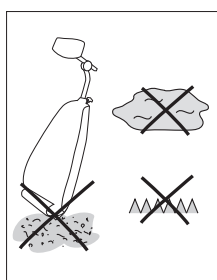

Använd ej på grova och smutsiga underlag.

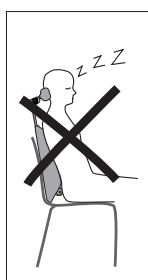

Använd inte Respine i fordon.

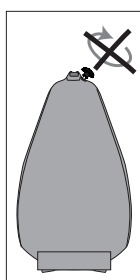


Skruva inte åt denna ratt om nackstödet inte sitter i ryggstödet. Detta kan skada ingången för nackstödet.

IDENTIFIERING AV PRODUKTEN / MÄRKNINGAR



Denna etikett visar att Respine är en CE-märkt medicinteknisk produkt och vem som är ansvarig tillverkare. REF står för artikelnummer.

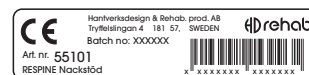


Ansvarig tillverkare och batchnummer (tillverkningsdatum: ÅÅMMDD) finns angivet på insidan av ryggstödet.



Tvättråd





= Centrifugeras ej

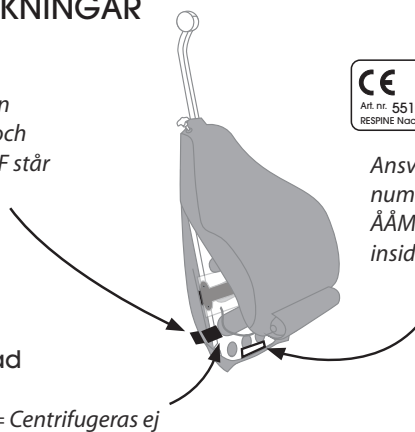


ANVÄNDNING

Montering

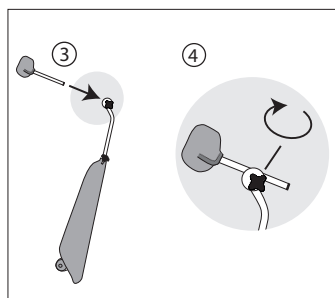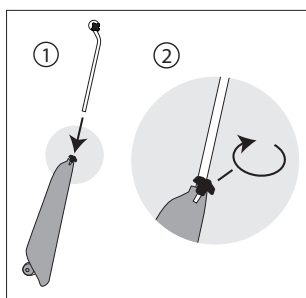


Ratten, figur 4, kan monteras höger eller vänster.

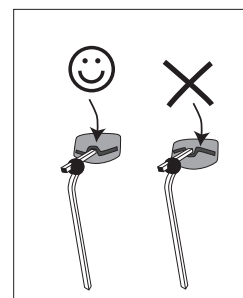


Montera nackkudden så att den breda tygbiten är uppåt.

Användning på sittmöbler

Lutning mot ryggstöd

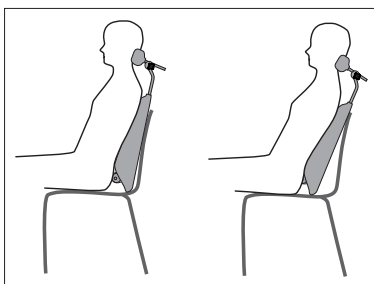


Med Respine kan du sitta både upprätt och i en något bakåtlutad position.

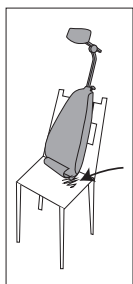


Var försiktig med känsliga möbler.

Justering

Justering av svankstödet höjd

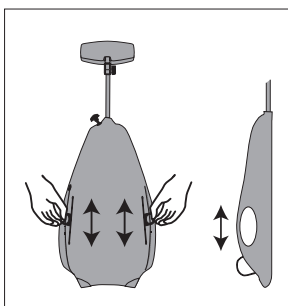


Justering av svankstödet djup

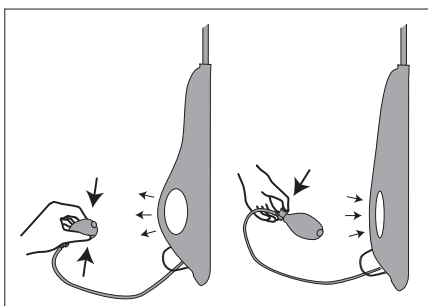


Om det går trögt när du pumpar kan det vara så att slangen ligger vikt. Dra i slangen för att släta ut eventuella veck. Om detta inte hjälper beror trögheten troligtvis på att luftkudden börjar bli full. Sluta alltid pumpa om kudden börjar bli full.

Justering av nackstödet djup

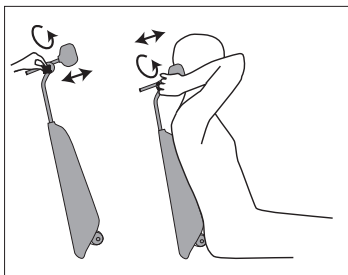


Skruva inte åt någon av rattarna hårdare än nödvändigt.

Justering av nackstödet höjd


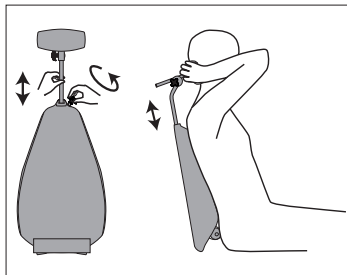


Du kan välja att skruva åt ratten just så hårt att nackstödet höjd går att justera medan du sitter.

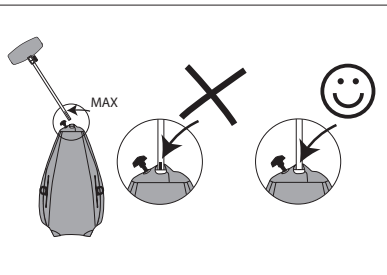


Röret får inte ställas in så högt så att den röda markeringen enligt bilden ovan syns. Detta är på grund av risk för deformation.

Justering av nackstödet vinkling

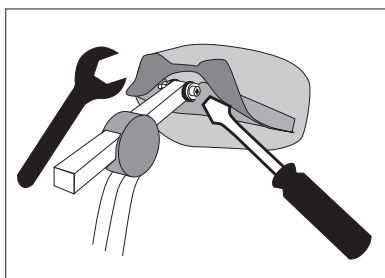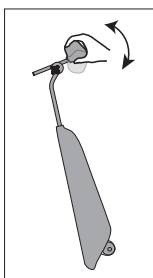

Trögheten på vinklingen kan justeras vid behov.

Borttagning av plastskiva

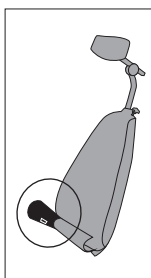


Denna plastskiva går att ta bort vid behov.

Förvaring och transport

Undvik smutsiga och fuktiga miljöer. Förvara Respine torrt. Om produkten ska skickas ska den packas väl, helst i originalförpackning.

Om produkten har blivit kall under transport ska den uppnå normal rumstemperatur innan den används.


Förvaring i medföljande väska

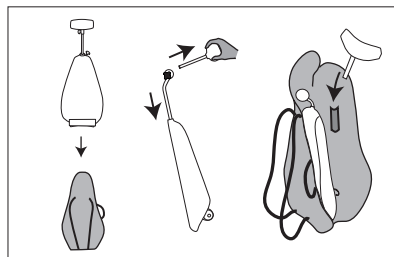

UNDERHÅLL


Respine bör rengöras vid behov. Hårda delar kan tvättas/torkas med vanligt rengöringsmedel. Undvik starka rengöringsmedel då dessa kan skada produkten. Klädseln ska i första hand torkas av med möbeltvätt. Klädseln kan även vattentvättas. Tvättråd hittas innanför blixtlåset. Respines klädsel ska tvättas för hand och får EJ centrifugeras. Respine bör rengöras vid eventuellt byte av användare.

Avtagning av klädsel inför tvätt

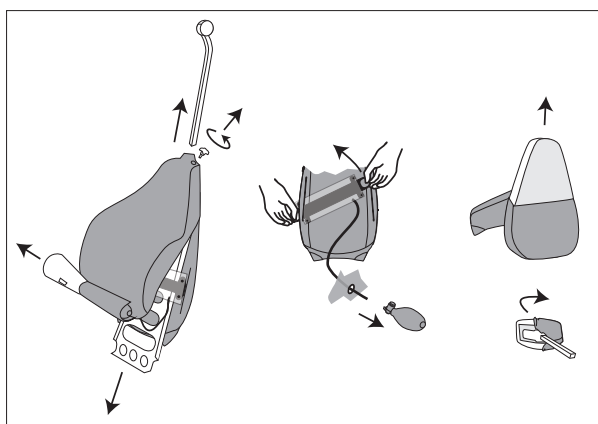

Lossa klädseln från alla ingående delar. Om pumpen är svår att lossa kan slangen skäras av intill pumpen.

Montering av kuddfodral efter tvätt

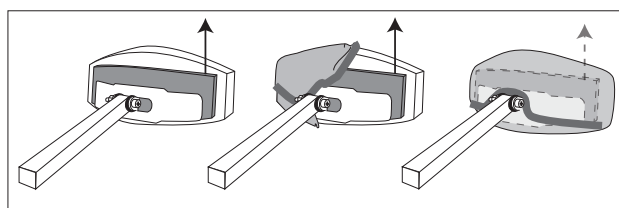

Låt den breda kanten av den hårda skumplasten peka uppåt när du trär på fodralet åt det håll som bilden visar.

ÅTERVINNING

Klädsel, skumplast och pump sorteras som brännbart material. Resterande komponenter sorteras som metallsrot.

GARANTI OCH BERÄKNAD LIVSLÄNGD

Garantin gäller i 2 år. Tillverkaren är enbart ansvarig för driftsäkerheten och prestandan på produkten om den används till det ändamål den är avsedd för och enligt föreskriften som beskrivs i bruksanvisningen. Om ovanstående inte följs noggrant anses garantin inte giltig. Respines bedömda livslängd är 4 år vid normal användning. Detta är under förutsättning att produkten sköts och underhålls i enlighet med anvisningarna.

Tillverkare:

Hantverksdesign & Rehabiliteringsprodukter AB
Tryffelsslingan 4
SE-181 57 LIDINGÖ
SWEDEN
www.hdrehab.se
info@hdrehab.se



DOKUMENTINFORMATION:

ART. NR. : 95901
REVISION: B
PUBLICERINGSDATUM: 2011-10-20