

Positioneringsbälte finns med två infästningspunkter, så kallade 2-punktsbälte (A) och med fyra infästningspunkter så kallade 4-punktsbälte (B). Bältet är enkelt reglerbart i längd med två åtdragsremmar som dras åt från mitten. Ett fixspänne, som har knappar i sidan, används för att låsa bältet. Bältet är polstrat för maximal avlastning mot brukarens lår.



### 2-punktsbälte

2-punktsbältet är standardvalet när brukaren har behov av stöd och fixering av bäckenet, men sitter relativt stilla i rullstolen. Bältet fästs i rullstolens sitsram med hjälp av bältesfästen, antingen med en främre placering eller en bakre placering.


### 4-punktsbälte

4-punktsbältet används när brukaren har behov av stöd och optimal fixering av bäckenet. Detta kan behövas i de fall där brukaren är mycket rörlig och/eller glider fram i rullstolen. Bältet fästs i rullstolens sitsram med hjälp av två bältesfästen på varje sida, en främre och en bakre placering.

### Mått

Tabell 1 - Mått [cm]

Storlek	Bandlängd <i>a</i>	Kuddlängd <i>b</i>	Kuddbredd <i>c</i>
XS	70	16	5,5
M	85	18	7

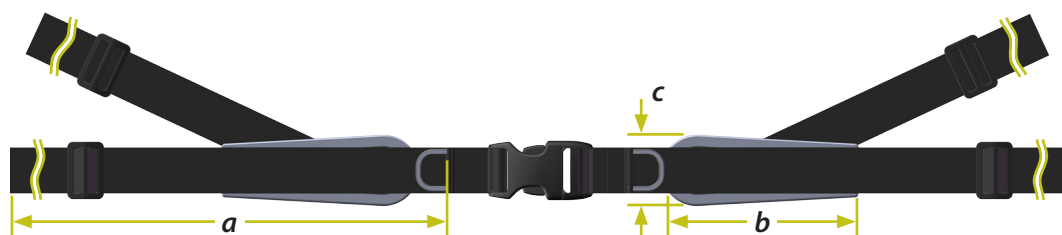

## Tänk på

- Bältet är ett positioneringsbälte och skall inte förväxlas med ett säkerhetsbälte för biltransporter.
- Speciella restriktioner för användande av bälte kan finnas. För mer information kontakta socialstyrelsen, [www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se).
- Riskbedömning av bältesanvändning i enskilda brukares fall skall alltid göras av förskrivare.
- Var uppmärksam vid användning av positioneringsbältet. Risk finns att användaren glider ner i rullstolen och fastnar i bältet om det är felmonterat eller dåligt åtdraget. Detta kan medföra nedsatt blod-/syretillförsel och risk för kvävning av användaren. Kontrollera att bältet alltid är låst vid användning.
- Spänn om möjligt bältet med användaren i upprätt position. Om bältet spänns i nedvinklad ryggsposition finns risk för klämning vid uppvinkling.
- Var uppmärksam på lösa bälten, de kan fastna i hjulen och orsaka hastigt stopp eller klämning.

## Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguider till HD Balance och HD Motion, dokument nummer 95750 respektive 96750. Bälten och bältesfästen beställs separat.

Läs även *Förteckning över kombinationsavtal*, dokument nummer 95232.