


Det finns tre typer av benstöd; Benstöd vinkelställbart (A), Benstöd fast (B) och Amputationsbenstöd (C). De två förstnämnda finns i tre olika längder och kompletteras med önskat vadvstöd (infoblad 95934) och/eller önskat fotstöd (infoblad 95935).




Vinkelställbara benstöd

Vinkelställbara benstöd används då brukaren har ett behov av lägesförändring av benen, t.ex. vid vila eller aktivitet. De kan vinklas mellan 90° och 180° (10 lägen) (D). En numrerad skala (E) underlättar rätt vinkelinställning av benstöden. Alla lägen kan användas utan konflikt med länkhjulen när rullstolen är i standardutförande.

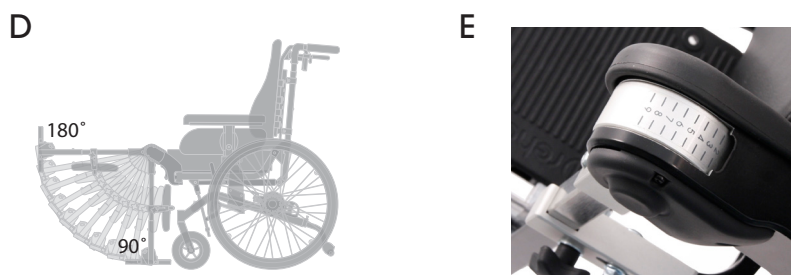

Benstödet kan tas av/på genom att det först vinklas ut och sedan lyfts av/sätts på. (F). Det kan även tas av utan att vinklas ut, dvs. det lyfts i stället av/sätts på i sidled bakom brukarens vad (G). Detta gör att brukaren inte behöver rätta ut sitt knä, en fördel vid knäkontraktur eller sträckspasticitet.

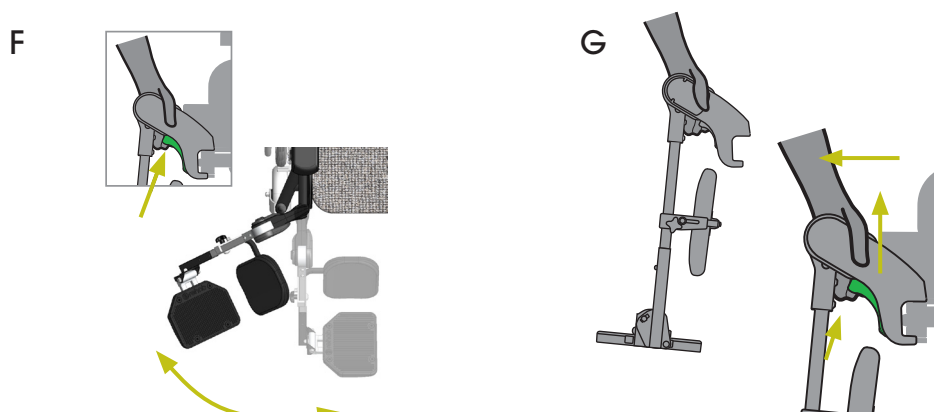

Vinkelfasta benstöd

Benstöd med fast vinkel, 90° (H) eller 105° (I), används då det inte finns behov av att vinkelreglera benstöden, t.ex. vid inskränkt rörlighet i knäleden. Benstöd med fast vinkel 90° kan även användas för att kontrollera sträckspasticitet och/eller uppnå ett mer aktivt sittande hos brukaren. Båda kan användas utan konflikt med länkhjulen när rullstolen är i standardutförande. Vid behov kan benstöd med andra önskade vinklar specialtillverkas. Benstöd med fast vinkel tas av och sätts på på samma sätt som Benstöd vinkelställbart, men med ett annat reglage för frikoppling.



Amputationsbenstöd

Amputationsbenstödet är vinkelställbart i knäleden på samma sätt som vinkelställbart benstöd. Det består av delarna benstödsrör (J), stödplatta (K) och fäste (L). Amputationsbenstödet kan regleras i vinkel mellan 140° och 180° (5 lägen) (M). Det kan även regleras i längd (N) och djup (O) enligt bild. Från och med våren 2015, är stödplattan även steglöst ställbar i sidled 4,5 cm (P). Amputationsbenstödet monteras och tas bort på samma sätt som övriga benstöd men med en utdragbar knapp för frikoppling.



Mått benstöd

För att uppnå de funktionella måtten i tabellerna nedan kombineras olika längder på benstödsrör med olika längder på fotplattshållare. Se Infoblad Fotstöd (art. nr. 95935). I vissa fall begränsar användning av vadplattor den funktionella längden. Detta anges i tabellerna.

a = Benstödsrörets längd, dvs hela det fyrkantiga röret

b = Funktionell längd = sittplattans överdel till fotplattans trampyta med benstödet i 90 graders vinkel


Måtten är angivna i cm.

Tabell 1 - Mått vinkelställbara benstöd

Modell	a	b min	b max
Standard	38	29	43
Kort ¹	30	19 ² , 21	27
Långt	46	37	51

¹ Kort fotplattshållare används.

² Utan vadplattor

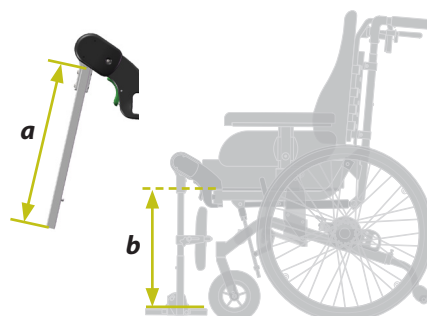


Tabell 2 - Mått fasta benstöd

Modell	a	b min ¹	b max
Standard	31	29 ³ , 31	43
Kort ²	23	21 ³ , 23	27
Långt	39	37	51

¹ Den funktionella längden (**b**) är mätt på vinkelfast benstöd 90°. För 105° gäller samma funktionella längd förutom med kort benstöd vilket ger **b min** = 19 cm utan vadvplattor.

² Kort fotplattshållare används.

³ Utan vadvplattor

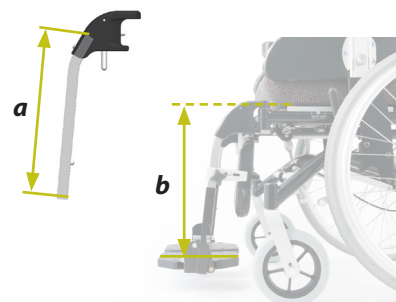

Mått amputationsbenstöd

Det maximala avståndet mellan sittdynans framkant och amputationsbenstödet beror på sittdjupet. Vid sittdjup i läge 1 är det maximala avståndet 14 cm och vid sittdjup i läge 7 är motsvarande avstånd 5 cm.

Tabell 3 - Mått amputationsbenstöd

Modell	a [cm]
sb 38	14
sb 42	16
sb 46-50	18



Klädsel

Amputationsbenstödet är klätt med vinylmaterialet Soft som är avtorkbart.

Tänk på

- Benstöd finns även i kort och lång modell (gäller ej amputationsbenstöd).
- Benstöd, lång modell, kräver förhöjd sitthöjd om benstödet 90-gradersläge ska kunna användas med rullstolens tilt i planläge (0°).
- Vid vinkling av amputationsbenstödet finns en viss klämrisk för handen.
- Om brukaren är benamputerad finns en ökad tipprisk bakåt. Tippskydd ska användas.
- Benstöd med helt fotstöd och helt vadvstöd ökar benstödens stabilitet/hållbarhet och bör användas till brukare med till exempel kraftiga tonusväxlingar/spasticitet. Använd gärna vinkelfasta benstöd för maximal hållbarhet.

Möjlig funktion - Frikopplingsreglage knäled

Denna knäled (Q) kan spärras i upplåst läge. Detta gör det möjligt att vinkelreglera benstöden från en sida när en hel fotplatta eller fotlåda används. Vinkelregleringen kan då utföras av endast en vårdare.



Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.