



Det finns tre alternativa fotstöd, Fotstöd delat (A), Fotstöd helt (B) och Fotlåda (C).

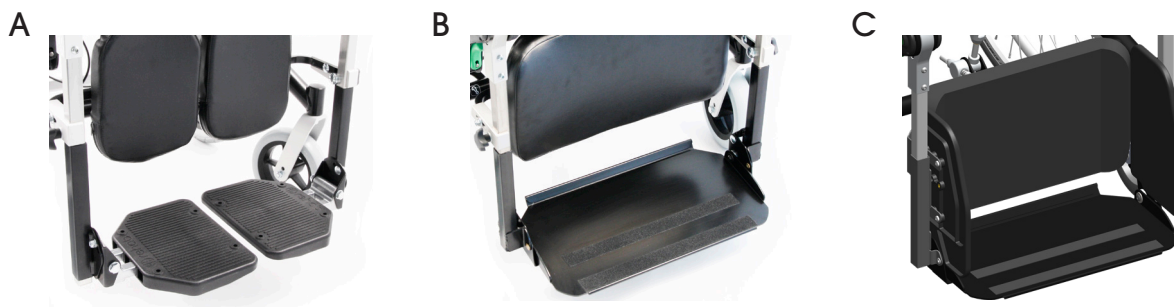

Justering höjd/vinkel

Fotstöden höjs och sänks stegvis med snäpplås (D). Fotstödsvinkel justeras nedåt med medföljande verktyg (E). Dessa inställningar kan göras på alla tre fotstödsvarianterna.

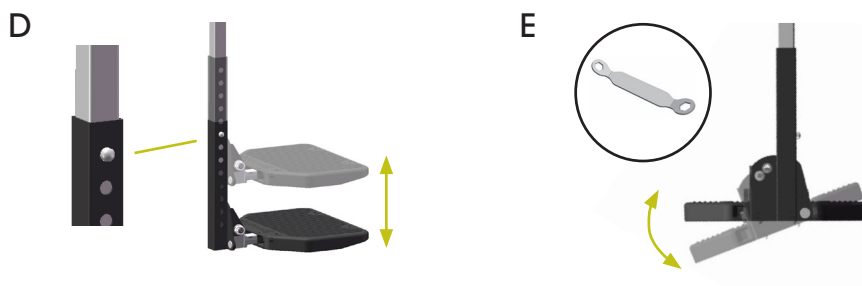

Fotstöd delat

Delade fotstöd ingår som standard till HD Balance, om inget annat val gjorts. De används även när det finns behov av separat inställning av benstödsvinkel och/eller fotstödshöjd. Fotstöden består av fotplatta (F) och fotplattshållare (G). Observera att fotplattan finns i två storlekar, en storlek till sittbredd 38 och 42 samt en storlek till sittbredd 46 och 50. Fotplattorna sidosjusteras för att passa respektive sittbredd (H).


De separata fotplattorna är uppfällbara åt sidorna, vilket underlättar vid stående förflyttning.

Fotplattorna kan justeras i djup genom montering i tre lägen, standard, främre och bakre position (I).




Fotstöd helt

Fotstöd helt finns som alternativ om brukaren har ett behov av en hel understödsyta för fötterna. Den är uppfällbar bakåt/uppåt, vilket underlättar i- och urstigning. Fotstöd helt består av en hel fotplatta (J) och fotplattshållare (K).

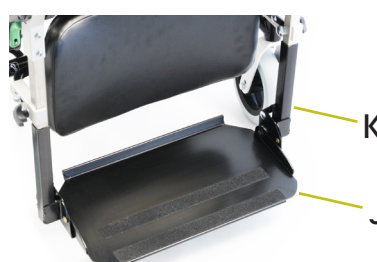




Fotlåda

Fotlåda används till brukare som behöver skydd vid ofrivilliga fot- och benrörelser. Fotlådan består av en hel fotplatta (L), fotplattshållare (M), fotlådesidor (N) och vadplatta (O). Vadplattan är klädd med vinylmaterialet som är avtorkbart. Fotlådans sidor är gjorda av slitstark ABS plast.

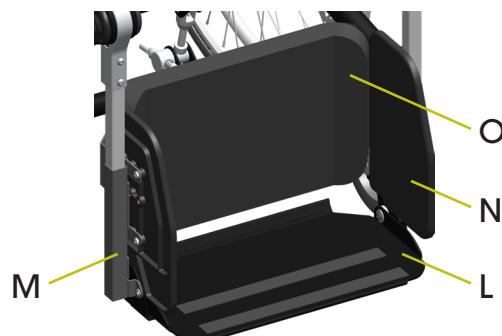

Fotplattshållare

Samtliga fotstöd finns med standard (P) eller kort fotplattshållare (Q). Hos brukare med behov av kortare benstöd används kort benstödsöverdel (R) i kombination med kort fotplattshållare (Q). Hos brukare med behov av längre benstöd används lång benstödsöverdel (S) i kombination med standard fotplattshållare (P). Dessa kombinationer gäller även fotlåda och helt fotstöd.

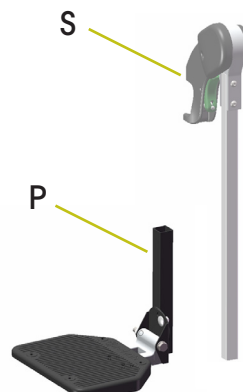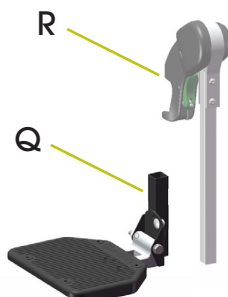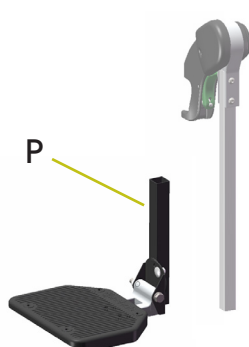

Tillbehör till fotstöd

Fotstödssida (T) monteras på de separata fotplattshållarna och används till brukare som t ex behöver skydd vid ofrivilliga fot- och benrörelser. Fotstödssidorna kan användas i stället för fotlåda när brukaren har behov av olika fotstödshöjd och/eller benstödsvinkel.

Till de separata fotstödssidorna och till fotlådans fotlådesidor finns ett polstrat överdrag, om man vill ha en mjukare yta. Det träs över sidorna och fästs med kardborrband.

Hälband (U) finns till Fotstöd delat, en modell för båda fotstödsbredderna. Hälbanden används för att behålla fötternas position på fotplattorna.

Mjuk polstring finns som tillbehör till Fotstöd delat (V) samt till Fotstöd helt och Fotlåda (W). Polstring används till brukare som sitter i rullstolen utan skor.




Mått

Tabell 1 - Mått fotplattshållare [cm]

Modell	Längd	Antal justeringshål	Avstånd mellan justeringshål
Standard	20	8	2
Kort	12	5	2

Obs: För funktionell längd, dvs sittplatta till fotplatta, se infoblad benstöd, art.nr. 95933.

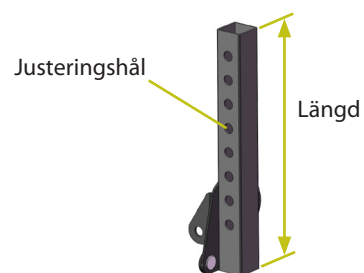


Tabell 2 - Mått fotplattor [cm]

Modell	Sb 38 Bredd / Djup	Sb 42 Bredd / Djup	Sb 46 Bredd / Djup	Sb 50 Bredd / Djup
Fotstöd delat	16 / 21	16 / 21	19,5 / 21	19,5 / 21
Fotstöd helt	35 / 22	39 / 22	43 / 22	47 / 22
Fotstöd fotlåda	35 / 22	39 / 22	43 / 22	47 / 22



Tabell 3 - Vinkel fotstöd

Modell	Vinkel
Fotstöd delat	20°
Fotstöd helt	20°
Fotstöd fotlåda	20°

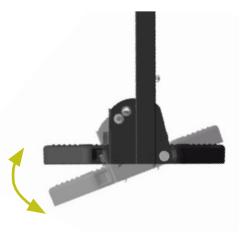

Tabell 4 - Mått Fotlådesida/Fotstödssida [cm]

Modell	Höjd	Djup
Fotlåda standard	26	16
Fotlåda kort	26	16
Fotstödssida	20	16

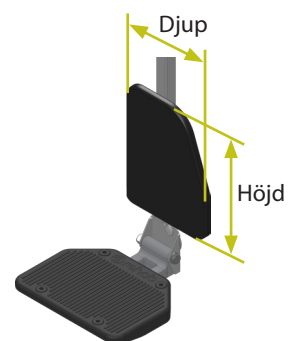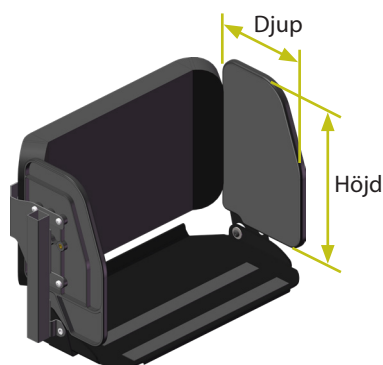

Tänk på

- Helt fotstöd, helt vadvstöd eller fotlåda ökar benstödens stabilitet och hållbarhet och bör användas till brukare med t.ex. kraftiga tonusväxlingar/spasticitet. Använd vinkelfasta benstöd för maximal hållbarhet.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.