



Armstöd finns i tre olika modeller; Armstöd standard (A), armstöd bred (B) och hemiplegiarmstöd (C). Alla modeller av armstöd finns i låg variant.


A

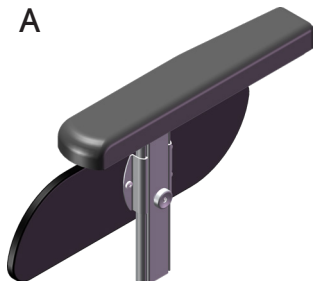

B

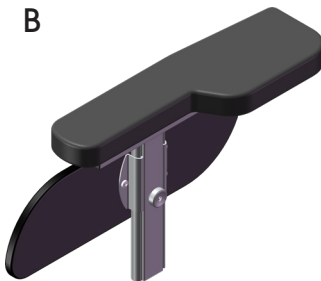

C

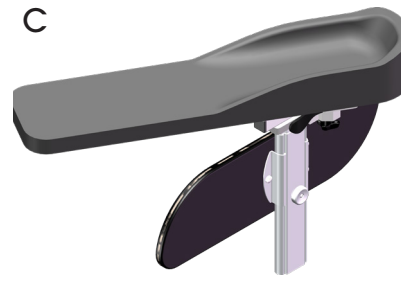

Standard

Armstöd standard består av en armstödsplatta samt ett sidostöd. Det kan höjdställas i 10 lägen samt djupinställas i 7 lägen. Inställningen i höjd och djup görs utan verktyg och graderad skala finns för höjdställningen.

Bred

Armstöd bred består av en polstrad armstödsplatta samt ett sidostöd. Armstödsplattan är bredare baktill och har en mjukare polstring än armstöd standard. Inställningarna på armstöd bred fungerar på samma sätt som armstöd standard.

Både armstöd standard och armstöd bred finns i låg variant (D och E). Sidostöd Kil kan ej kombineras med lågt armstöd.

Hemiplegi

Hemiplegiarmstöd (F) finns i höger- resp. vänsterversion och består av en polstrad armstödsöverdel samt ett sidostöd. Det kan ställas i höjd, djup, bredd samt roteras in framför kroppen (utan verktyg). Armstödsöverdelens rundade bakkant är försedd med en sarg som även går en bit fram längs med långsidorna. Hemiplegiarmstödet finns i hög och låg variant.

Hemiplegiarmstöd rekommenderas att användas på HD Balance 16. De mindre hjulen gör det lättare för vårdaren att komma åt vid justering av armstödet vinkel och djup. Vid användning av hemiplegiarmstöd på HD Balance 24 kan det i vissa lägen uppstå konflikt mellan drivhjul och armstödet fäste. De minst gynnsamma lägena är när armstödet är lågt, långt bak och rullstolen tiltas.

D



E




F



Sidostöd med stolpe


Sidostöd med stolpe (G), där armstödsplattorna är borttagna, kan användas till aktiva brukare som kör rullstolen själv. Användning av sidostöd med stolpe ger mer utrymme och bidrar till att brukaren får bra grepp om drivringarna och därmed ökad kraft att köra rullstolen. Rullstolen kan med fördel kompletteras med Armstöd standard att skifta med när stöd för armarna önskas.

I vissa fall kan Sidostöd med stolpe även vara användbart när rullstolen är utrustad med sittskal och armstöden inte används.

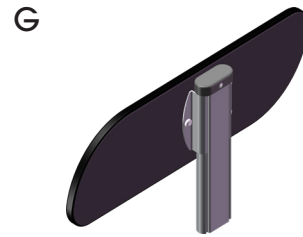


Sidostödsöverdrag

Sidostödsöverdrag (H) är ett tunt överdrag som träs över armstödet sidostöd och stängts med dragkedja. Används till brukare som vill ha/behöver en mjuk yta mot benen.

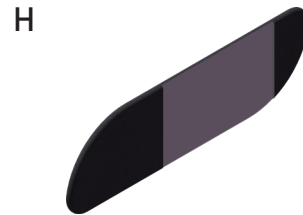

Armstödslåsning

Armstödslåsning (I) används för att låsa fast armstödsenheterna i rullstolens sitsram. Armstödet kan enkelt låsas upp och tas bort med en liten spärr vid armstödet infästning.

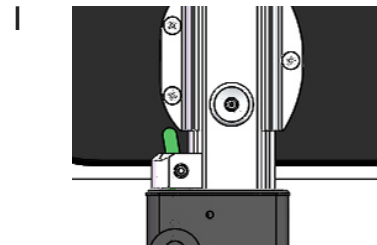


Sidostöd Lång

Armstöden kan även utrustas med en längre rak armstödsida (J) som ger ett mjukt stöd längs med lårbenet. En längre armstödsida kan även förhindra att knät trycker mot benstödens överdel.



Sidostöd Kil

Som alternativ kan armstöden utrustas med Sidostöd Kil (K). Vid utåtroteration i höftlederna rätar dessa sidostöd upp brukarens lårben till ett parallellt läge. Trycket fördelas längs med låren och risken för punkttryck mot knälederna minskar. Sidostöd Kil finns i två varianter, 4° och 7°, och är något längre än standard sidostöd. Sidostöd Kil kan ej kombineras med lågt armstöd eller med utfyllnadskuddar.

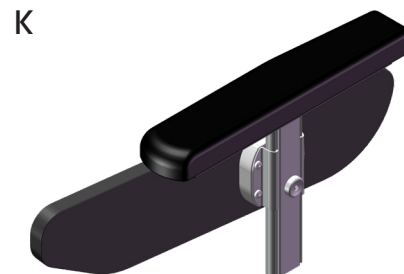


Armstödssarg

Armstöd standard och Armstöd bred kan utrustas med armstödssarger (L). Till Armstöd bred används Armstödssarg bred. Armstödssarg kan användas för att förhindra att brukarens armar glider utåt/bakåt från armstödsplattorna t ex i ett bakåttillat läge.



Mått - Armstöd standard och Armstöd bred

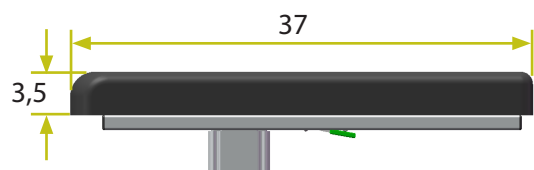


Armstödsplatta standard




Armstödsplatta bred




Bakre läget

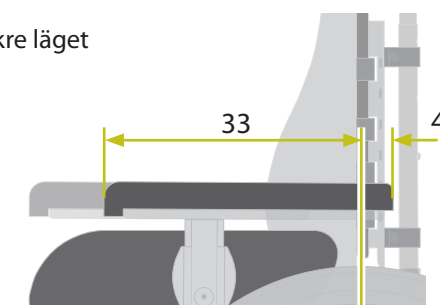


Främre läget

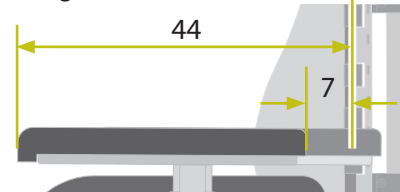


Mått - Hemiplegiarmstöd

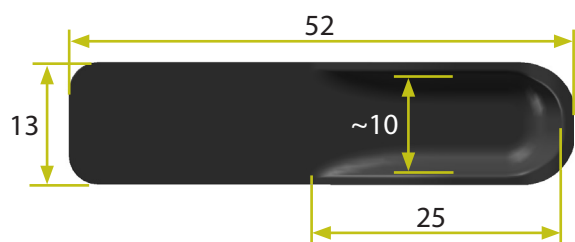


Obegränsad vinkling

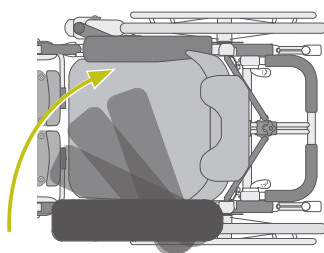

Bakre läget

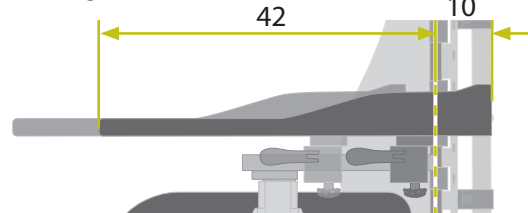



Främre läget

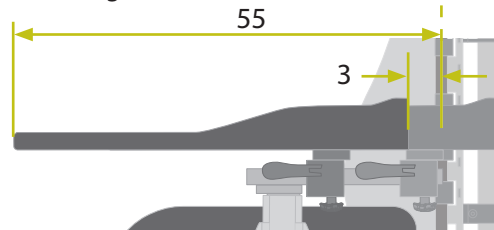

Höjd - armstöd

Tabell 1 - Armstödshöjd a [cm]

Modell	Lägsta höjd	Högsta höjd
Standard	25,5	34,5
Lågt	19,5	25,5
Hemiplegi högt	29,5	38,5
Hemiplegi lågt	23,5	29,5

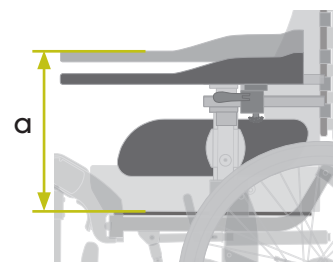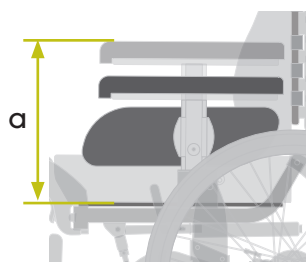


Mått - Sidostöd


Sidostöd Standard




Sidostöd Lågt

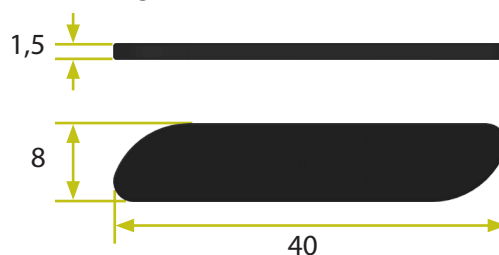


Sidostöd Lång

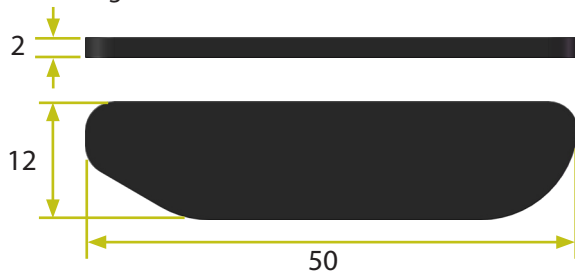

Sidostöd Kil 4°

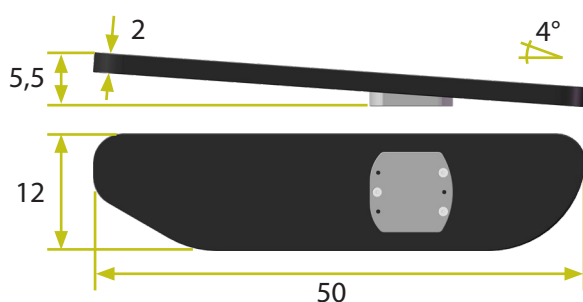


Sidostöd Kil 7°

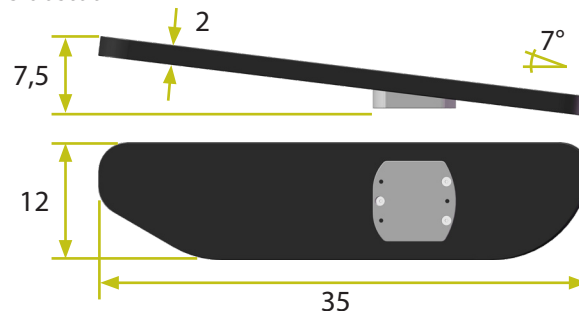

Mått - Armstödssarg

Tabell 2 - Storlek armstödssarg [cm]

Modell	Höjd	b
Standard	6	6,5
Bred	6	11,5

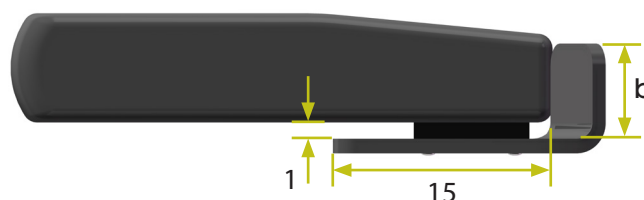

Tänk på

- Vid användning av hemiplegiarmstöd uppstår en viss klämrisk mellan armstödetts rörliga delar. Var särskilt uppmärksam på brukarens armar och händer vid injustering av armstödetts position.
- För att underlätta vid inställning av Hemiplegiarmstöd rekommenderas att låsspak och ratt öppnas var för sig, ej samtidigt.
- Rullstolens yttermått påverkas inte av en bredare armstödsplatta.
- Armstödssarg är möjligt att använda till brukare som lutar åt sidan. En riskbedömning gällande tryck, axelluxation m.m. måste göras i varje enskilt fall.
- Bordets djupinställning kan begränsas något om rullstolen är utrustad med Armstöd bred och/eller Armstödssarg.
- Armstöd bred i kombination med armstödssarg kan bredda rullstolens yttermått något.
- Hemiplegiarmstöd kan bredda rullstolens yttermått något beroende på inställning.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 95750.