

Modeller

HD Balance finns i två modeller, HD Balance 24 med 24" drivhjul (A) och HD Balance 16 med 16" drivhjul (B). Sittenhetsen, som innefattar sits, rygg, benstöd och armstöd, är densamma för båda dessa modeller. Det som skiljer modellerna åt är drivhjulens storlek och hjulramens utformning.



HD Balance 24

HD Balance 24 är framtagen för brukare som helt eller delvis kan köra rullstolen själv med hjälp av drivringar på hjulen. Även om förmåga att köra rullstolen själv saknas, ges brukaren möjlighet att med hjälp av drivringarna vrida sig runt i rummet. 24-modellen går också, tack vare den större hjulstorleken, något lättare att vika upp när man går över hinder som t ex trottoarkanter.

HD Balance 16


HD Balance 16 är en transportmodell för brukare som inte kör själv. 16"-hjulerna möjliggör också att vårdaren kan komma närmare brukaren i vårdsituationen. Även glidförflyttningar i och ur rullstol i sidled underlättas.

Sittbredd

HD Balance finns i fyra fasta sittbredder, 38, 42, 46 och 50 cm. Sittbredden mäts mellan armstödens sidostöd (C). För att ytterligare anpassa sittbredden efter brukaren finns utfyllnadskuddar (D) som fästs på insidan av armstödens sidostöd och gör sittbredden 2 cm smalare (1 cm per sida).

Alternativt kan sittbredden minskas 2 cm med hjälp av Distanser till sidostöden (E). Dessa kan kombineras med utfyllnadskuddar vilket ger en 4 cm smalare sittbredd totalt. Detta är främst aktuellt på rullstolar med sittbredd 38 cm, då en ännu smalare sittbredd (34 cm) önskas.


Distanserna kan även användas i stället för utfyllnadskuddar då rullstolen är utrustad med kilformade sidostöd.

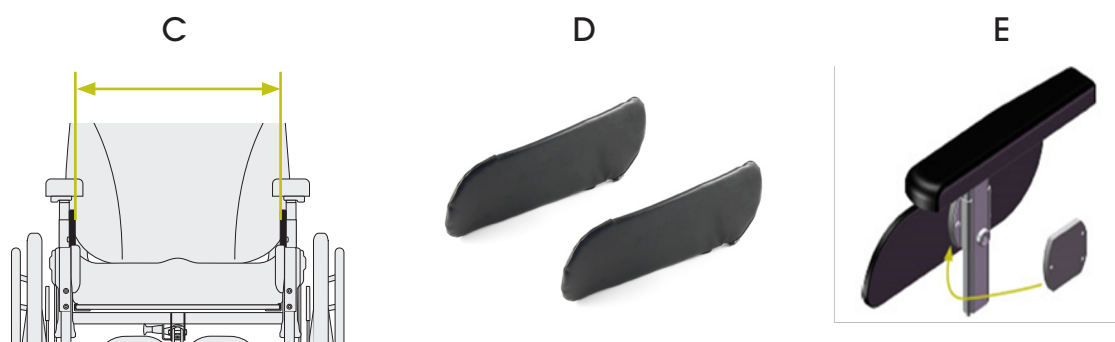

Sittdjup / sitsram

HD Balance har två alternativa chassin, ett med standard sitsram och ett med förlängd sitsram. Standardchassit har ett sittdjup på 43-52 cm (F) medan det förlängda chassit har ett sittdjup på 48-57 cm (G). Dessa mått är tagna med HD Balance originalsittdyna. Måttet på sittdjupet är ungefärligt och påverkas av inställningen av Flexiryggens remmar. Chassit med den förlängda sitsramen är även utrustat med en förlängd sittplatta och en förlängd sittdyna. Både standard och förlängd chassi har ställbart sittdjup i 7 lägen (H).

Ryggdistanser kan i undantagsfall användas för att åstadkomma ett kortare sittdjup än vad som annars är möjligt. Vid användning av HD Balance ryggdistanser blir sittdjupet 2,5 cm kortare. Användandet medför risker, se monteringsanvisning Ryggdistanser art. nr. 95831.

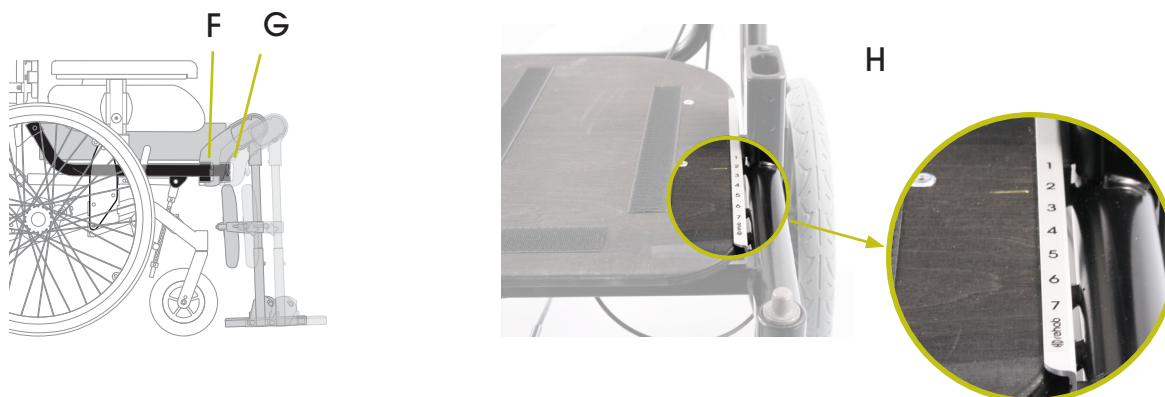

Tänk på

- Om Flexi ryggsystem används, tänk på att kardborrbandens inställning påverkar sittdjupet.
- Information om yttermått/totalbredd se dokument Måttabell, art. nr. 95719 och Infoblod Driv-, länkhjul och drivringar art. nr. 95938.
- Utfyllnadskuddar kan inte användas till Armstöd lågt eller i kombination med kilformat sidostöd. I stället kan Distans sidostöd användas.
- Om sittdjup används i läge 6-7 samtidigt som flexiryggens band släckas djupt kan en glipa uppstå mellan sittplatta och rygg. Detta kan avhjälpas genom att använda en förlängd sittplatta och sittdyna på en standard sitsram. Kontrollera alltid att ev. klämrisk/stasning i knäveckan inte uppstår. OBS! Ska rullstolen återanvändas av annan brukare är det viktigt att den återställs med en standard sittplatta och sittdyna.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art. nr. 95750.