

Körbygel / körhandtag / vårdarbroms till HD Balance

Infoblاد
Sida 1 (3)

Körhandtagsida standard / körhandtagssida enkel

HD Balance är som standard utrustad med körhandtagsidor med vårdarbroms (A). Körhandtagssida enkel, dvs. utan vårdarbroms går att få som alternativ (B).

Körhandtagssidorna är höj- och sänkbara i 3 lägen med hjälp av snäppknappar (C) i ryggramsrören. Om vårdaren som ska köra rullstolen är lång finns Förhöjda körhandtagssidor (+12 cm).



Körhandtagssida vinkelställbar

Vinkelställbara körhandtagssidor finns som alternativ (D). Dessa kan enkelt vinklas i tre lägen utifrån brukarens tiltposition och/eller vårdarens längd.



Vårdarbroms

Vårdarbromsen är en kombinerad färd-och parkeringsbroms av skivbromstyp (E). Denna fungerar både för massiva och luftpumpade däck, oavsett lufttryck. Vårdarbroms är standard på HD Balance men kan väljas bort, se Körhandtagssida enkel. Bromshandtagen (F) sitter på körhandtagssidorna, under körbygeln.



Körbygel

Körbygel (G) tillhör standardutrustningen på HD Balance. Den är klädd med ett mjukt körbygelskydd i ett avtorkbart latexfritt material.



Alternativ

Som alternativ till standard körbygel finns körbygel extra djup, körbygel förhöjd bockad eller separata körhandtag.

Körbygel extra djup

Körbygel extra djup (H), är 8 cm djupare än standard och kan användas till exempel när rullstolen är utrustad med drivaggregat. Detta medför bättre gångutrymme för vårdaren.



Körbygel förhöjd bockad

Körbygel förhöjd bockad (I) kan användas om brukaren körs mestadels i sitstiltat och/eller ryggfällt läge. Denna körbygel skall ej användas i kombination med förhöjd eller vinkelställbar körhandtagssida.




Separata körhandtag

Separata körhandtag (J) är ett alternativ om t.ex. trappklättrare ska användas. Separata körhandtag ska fixeras med skruvar för stabilitet i handtagen (kan ändras till rattar i stället för skruvar på förfrågan). Under snäpplåset finns ett förborrat hål där låsning sker, se Monteringsanvisning art.nr. 95827. Separata körhandtag skall ej användas i kombination med vinkelställbara körhandtagssidor.



Tabell 1 - Höjd körbygel/körhandtag, upprätt stol. [cm]

Modell	Körbygel	Körbygel extra djup	Körbygel förhöjd bockad	Separata körhandtag
Körhandtagssida standard	105-120	105-120	131-146	105-120
Körhandtagssida förhöjd	117-132	117-132	-	117-132
Körhandtagssida vinkelställbar	a: 109-124 b: 122-137	a: 109-124 b: 128-143	-	-

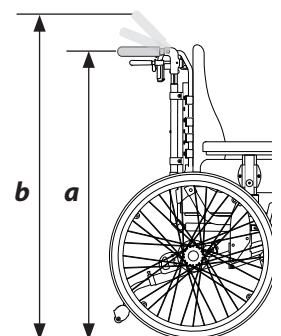

Tänk på

- Väljer man bort vårdarbroms på HD Balance 16 krävs brukarbroms på stolen.
- Med separata körhandtag blir rullstolsryggen mindre stadig/styv än om körbygel används.
- Separata körhandtag är ej möjligt i kombination med vinkelställbara körhandtagssidor.
- Om körhandtagssida förhöjd (12 cm) monteras på rullstol krävs även att vajer och hölje till bromshandtag byts till längre utförande.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art.nr. 95750.