

HD Balance finns med Sittdyna standard (A) eller Sittdyna lång +5 cm.

A



Sittdynan placeras normalt centrerad över sittplattan, så att sittplattan täcks. Dynan fästs på sitsen med kardborrband.

Sittdyna standard

HD Balance är utrustad med en formad sittdyna i formgjuten kallskum. Dynan har sittgrop och den främre delen är lätt formad för att ge stöd åt lårbenen. Framkanten på dynan är snedskuren för att minimera risk för tryck i brukarens knäveck.


Sittdyna lång

Det finns även en 5 cm längre sittdyna som passar till HD Balance med förlängt sittdjup. Utformning och funktion är densamma som för sittdyna standard.

Mått sittdynor

Tabell 1 - Mått sittdynor [cm]

Modell	Djup	Bredd	<i>a</i> = Höjd framkant	<i>b</i> = Höjd mitt bak
Standard	48	38, 42, 46, 50	9	7
Lång	53			

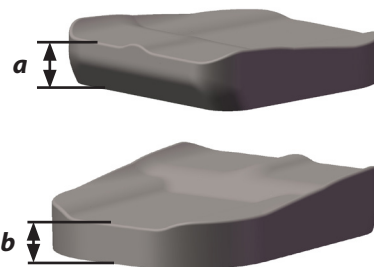

Klädsel

Sittdynorna har som standard grå Trevira tygklädsel (B). De kan även beställas med svart Treviraklädsel (C) eller med svart avspritbar Hygienklädsel (D). Alla klädslar är avtagbara och kan tvättas i 60°. Klädslar finns även att beställas separat. För mer information om klädslar se dokument "Infoblad Klädslar till HD Balance", art. nr. 95952.

B



C



D



Överdragsklädsel

Till sittdyna standard och sittdyna lång finns även överdragsklädsel i svart Trevira som träs över befintlig klädsel. Överdraget kan fås med eller utan inkontinensskydd och är tvättbart i 60 grader.

Tänk på

- Sittdynor av formpressat kallsaum har en begränsad livslängd beroende på användning. Dynorna ska kontrolleras 1-2 gånger per år för brukarens komfort och säkerhet. Vid behov byts nedsuttna och uttjänta dynor ut.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.