



HD Balance finns med två typer av ryggsystem, Flexi (A) och Planrygg (B). Ryggsystemen finns i två olika höjder, standard och lång (+10 cm). Ryggsystem Flexi och Planrygg kan båda kompletteras med antingen ryggdyna Standard eller ryggdyna Plan.

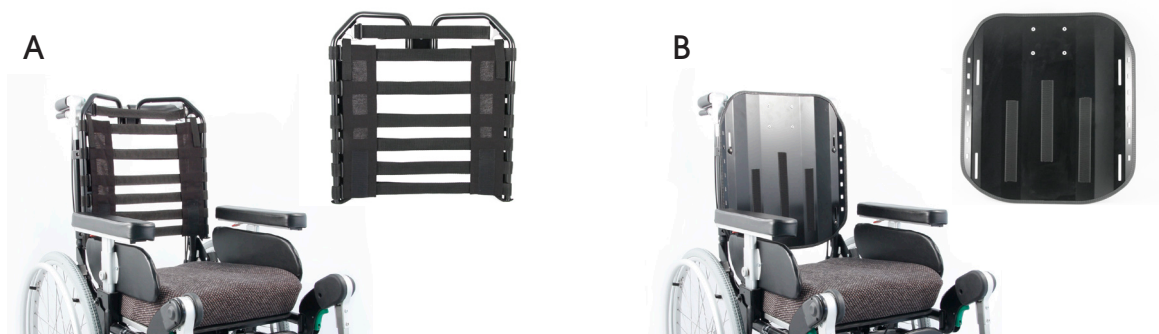

Flexi

Flexi ryggsystem, som är standard, ger ett bekvämt anpassningsbart stöd för de flesta ryggar. Det passar såväl ryggar utan deformiteter som ryggar med t. ex. bröstkyfos eller skolios. På ett enkelt sätt kan flexiryggens remmar justeras för att tippa ett rörligt bäcken framåt och på så sätt uppnå en mer upprätt sittposition. Ryggsystemet kan också ge extra stöd för brukare som lutar åt sidan eller behöver extra utrymme för stjärten.


Flexi ryggsystem består av en Flexiram med sju remmar (åtta på den förlängda). De fyra nedre remmarna (C) har en tätare placering för att lättare kunna reglera brukarens bäckenställning och ge ett stöd för ländryggen. De tre övre remmarna (D) har en glesare placering för att främja ventilationen i ryggdynan. Ryggdynan fästs mot ryggsystemet med hjälp av kardborrband (E).

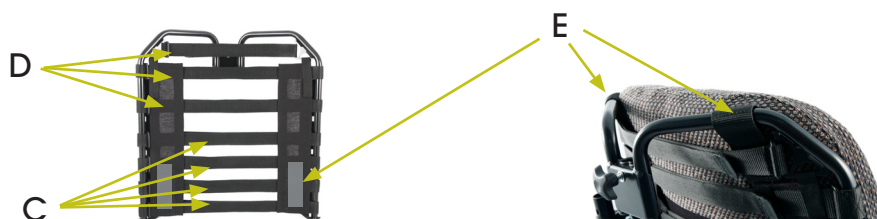

Planrygg


Planrygg finns som alternativ till Flexi ryggsystem och används när brukaren har behov av ett fastare ryggstöd. Den kan också användas som bas då det finns ett behov av att bygga upp ett individanpassat ryggstöd.

Planryggen består av en ryggplatta av lackad aluminiumplåt. Ryggdynan fästs mot ryggplattans fram- och baksida med hjälp av kardborrband (F).

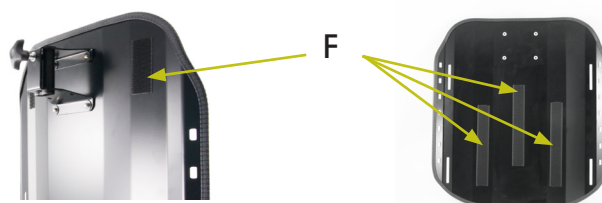

Inställningar

Ryggstödshöjden kan regleras steglöst 5 cm i ett inbyggt spår i ryggsystemet (G). Detta gäller både Flexi och Planrygg. Om man vill höja ryggen ytterligare kan en höjning på 3 cm uppnås genom att flytta de fyra ryggklamrarna längs rullstolens ryggram (H). Obs! Vid uppflyttning av ryggklamrarna går det inte att ha körbygeln i det översta läget.

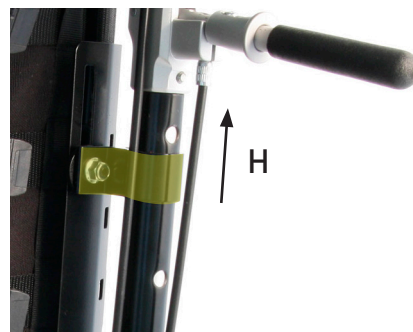

Ryggdynor

Det finns två typer av ryggdynor, Standard (I), med sidostödsvingar och Plan (J), utan sidostödsvingar. Sidostödsvingarna ger ett fast men mjukt stöd för brukaren i sidled. Den plana ryggdynan används för den mer aktiva brukaren med god bålstabilitet eller då sidostödsvingarna är i vägen för bålstödens placering. Båda varianterna finns i standardhöjd och lång för att passa ryggsystemens två olika höjder.




Mått ryggsystem

Tabell 1 - Mått ryggsystem [cm]

	a min	a max
Flexi standard	55	60 / 63*
Flexi lång	65	70 / 73*
Planrygg standard	55	60 / 63*
Planrygg lång	65	70 / 73*


* Vid uppflyttning av ryggklamrarna.

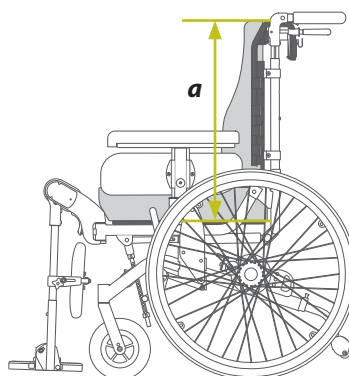

Mått ryggdynor

Tabell 2 - Mått ryggdynor [cm]

	Bredd	Höjd <i>b</i>	Tjocklek <i>c</i>	Djup <i>d</i>
Standard	Som sittbredd	51	4	12
Standard lång (+10 cm)	Som sittbredd	61	4	12
Plan	Som sittbredd	51	4	-
Plan lång (+10 cm)	Som sittbredd	61	4	-

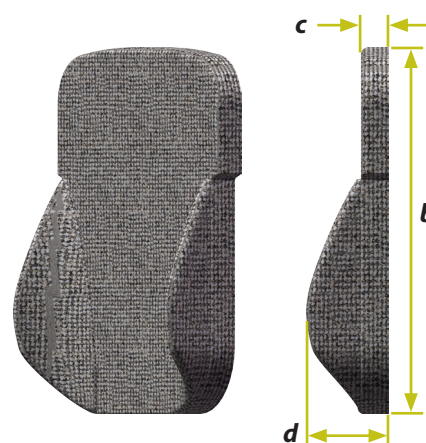

Klädsel

Ryggdynorna har som standard grå Trevira-klädsel (K). Kan även beställas i svart Trevira (L) eller i svart avspritbar Dartex (M). Alla klädsel är avtagbara och tvättbara i 60°. Klädsel finns även att beställas separat.


K



L



M

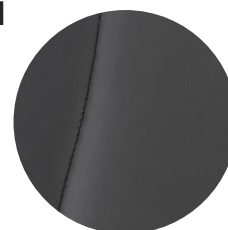

Tänk på

- HD Balance kan utrustas med ett bredare ryggstöd för brukare med brett axel/skulderparti och smal höftbredd. Möjlighet finns också att utrusta rullstolen med ett smalare ryggstöd för brukare som har en smalare överkropp och är bredare runt höfter och stjärt. Se Infoblad Ryggssystem utökad/minskad, art.nr. 95945).
- Det finns möjlighet att använda ryggdistanser till både flexi- och planrygg för att korta sittdjupet. Se monteringsanvisning Ryggdistanser, art. nr. 95831, för mer information.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.