



Alternativa utföranden

Bromsar, specialvarianter - HD Balance

Specialutförande av HD Balance rullstolar ska riskbedömas. Bedöm om tipp- och/eller klämrisken ökar i och med modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om specialutförandet är motiverat trots detta. Var noga med att informera berörda om dessa risker!

Bromsar, standard

HD Balance 16 och 24 är som standard utrustad med kombinerad färd- och parkeringsbroms (vårdarbroms) (A). 24-modellen är som standard även utrustad med parkerings-/ brukarbroms (däckbroms) (B). 16-modellen har som standard inte brukarbroms (däckbroms).

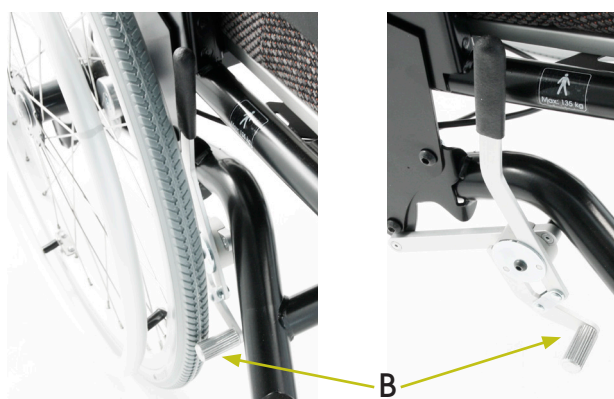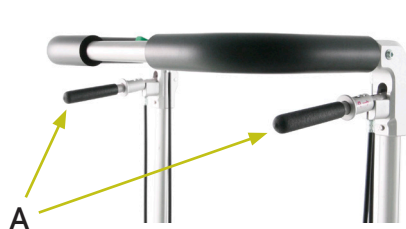

Bromsar, specialvarianter

Brukarbroms till HD Balance 16

HD Balance 16 kan utrustas med parkerings-/ brukarbroms (däckbroms) som specialutförande. Detta kan vara användbart om brukaren ska ges möjlighet att bromsa själv eller om rullstolen används i trånga utrymmen och behöver bromsas av vårdaren framifrån.

Brukarbromsar med förlängt handtag

Om brukaren har svårt att nå brukarbromsens handtag, eller behöver extra kraft för att manövrera dessa, kan HD Balance utrustas med förlängda bromshandtag som specialutförande. Dessa är 7,5 cm längre och ger en bättre hävstångseffekt vilket kräver minskad kraft vid manövrering. Obs! Denna montering får endast utföras av behörig personal.

Tänk på

- Innan beställning av förlängd bromsspak görs till befintlig rullstol, kontrollera först om rullstolen är utrustad med den nyare versionen av tappen i benstödsfästet. Denna tapp förhindrar att bromsspaken krockar med benstödet i utvinklat läge. Se Bruksanvisning/Monteringsanvisning med art.nr. 95822.
- Förlängd bromsspak kan i vissa fall störa vid brukarens förflyttning i och ur rullstolen.
- Förlängd bromsspak är, på grund av sin längd, också något mer ömtålig än bromsspak i standardutförande.
- Vid byte till 20" hjul som monteras i bakre position krävs att man byter till däckbroms 16" för att bromsen skall kunna nå hjulet.
- Möjlighet finns att välja bort färd- och parkeringsbroms (vårdarbroms) på både 16- och 24-modellen. Om denna broms väljs bort på HD Balance 16 krävs parkerings-/brukarbroms (däckbroms).

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.