


Droppställning

Dok. nr. 95956 Rev B 2022-02-21

Sida 1 (1)

Det är möjligt att utrusta HD Balance med en droppställning. Detta kan underlätta för brukaren att vara mer mobil under vissa typer av behandlingar och/eller undersökningar.

Konstruktionen är stabil och består av en kraftig lättviktsstång (A) i aluminium och ett fäste (B), som monteras i rullstolens ryggram på höger eller vänster sida. Droppställningens höjdställning regleras enkelt med en ratt. Vinkeln justeras med en ratt så att droppställningen alltid kan hållas lodrät även då rullstolens sits och/eller rygg vinklas. Hållaren har som standard dubbla krokar för att kunna bära två droppåsar.

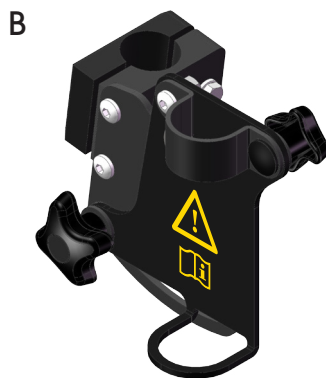

Droppställningsfästet är försett med varningssymbol på utsidan för att påkalla att speciell information finns. Se dokument 95707.



Tänk på

- Håll alltid droppställningen så vertikal som möjligt.
- Kontrollera alltid att vreden är åtdragna innan användning annars kan droppställningen falla framåt eller bakåt.
- Droppställningen medför en förhöjd tipprisk, speciellt med tunga droppåsar och i sitstiltat/ryggfällt läge.
- Var uppmärksam på dörrhöjden då droppställning används.
- Använd tippskydd.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art.nr. 95750.