


Bröstselefäste

Dok. nr. 95959 Rev A 2021-06-15

Sida 1 (2)

Bröstselefästet är avsett att användas med bröstselar, sternumstöd och övriga selar för bålen som har fyra fästremmar. Det består av två ställbara fästen (A: Flexirygg, B: Planrygg) för de övre remmarna, samt två fästögglor (C) för de nedre remmarna. De övre fästena är inställbara i höjd, sidled och vinkel. Både sid- och vinkeljusteringen används för att justera avståndet mellan fästena. De nedre fästena fästs i något av de nedre hålen på ryggsystemet.

Bröstselefästet passar till selar med en bandbredd på max 25 mm.

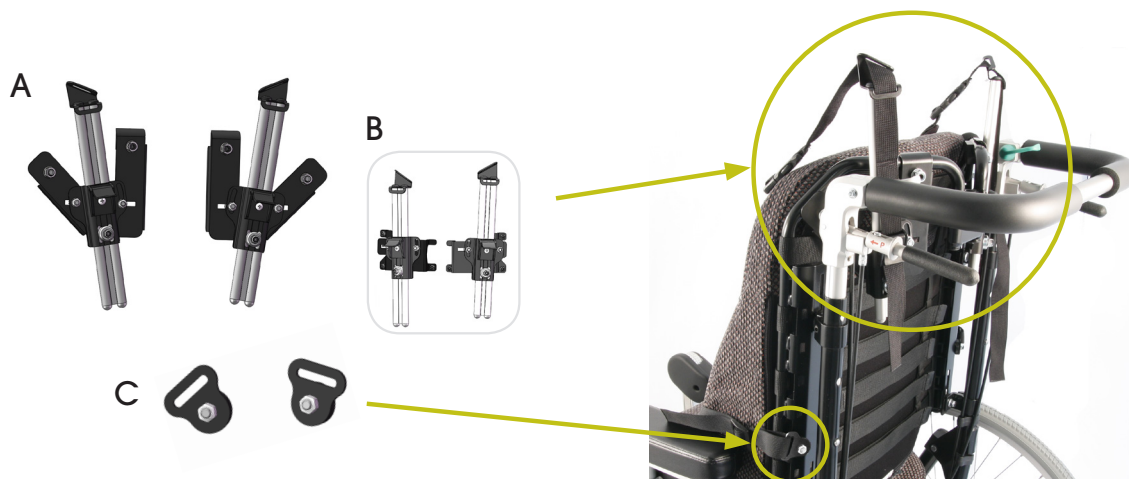

Mått

De övre fästernas höjdställning påverkar hur brett isär de kan sitta. Ju högre de sitter desto större blir det möjliga spannet (a). Höjden (b) är mätt från Flexiryggens överkant. Se infoblad Ryggsystem (dok.nr. 95941) för mått på ryggstödets höjd. Måtten gäller för en Flexirygg men justeringsintervallen på Planrygg är snarlika.


Tabell 1 - Inställningsmått - bröstselefäste [cm]

Ryggbredd	a ¹ min	a ¹ max	a ² min	a ² max	b min	b max*
38 cm	13	28	16	25	1	12
42 cm	16	32	19	28	1	12
46 cm	19	36	22	32	1	12
50 cm	23	39	25	35	1	12

¹ Avstånd mellan fästena i högsta möjliga läge

² Avstånd mellan fästena i lägsta möjliga läge

* Den maximala breddinställningen begränsas i vissa fall beroende på vilken höjd körbygel är inställd. Även vid användning av ett ryggsystem som är bredare än rullstolens sittbredd begränsas det maximala breddmättet. De lägen som i dessa fall inte kan uppnås är dock sådana som mycket sällan används.

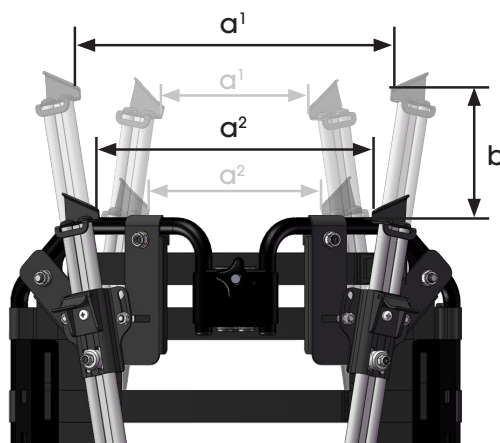

Tänk på

- Bröstsele skall alltid användas tillsammans med positioneringsbälte för bäckenet.
- Bröstsele används vid positionering och skall inte förväxlas med ett säkerhetsbälte för biltransporter.
- Speciella restriktioner för användande av bröstsele kan finnas. För mer information kontakta socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se.
- Riskbedömning vid användning av bröstsele i enskilda brukares fall skall göras av förskrivare.
- Det är tillverkaren av bröstselen som ansvarar för att bröstselen är säkra att använda. Se bruksanvisning för respektive bröstsele för att se hur denna ska positioneras i förhållande till brukaren.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, dok.nr. 95750. Bälten och bältesfästen beställs separat.

Läs även *Förteckning över kombinationsavtal*, dok.nr. 95232.