

Vissa tillbehör samt vissa specialutföranden av HD Motion medför ökade risker vid användandet av rullstolen. Dessa tillbehör och rullstolar är märkta med etiketten i Figur 1 och finns beskrivna i detta dokument.

Vid oklarheter om vilket/vilka tillbehör/specialutförande som är aktuellt för en viss rullstol, kontakta alltid HD Rehab.

**OBS:** En rullstol kan vara utrustad med flera tillbehör/anpassningar som medför förhöjda risker.

Kontrollera alltid Underhållsanvisningen, dok.nr. 96730, om speciellt underhåll krävs för det specialutförande den aktuella rullstolen är utrustad med.



Figur 1

## Förhöjd sitsenhet

Rullstolen kan höjas med adaptrar som gör sitsenheten 30 eller 50 mm högre (Figur 2).



- Rullstolen får en högre placerad tyngdpunkt vilket medför större risk att tippa, speciellt på lutande underlag.
- Vajrarna till broms, tilt och ryggfällning sträcks ut mer. Var uppmärksam så dessa inte skadas.

**OBS:** Kontrollera alltid att brukaren verkligen har behov av förhöjning. Om "fel" brukare får en förhöjd stol kan det innebära kraftigt förhöjda risker.



Figur 2

## Tippskydd

Tippskydden, Figur 3, har en varningsetikett i standardutförande. Den varnar vårdaren för att tippskyddet inte är i aktiv position och bör återställas. Tippskyddet ska alltid vara i aktivt läge om möjligt.

Om HD Motion 22 förses med annan hjulstorlek än standard 22", bör tippskydden modifieras. Se Teknisk Information, dok.nr. 96720.



Figur 3

## Droppställning

Tillbehöret droppställning (Figur 4) kan innebära ökad tipp risk, främst bakåt. Speciellt i situationer där en tung droppbehållare hänger högt och rullstolen tiltas/ryggfälls är risken hög. Var uppmärksam på detta och var noga med att använda möjligheten att rotera fästet för att åstadkomma en så vertikal position för droppställningen som möjligt för att minimera risken.

På grund av den tipp risk som uppstår när ryggstödet belastas med tunga vikter bör inte droppställning användas tillsammans med tillbehöret väskkrok.

**Använd alltid tippskydd.** Bedöms risken för hög kan drivhjulen flyttas till sin bakre position vilket gör rullstolen stabilare men något mer trög att köra.



Figur 4

## Syrgashållare

Tillbehöret syrgashållare (Figur 5) medför en förhöjd tipp risk, speciellt i tiltat läge. Var uppmärksam på detta.

På grund av den förhöjda tipp risken som uppstår när ryggstödet belastas med tunga vikter bör inte syrgashållaren användas tillsammans med droppställning eller väskkrok.

**Använd alltid tippskydd.** Bedöms risken för hög kan drivhjulen flyttas till sin bakre position vilket gör rullstolen stabilare men något mer trög att köra.



Figur 5

## Specialanpassad produkt

Vissa specialanpassningar medför ökade risker och märks då med varningsetiketten. Se bifogat tillägg till bruksanvisningen för mer information om riskerna för den specifika specialanpassningen.