

Generella förutsättningar *

Detta dokument specificerar ändringar som är tillåtna att göra utan att rullstolens CE-märkning påverkas (Den totala produktens CE-märkning).

OBS: Om den del som ändras har en egen CE-märkning måste denna ovillkorligen avlägsnas och ersättas med en märkning "specialanpassad produkt" samt ansvarig tillverkare enligt gällande regelverk. *(De flesta delar som nämns i detta dokument har en egen CE-märkning men det finns några undantag och detta nämns då i texten). Återställning till CE-märkning kan inte göras.*

- Alla ändringar ska utföras på ett fackmannamässigt korrekt sätt.
- Aktuell kundorganisation ansvarar för att personal som utför dessa ändringar, har tillräcklig kompetens för detta.
- Vid ändringar måste en bedömning göras så att riskerna vid användning ej ökar.
- Ändringar som gör att rullstolen används på annat sätt än avsett är inte tillåtna.
- Kraven enligt EN12182 och EN12183 ska följas.
- **I** Använda material ska uppfylla kraven enligt MDR (93/42/EEC).
- Vid ändringar ska alltid rullstolens allmänna skick inspekteras för att upptäcka eventuella defekter.
- Ändringar får ej öka belastningen på rullstolens originalkomponenter. Ändringar medför att garantin avseende de ändrade delarna samt infästningar till dessa upphör att gälla.

HD Rehab tar inget ansvar för material till egentillverkade detaljer om detta inte har levererats av oss, eller för färdiga detaljer från andra leverantörer.

I vissa fall finns avtal med leverantörer av kompletterande produkter. Dessa leverantörer ansvarar för korrekt information angående montering och användning av respektive produkt.

HD Rehab kan kräva att CE-märkning för rullstolen tas bort om ändring utförs på felaktigt sätt.

För ytterligare information kontakta HD Rehab.

OBSERVERA: Tidigare versioner av detta dokument annulleras av denna revision.

En * efter rubriktext anger i vilket fält ändringen är gjord.

I Förändringen i texten är markerad med en fet linje till vänster om textavsnittet.

Bälten / Bröstsele

Inga speciella restriktioner angående bältets typ. Bälten påverkar normalt inte rullstolens CE-märkning såvida inte fastsättningen påverkar funktion eller egenskaper hos rullstolen. HD Rehab's original fästen skall i de fall det är möjligt användas. Riskbedömning av bältesanvändning i enskilda fall måste göras. Observera allmänna restriktioner vid användning av bälten.

Ev. kombinationsavtal finns angivna i dokument 95232.

Droppställning *

Droppställning finns som tillbehör från HD Rehab.
Anvisningar/instruktioner i bruksanvisning, monteringsanvisning och infobladd ska följas.

Fotlådor *	<p>De generella förutsättningarna ska uppfyllas . Fotplattan kan förses med påbyggnadsdelar som polstring, fotremmar och liknande. Hål kan borraras genom fotplattan men ingen åverkan får göras på övriga delar.</p>
Fotstöd	<p>De generella förutsättningarna ska uppfyllas. Fotplattorna kan förses med påbyggnadsdelar som polstring, fotremmar och liknande. Hål kan borraras genom fotplattan men ingen åverkan får göras på fästdetaljer. Fotplattor med slitsar finns som tillval. Slitsar i fotplattsöverdelen kan då skäras ut. Gäller både hel och delad fotplatta. Ev. kombinationsavtal finns angivna i dokument 95232.</p>
Ryggdistanser	<p>Framflyttning av ryggsystem får göras endast med HD Rehabs originaldelar och riktlinjer. Speciellt tillbehör, ryggdistanser, finns. Det är tillåtet att montera ryggdistanser på en sida för att snedställa ryggen. Individuell kontroll och riskbedömning måste alltid göras vid montering, beakta speciellt tipprisken framåt. Se vidare i speciella infobladd och monteringsanvisningar.</p>
Ryggdynor	<p>Tillåtet att modifiera om de generella förutsättningarna uppfylls.</p>
Sittdynor	<p>Alternativa sittdynor från andra tillverkare som är CE-märkta och avsedda att användas i rullstol är tillåtet om de generella förutsättningarna uppfylls. Observera eventuella viktbegränsningar för bibehållande av max användarvikt.</p>
Syrgaskorg	<p>Syrgaskorg får monteras på HD Motion under följande förutsättningar: I första hand ska HD Rehabs tillbehör Syrgashållare användas. Om andra fabrikat används gäller följande. De generella förutsättningarna ska följas. Ingen åverkan får ske på rullstolens ramdetaljer. Infästningen bör göras så lågt som möjligt, i första hand på hjulram eller sitsram. Av praktiska skäl är det ofta endast möjligt att montera på ryggramen. Detta kan medföra ökade risker. Kontrollera att problem eller risker ej uppstår när rullstolens reglerings-möjligheter används. Speciellt tipprisker och klämrisker måste kontrolleras. Max vikt om utrustningen monteras på ryggramen är 6 kg, på sits-/hjulram 10 kg Observera att totalvikten (användare + utrustning) inte överskrider rullstolens maximalt tillåtna viktsbelastning. Observera att monteringen kan påverka funktionen och hindra användningen av eventuella tillbehör. Bruksanvisningen skall kompletteras med eventuell nödvändig information. Varningsskylt (-etikett) bör sättas på stolen. Ev. kombinationsavtal finns angivna i dokument 95232.</p>
Övriga tillbehör, fastsättning i ramdelar	<p>Det är generellt tillåtet att fästa övriga tillbehör såsom dator, läsplatta och liknande genom att klämma fast ett fäste på rullstolsramen. Man får dock aldrig göra åverkan på ramen genom borrning, svetsning eller annat. De generella förutsättningarna ska följas med undantag för att viss ökad belastning på ramdelar får ske i detta fall. Viktigt är att alltid göra en individuell riskbedömning för brukarsituationen så inte exempelvis tipprisker eller klämrisker uppstår till följd av tillbehörsmonteringen. Observera att totalvikten (användare + utrustning) inte överskrider rullstolens maximalt tillåtna viktsbelastning.</p>