

Följande dokument bör finnas till hands.

Samtliga dokument finns att ladda ner från HD Rehabs hemsida, hdrehab.se.

Dok. nr.	Dokumentnamn
96740	Reservdelslista
96764	Märkning
96720	Teknisk information
	Ev. unik dokumentation för specifik rullstol

Generellt angående underhåll:

- Riktlinjerna i underhållsanvisningen bör följas. Detta för att rullstolens beräknade livslängd på 10 år vid normal användning ska gälla. Bristande underhåll och användning utöver det normala kan påverka livslängden och öka riskerna vid användning. Bedömning av annat underhållsbehov får göras från fall till fall av rullstolens huvudman/ansvarige. Underlåtande av underhåll kan även påverka vår bedömning i garantiärenden.
- Underhåll enligt avsnitt 1 kan utföras av all personal.
- Underhåll enligt avsnitt 2 och 3 skall utföras av kompetent och utbildad personal.
- Anvisningen gäller för standardutrustade rullstolar. För specialutrustade rullstolar kan ytterligare underhållsaktiviteter bli nödvändiga.
- Den senaste utgåvan av detta dokument skall användas. Dokumentet finns att ladda ned från hdrehab.se, alternativt rekvideras från HD Rehab AB.
- För reparationer i samband med underhåll hänvisas till Teknisk Information, dok.nr. 96720.
- För ytterligare information kontakta HD Rehab AB.

Avsnitt 1

Aktivitet	Intervall
Rengöring av lackerade och ytbehandlade ytor samt plastdelar Normala allrengöringsmedel och desinficeringsmedel kan användas. Avtorka efter tvätt. Använd ej frätande medel, ex. klorin.	Löpande
Tvätt av klädslar och klädda ytor Följ tvättråd enligt etikett. Tygklädslar kan normalt tvättas i 60 grader. Klädda delar (armstöd, vadplattor mm) avtorkas med normala allrengöringsmedel. Desinfektionsmedel ex. handsprit kan användas men vid frekvent och långvarig användning förkortas livslängden på detaljen.	Löpande
Körbygelskydd Avtorkas med normala allrengöringsmedel. Desinfektionsmedel ex. handsprit kan användas men vid frekvent och långvarig användning förkortas livslängden på detaljen.	Löpande
Kontroll av rullstolens märkning och skalor Skadad märkning bör åtgärdas/bytas. OBS: Märkning ska följa dokument 96764.	Löpande

Avsnitt 2

Att följa anvisningen i detta avsnitt som i princip består av kontroller, fångar upp ev. ovanligt slitage och håller risken för tillbud på en mycket låg nivå. Även nödvändigheten av och kostnaden för reparationer hålls på en låg nivå.

Aktivitet	Intervall
Genomgång av skruvar och muttrar Kontrollera att skruvar och muttrar är fastdragna. Speciell uppmärksamhet vid rullstolschassiets ledpunkter.	1-2 ggr per år
Kontroll av hjul och länkhjul Kontrollera att drivhjulens ekrar och drivringar sitter fast och är fria från skador samt däckens kondition. Kontrollera att länkhjulen ej glappar samt hjulbanans kondition. Kontrollera stänkskydden, gäller mod. 22. Om rullstolen används mycket utomhus ska tätare intervall tillämpas.	1-2 ggr per år
Kontroll av tipskydd Kontrollera tipskyddens funktion och kondition.	1-2 ggr per år
Kontroll av chassi Kontrollera att chassidelar (ramar) är fria från skador och skevheter. Skador inspekteras noggrant. Rullstolen bör vara ordentligt rengjord före denna kontroll. Tätare intervall för rullstolar med förstärkta ramar. Dessa utsätts normalt för större slitage än standardrullstolar.	1-2 ggr per år
Kontroll av bromsar Kontrollera bromsarnas funktion och kondition. Gäller både vårdarbroms och brukarbroms om det är monterat på rullstolen. Bromsvajrar behöver normalt inte smörjas, höljena är försedda med innerslang. För ev. injusteringar och reparation av bromsar hänvisas till 96720 Teknisk Information.	1-2 ggr per år
Kontroll av reglagen för tilt , rygg och gasfjädrar Kontrollera att spakarna och vajer/hölje för tilt- och ryggfällningen är fria från skador och fungerar korrekt. Vajrar behöver normalt inte smörjas då höljena är försedda med innerslang. Kontrollera att gasfjädrarna är stumma och inte fjädrar. Defekt gasfjädrar ska bytas. Kontrollera att märkningen vid reglagen är oskadd. För ev. injusteringar och reparation hänvisas till 96720 Teknisk Information.	1-2 ggr per år
Kontroll av ryggfällningssprint Kontrollera att sprinten återfjädrar korrekt i låsläge och att knoppen sitter fast.	1-2 ggr per år

Avsnitt 2 fortsätter på nästa sida.

Avsnitt 2 (fortsätt)

Aktivitet	Intervall
Kontroll av armstöd Kontrollera att armstödens höjd- och längdjustering fungerar korrekt. Kontrollera att inga skruvar eller nitförband har lossat. Kontrollera att höjdskalet är oskadat.	1 gång per år
Kontroll av benstöd Kontrollera att benstödsfästet sitter fast i sitsramen utan glapp. Kontrollera att vinkelmekanismen i benstödet låser och fungerar korrekt. Kontrollera vadstödet funktion och att det är fritt från skador. Klädselvätt enligt Avsnitt 1. Kontrollera speciellt att vadplattans muttrar är åtdragna. Kontrollera fotstödet funktion, kondition och att det är fritt från större skador. Kontrollera att fotplattans uppvikningsfunktion, efterdra ledbulen vid behov (benstöd delat). Kontrollera att fotplattans fästskruvar (under plattan) sitter fast.	1-2 ggr per år
Kontroll av dynor Kontrollera att dynor inte är nedsuttna och därmed uttjänta, de ska i sådana fall bytas. Kontrollera dynornas fästningssystem (kardborrband och liknande). Tvätt av klädsel hanteras enligt Avsnitt 1.	1-2 ggr per år

Avsnitt 3

Aktivitet	Intervall
Rekonditionering Rekonditionering utförs enligt separat anvisning, se dokument 96725.	Var tredje år eller vid byte av brukare