


Följande märkningar finns på HD Motion i standardutförande. Artikelnummer och storlek för varje etikett anges i Tabell 1 på sida 4.

OBS

* Stjärnmarkerade rubriker indikerar att denna/dessa etiketter krävs för att rullstolens CE-märkning ska gälla. (För specialutföranden och tillbehör gäller detta bara om det aktuella utförandet/tillbehöret är monterat på rullstolen).

CE-MÄRKNING, MAX BRUKARVIKT, OCH IDENTIFIERING*



CE-etikett, brukarvikt-etikett, och ID-etikett ska sitta på hjulramens främre tvärrör enligt Figur 1.

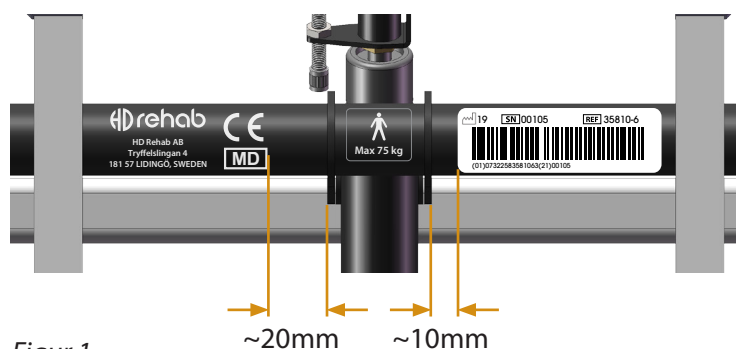

Figur 1

MODELLBETECKNING*

Modelletikett ska sitta på hjulramens bakre tvärrör enligt Figur 2.

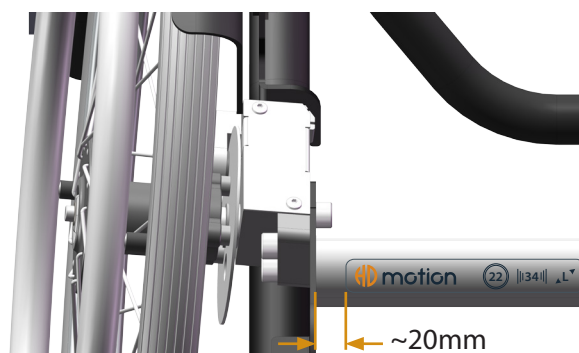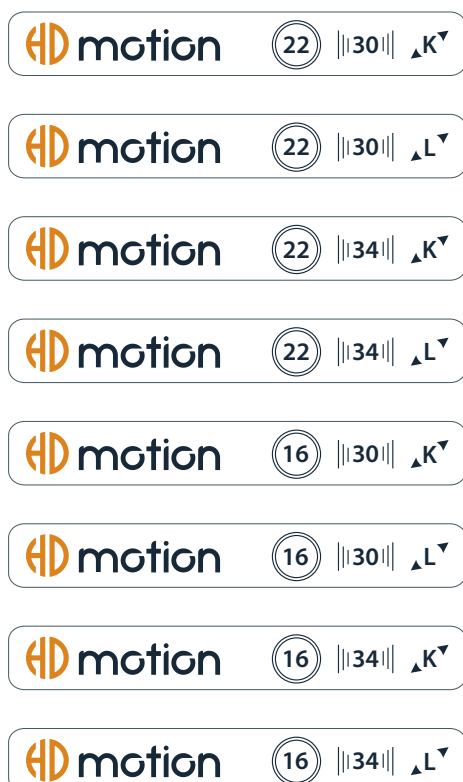


Figur 2

TRANSPORTFÄSTEN*

Fästpunkter är markerade på båda sidor av främre hjulram enligt Figur 3 och på varje fäste bak enligt Figur 4 (HD Motion 22) och Figur 5 (HD Motion 16), totalt 4 stycken etiketter.



Figur 3

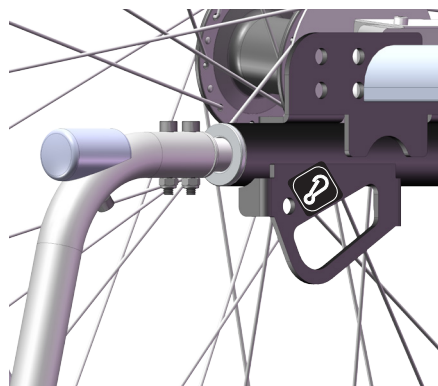


Figur 4




Figur 5

MARKERING AV PARKERINGSBROMS OCH TILTREGLAGE

Parkeringsbromsens etikett ska sitta på insidan av båda bromshandtagen enligt Figur 6 och 7. Ryggfällningsetikett ska sitta på ovansidan av vänster körhandtagsknuten enligt Figur 6. Sitstiltsetikett ska sitta på ovansidan av höger körhandtagsknut enligt Figur 7.

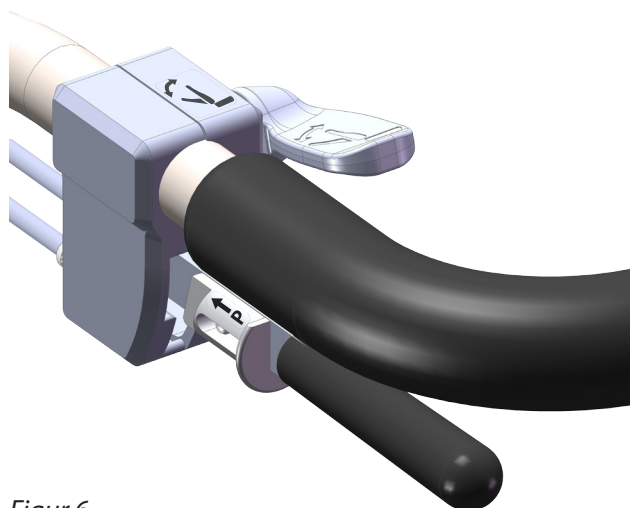


Figur 6

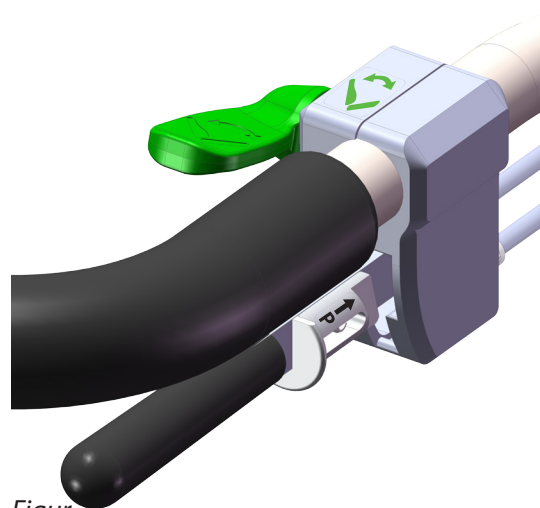



Figur 7

ARMSTÖDSKNAPP OCH HÖJD SKALA

Etikett som visar i vilken riktning höjdjusteringsknappen trycks ska sitta på båda armstöden enligt Figur 8.
Etikett som indikerar armstödet höjd ska sitta på båda armstöden enligt Figur 9.

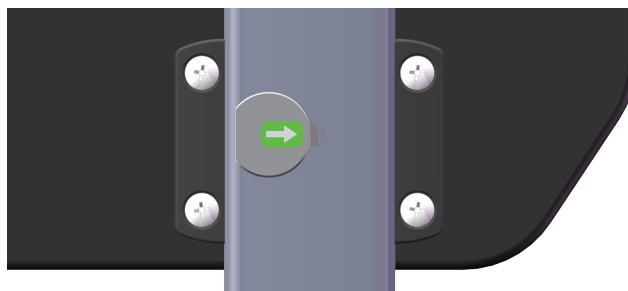



Figur 8

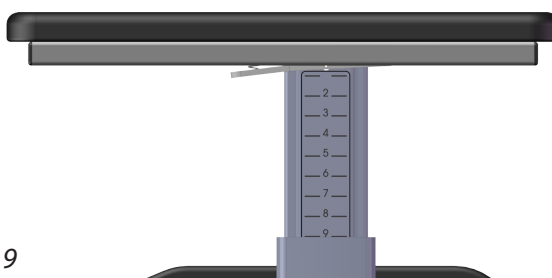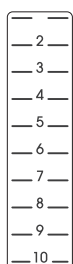

Figur 9

SKALA FÖR SITTDJUP

Skala för sittdjup ska sitta på sitsbrickans profil enligt Figur 10.

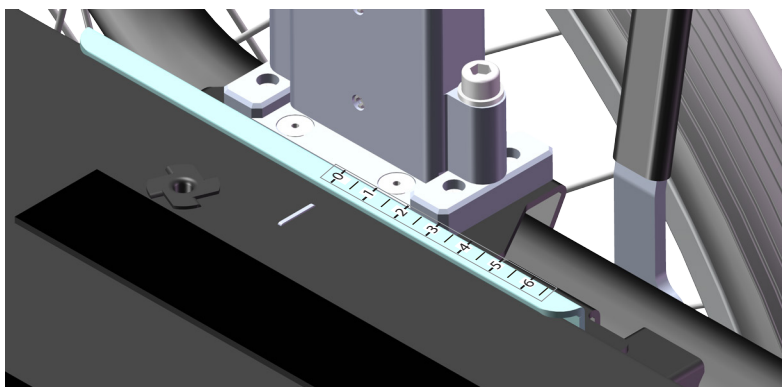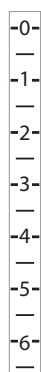

Figur 10

VARNINGSETIKETT TIPPSKYDD

Varningsetikett ska sitta på båda tippskydden enligt Figur 11.



Figur 11

ARTIKELNUMMER OCH STORLEK

Tabell 1 - Etiketter artikelnummer och storlek

Etikett	Art.nr	Beskrivning	Bredd	Höjd
	87218	CE-etikett	56	25
	87219	ID-etikett	80	24
	87270-1	Modelletikett 22-30-K	140	20
	87270-2	Modelletikett 22-30-L	140	20
	87270-3	Modelletikett 22-34-K	140	20
	87270-4	Modelletikett 22-34-L	140	20
	87271-1	Modelletikett 16-30-K	140	20
	87271-2	Modelletikett 16-30-L	140	20
	87271-3	Modelletikett 16-34-K	140	20
	87271-4	Modelletikett 16-34-L	140	20
	87206-4	Brukarvikt Max 75 kg	29	24
	87215-5	Transportfästen	20	20
	87216-5	Parkeringsbroms	7	18
	87227	Sitstilt	14	14
	87228	Ryggfällning	14	14
	87229	Armstödsknapp	13	8
	87211	Armstödsskala	24	95
	87210-5	Sittdjupskala	6	70
	87226	Varningsetikett tippskydd	60	10