

### Avsedd användning

Bältesfästen är avsedda för att fästa endera 2-punkts eller 4-punktsbälte på rullstolen, beroende på brukarens behov.

### Ingående delar

#### Bältesfästen vid höft

2 x bältesfäste



4 x skruv K6S M6x12




4 x låsmutter M6




#### Bältesfästen vid lår

1 x skena, höger

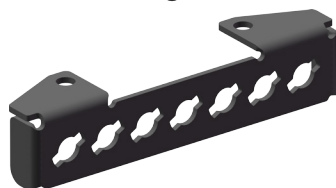

1 x skena, vänster

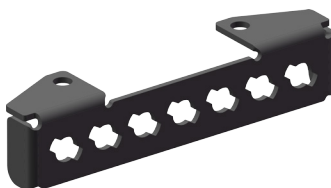

2 x fäste



4 x skruv  
MC6S  
M6x40




4 x distans  
5mm




### Montering - Bältesfästen vid höft

Ta loss drivhjul och skruva loss stänkskydd. Montera bältesfästet på vardera sida med medföljande skruvar och muttrar.

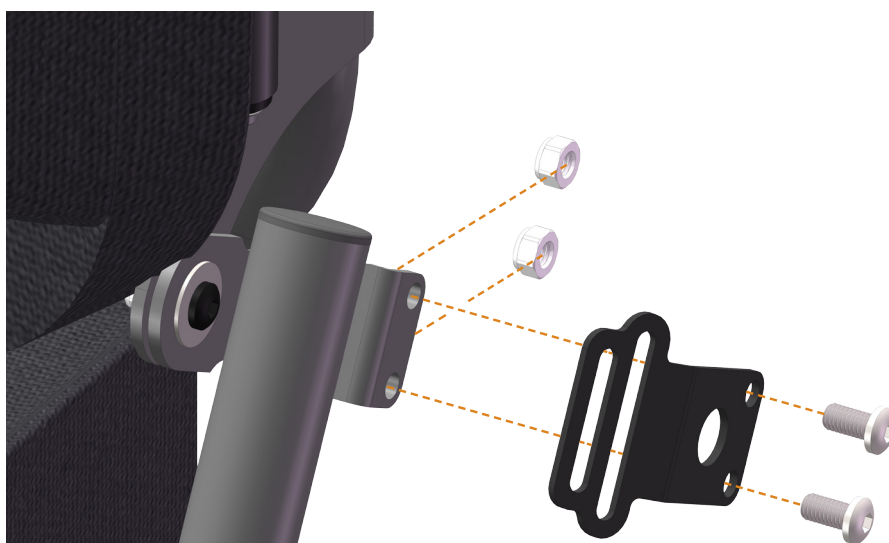

## Montering - Bältesfästen vid lår

Ta loss sittdyna och armstöd. Observera att bilderna visar höger sida.

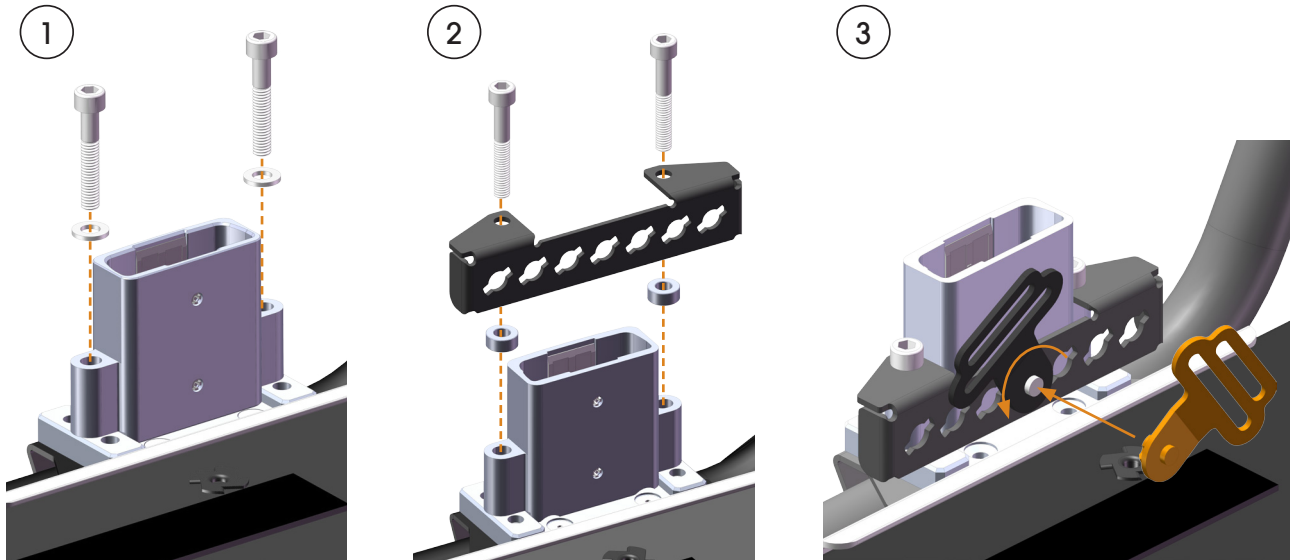

- ① Skruva loss de två skruvarna och brickorna på armstödsfästet.
- ② Sätt distanser och skena på plats. Skruva fast med medföljande skruvar.  
**OBS:** Kolla noggrant att rätt skena används på rätt sida.
- ③ Tryck in fästet i önskat läge och vrid för att säkra det på plats.
- ④ Upprepa dessa steg på andra sidan.

## Användning och skötselråd

Byt alltid ut skadade delar omedelbart. För övrig information se *Underhållsanvisning*, dok. nr. 96730.



- Speciella restriktioner för användning av bälte kan finnas.
- Individuellt anpassad information för användning av bälte måste fås från förskrivaren i varje enskilt fall.
- Var uppmärksam vid användning av positioneringsbälte. Risk finns att användaren glider ner i rullstolen och fastnar i bältet om det är felmonterat eller dåligt åtdraget. Detta kan medföra nedsatt blod-/syretillförsel och risk för kvävning av användaren.
- Kontrollera att bältet alltid är låst vid användning.
- Spänn om möjligt bältet med användaren i upprätt position. Om bältet spänns i nedvinklad ryggsposition finns risk för klämning vid uppvinkling.
- Var uppmärksam på lösa bälten, de kan fastna i hjulen och orsaka hastigt stopp eller klämning.
- Bröstsele ska alltid användas i kombination med positioneringsbälte.