

Avsedd användning

Bröstselefäste är avsett att användas som fästpunkt för olika bröstselar och liknande produkter. Fästet passar till selar med en bandbredd på max 25 mm.


Det är tillverkaren av bröstselen som ansvarar för att bröstselen är säker att använda. Se därför bruksanvisning för respektive bröstsele för att se hur denna ska positioneras i förhållande till brukaren.

Ingående delar

2 x fäste



2 x stolpe

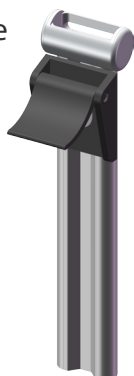

2 x fästögla



2 x bricka



2 x flänslåsmutter M6




2 x bult MVBF M6x16



2 x låsmutter M6



Montering - Ställbara fästen

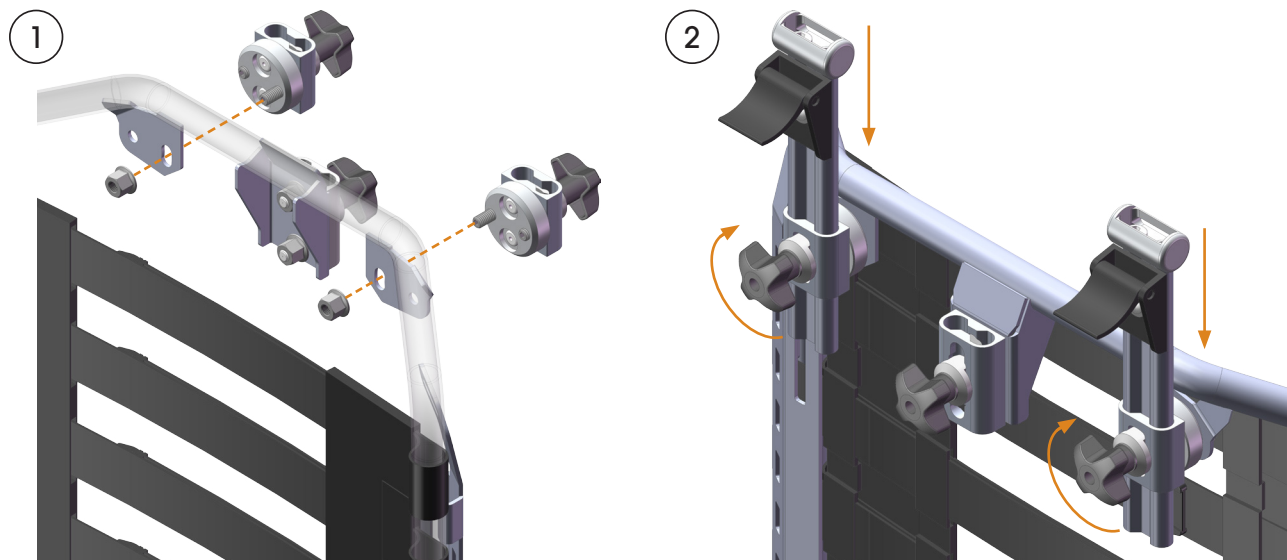

OBS: Fästena har ett längre gängad stift och ett kortare gängat stift. Det längre stiftet ska passa igenom det böjda spåret i ryggsystemet på vardera sida.



- ① Skruva fast fästena på ryggsystemet med de medföljande flänslåsmuttrarna.
- ② För in stolparna i fästena och dra åt rattarna med måttlig kraft.

Montering - Fästöglor

Montera fästöglorna i något av de rektangulära hålen på vardera sida i ryggsystemet. På vilken höjd dessa ska fästas beror på brukare och typ av bröstsele.



Användning

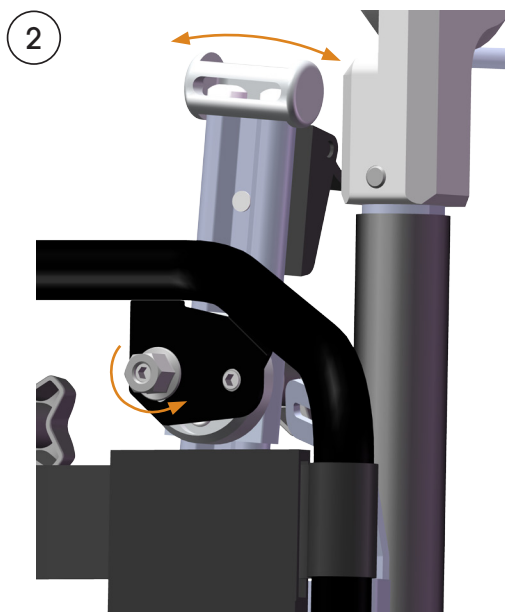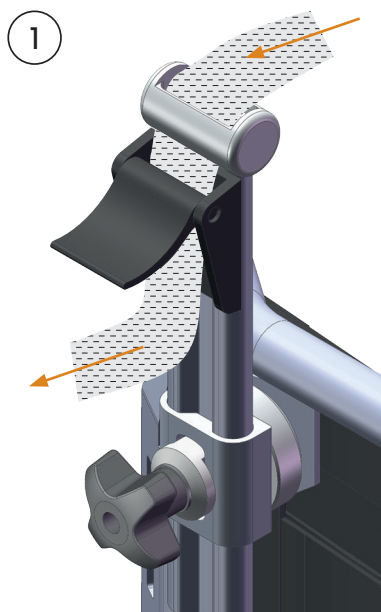

- ① Bröstselens övre band monteras enligt bild. Stäng spännet för att låsa bandet.
- ② Önskad position för de övre bandens infästning uppnås genom att flytta ställrören i höjd- och vinkel. Höjdjustering sker med hjälp av rattarna. För att justera vinkel lossa på muttern enligt bild.

Skötselråd

Bröstselesfästet kan rengöras genom avtorkning med milt rengöringsmedel och vatten. Byt alltid ut skadade delar omedelbart. För övrig information se Underhållsanvisning, dokument nummer 96730.