


Avsedd användning

Fast rygghållare används på HD Motion för att ställa in en fast ryggvinkel mellan 90 - 105°.

Ersätter original gasfjäder och ryggvinklinsreglage.

Ingående delar

1 x rygghållare

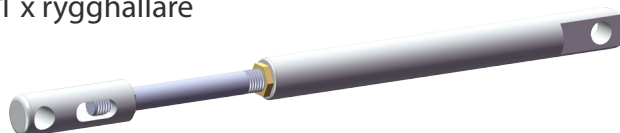

1 x täckplugg





1 x skruv M6



Montering

Ska göras av behörig personal.

Ta loss sittdynan och sittbrickan.

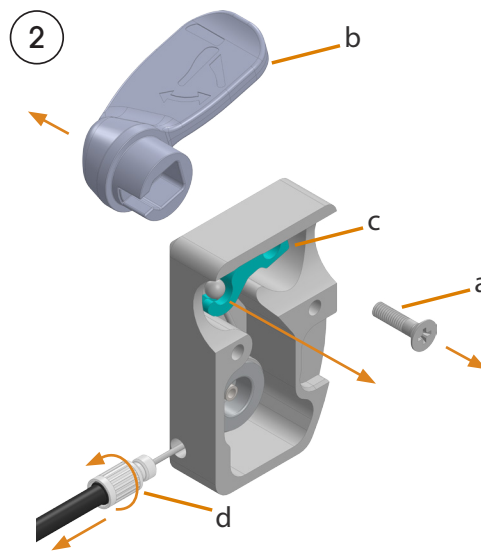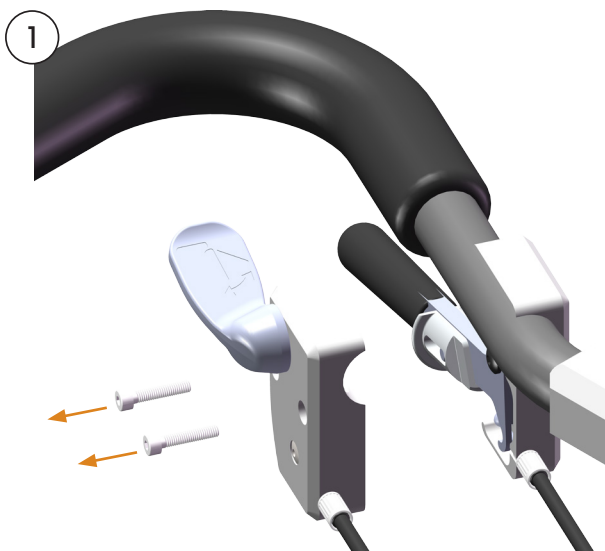



① Skruva loss den inre kåpan på vajerreglaget på körbygelns vänstra sida. Låt den yttre kåpan sitta kvar.

② Lossa skruven (a) helt. Ta bort spaken (b) och armen (c). Skruva loss ändhylsan (d) och ta bort vajerkablaget.


③ Täck de hål som uppstår med täckplugg (e) respektive skruv (f).

Återmontera kåpan med befintliga skruvar. Kontrollera att reglaget sitter korrekt och att bromsspakens funktion inte har påverkats.

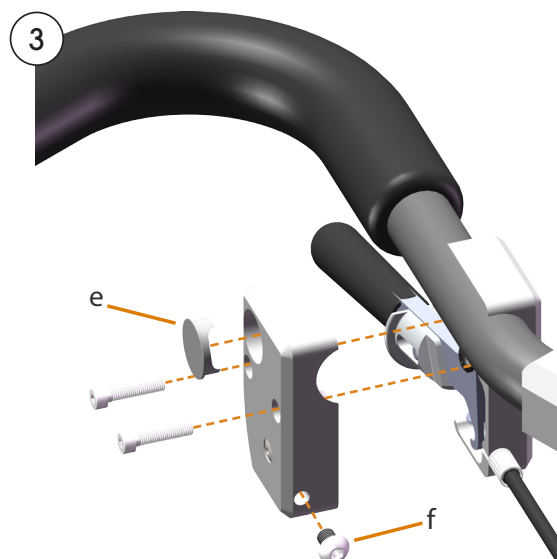

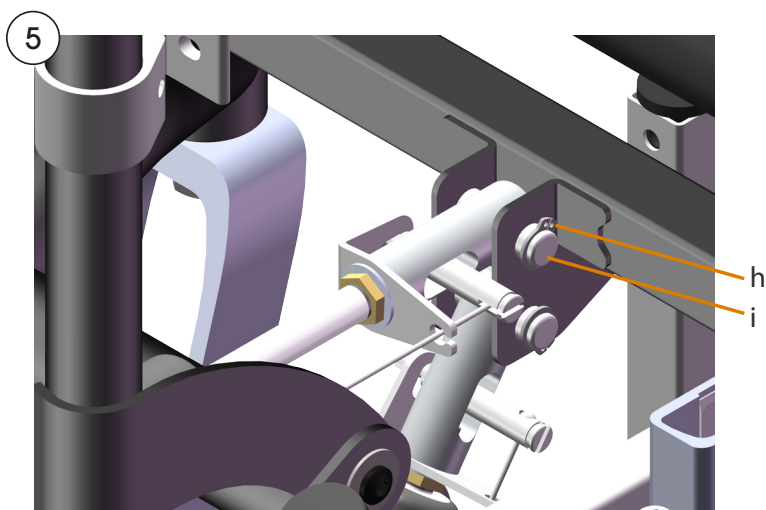

④ Fatta med ena handen om körbygeln och dra ut ryggfällningssprinten (g). Fäll ryggstödet bakåt.

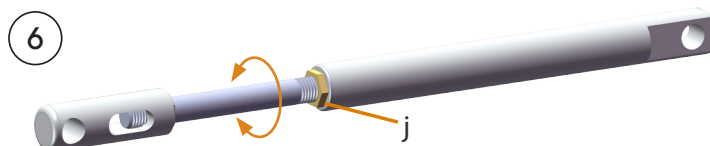


⑤ Lossa gasfjädern från sittramens främre del genom att ta bort låsringen (h). Knacka ur ledtappen (i) så att gasfjädern med vajer lossnar.

⑥ Grovjustera rygghållaren för önskad ryggvinkel men dra ej till muttern (j). Helt ingängad stång ger c:a 105°.

⑦ Montera rygghållaren i sittramen med befintlig ledtapp och montera låsringen.

OBS: Låsringen måste hanteras korrekt. Felaktig låsring måste bytas. Koppla fast ryggramen med rygghållaren. Finjustera vid behov. Dra åt muttern efter justeringen.

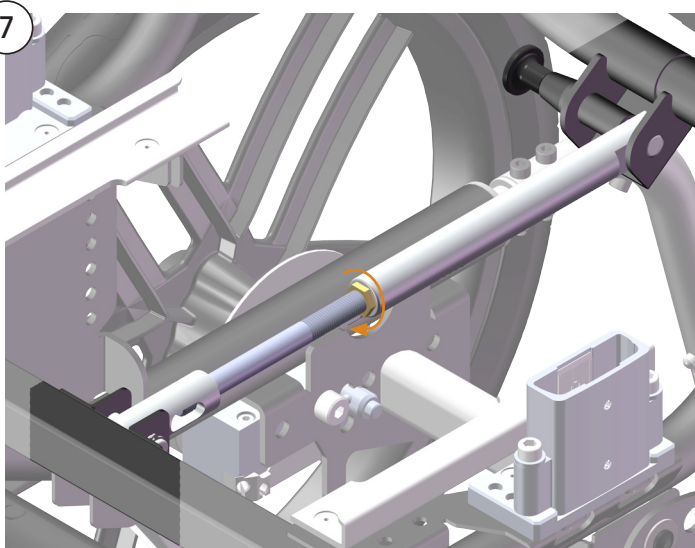

⑧ Kontrollera.

Användning och skötselråd

Byt alltid ut skadade delar omedelbart. För övrig information se *Underhållsanvisning*, dok. nr. 96730.