

Det finns två benstödssystem till HD Motion; Benstöd Center (A) och Benstöd Delat, se Infoblad Benstöd Delat, dokument nummer 96902.





Benstöd Center

Benstödet position kan justeras framåt/bakåt 6 cm i fem lägen. Detta görs genom att skjuta benstödsfästas teleskoprör i sitsramen (B).

Justering av benstödsposition görs i samband med sittdjupsinställning, se Infoblad Chassi, dokument nummer 96914. Sittbrickans position ska därför kontrolleras och justeras till ett lämpligt läge.

Benstöd Center används för att få ett rymligt utrymme för stående förflyttning då fotplattan enkelt kan vikas upp bakåt (C).

Benstödet kan vinklas mellan 80° och 140°, 7 lägen (D). Vinkelställbara benstöd används för att bryta spasticitet genom att uppnå en snävare vinkel i knä eller då brukaren har ett behov av lägesförändring av benen, t ex vid vila eller aktivitet.

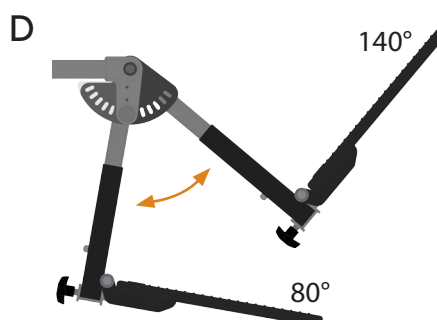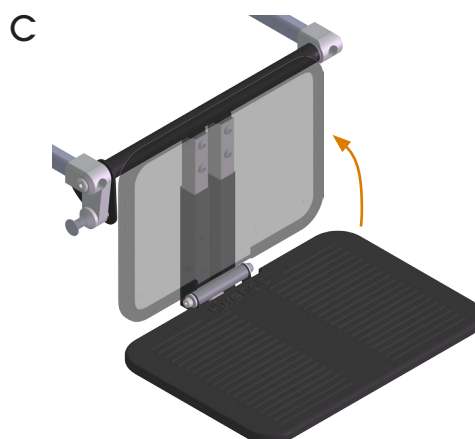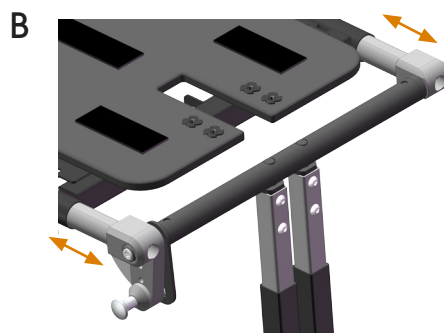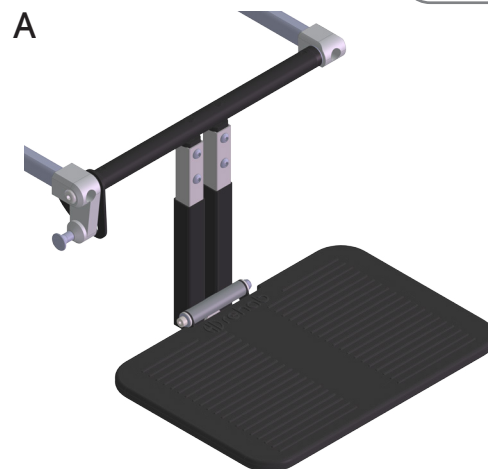

Benstödsrör

Benstödsrör finns i tre olika längder, kort, standard och långt (E). Dessa kombineras med Fotstöd Helt. Beroende på vilken benstödslängd som behöver uppnås finns standard eller kort fotstöd (F). Se även tabell 1 för vilka längder som kan uppnås.




Fotstöd Helt

Fotstöd Helt består av fotstödsrör och fotplatta.


Fotstödsrör

Fotstödsröret finns i två längder, standard och kort (F) som kombineras med benstödet tre olika längder.

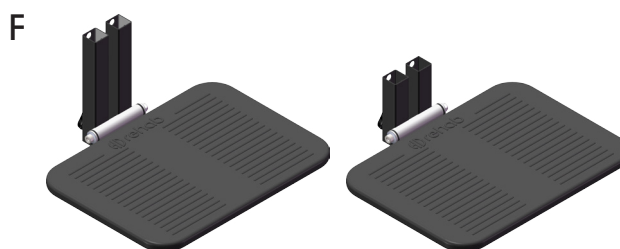


Fotplatta

Hel fotplatta finns i två storlekar, stor till chassi med sittbredd 34 och liten till chassi med sittbredd 30 (G).

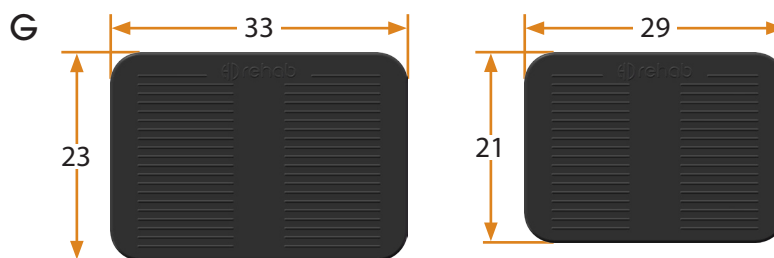


Fotplattan består av en metallplatta och en täckande gummiplatta. Metallplattan (H) har hål/skåror för fotrem och vristhållare. Ovansidan på metallplattan är täckt med en avtagbar, helgjuten gummiplatta. Möjlighet finns att själva skära ut önskade hål/skåror i gummiplattan eller beställa denna färdigstansad.

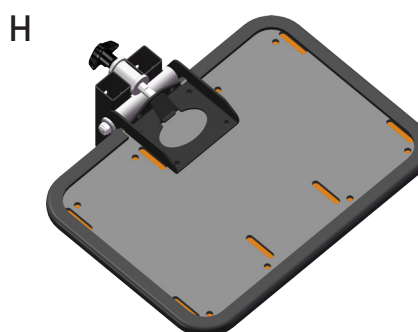


Inställningar

Fotstöden kan vinklas uppåt/nedåt steglöst mellan 70° och 125° (I).

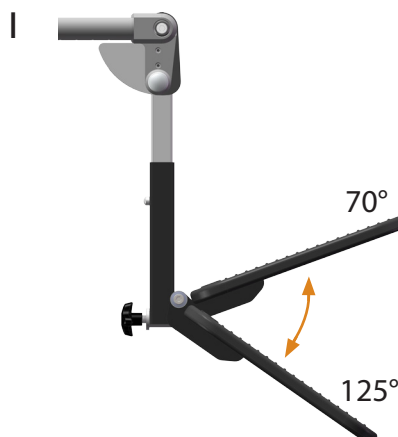


Fotlåda

Fotlåda (J) finns som alternativ till brukare som behöver skydd vid ofrivilliga fot- och benrörelser. Fotlådan består av ett helt fotstöd utrustad med sidopolstring och vadplatta.

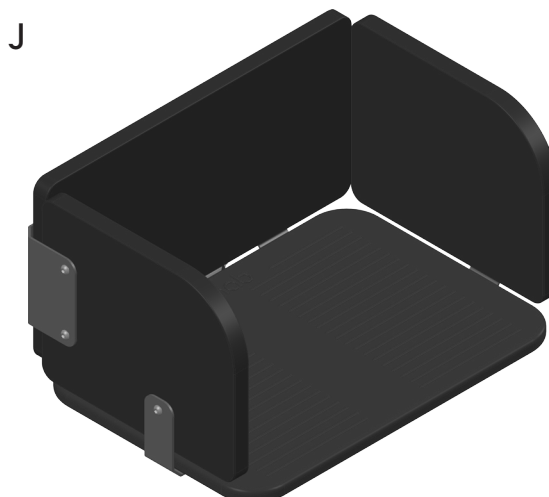

Vadstöd

Benstöd Center kan vid behov utrustas med Vadstöd, stort eller litet (K). Vadstöd består av vadstödsfäste och en vadplatta.

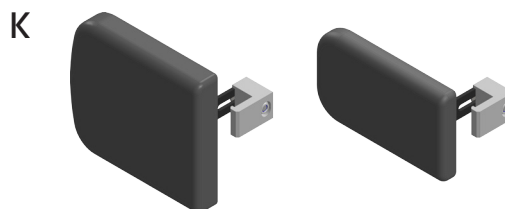


Vadstödsfäste

Vadstöd stort och litet har samma vadstödsfäste.


Vadplatta

Vadplattan finns i två storlekar, stor och liten (L).

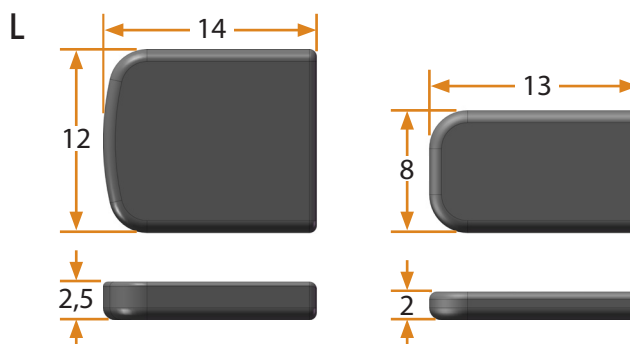

Inställningar

Vadstöden kan ställas i höjd, hur mycket beror på längd och läge på benstöd/fotstöd. Möjlighet finns även att justera vadstöden framåt 2,5 cm och inåt i sidled 1,5 cm (M).

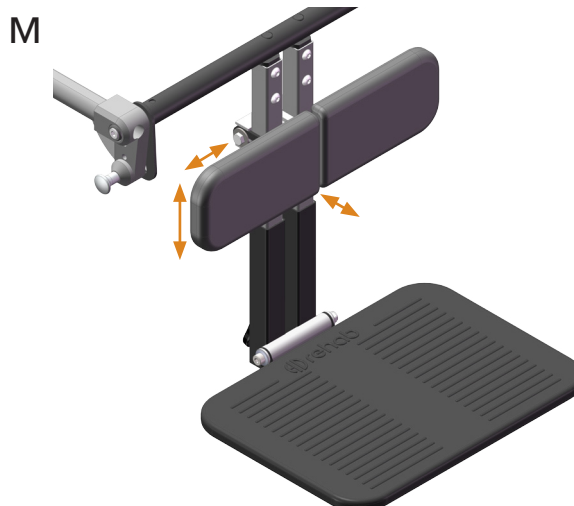

Benstödslängd

Benstödet finns i tre olika längder, kort, standard och långt. Dessa kombineras med Fotstöd Helt eller Fotlåda, kort eller standard, beroende på vilken benstödslängd som behöver uppnås. Se tabell 1 nedan.

Tabell 1 - Funktionell längd [cm]. Mäts från sittbrickans ovansida till fotplattans trampyta med benstödet i 90° vinkel.

Benstöd	Fotstöd / Fotlåda	<i>a</i> min	<i>a</i> max
Kort	Kort	19	25
Standard	Standard	23	35
Långt	Standard	35	47



Klädsel

Vadplattor och fotlådans polstring är klädda med Dartex som är avtorkbart.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.