
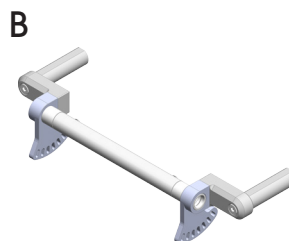


Det finns två benstödssystem till HD Motion; Benstöd Delat (A) och Benstöd Center, se Infoblad Benstöd Center, dokument nummer 96901.


Benstöd Delat består av Fäste (vinkelställbart) (B), Benstödsrör och Fotstöd.

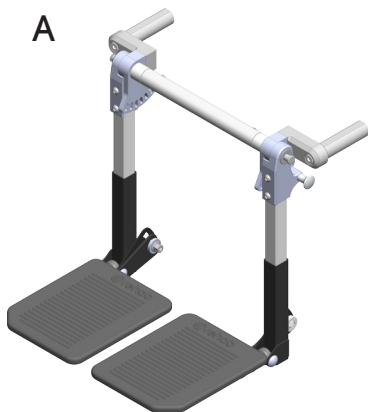

Benstödsfäste

Benstödens position kan justeras 6 cm i fem lägen. Detta görs genom att skjuta benstödsfästets teleskoprör framåt/bakåt i sitsramen (C).

Justering av benstödsposition görs i samband med sittdjupsinställning, se Infoblad Chassi, dokument nummer 96914. Sittbrickans läge ska därför kontrolleras och justeras till ett lämpligt läge.

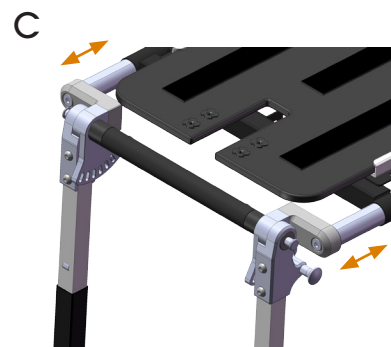




Benstöd Delat

Benstöd Delat används när man behöver olika höjd/vinkel för benen vid t ex benlängdsskillnad eller kontraktur. Benstöden kan vinklas mellan 80° och 140°, 7 lägen (D).

Vinkelställbara benstöd används för att bryta spasticitet genom att uppnå en snävare vinkel i knä eller då brukaren har ett behov av lägesförändring av benen, t.ex. vid vila eller aktivitet.


Benstöden kan tas av genom att trycka in en knapp och därefter dra benstödet rakt utåt sidan (E).

Fotplattformarna kan vikas upp åt sidorna för att möjliggöra stående förflyttning (F).

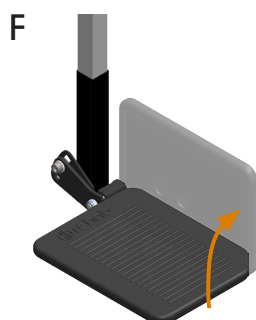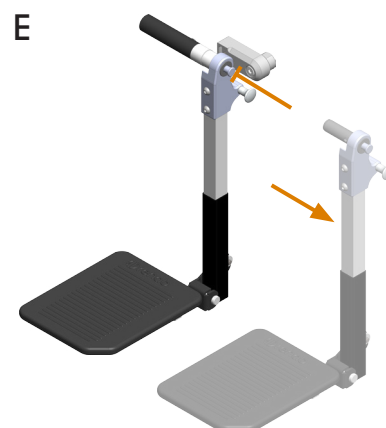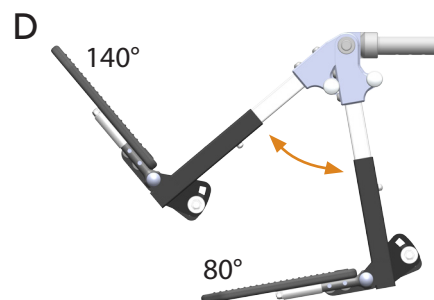

Benstödsrör

Benstödsrör finns i tre olika längder, kort, standard och långt (G). Dessa kombineras med Fotstöd Delat, Standard eller Kort beroende på vilken benstödslängd som behöver uppnås. Se tabell 1.

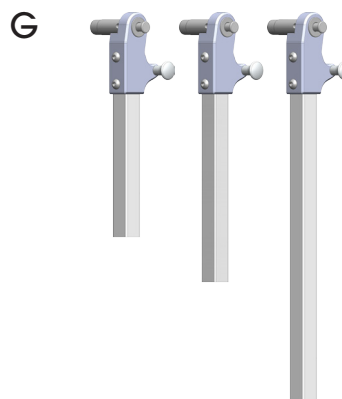


Fotstöd Delat

Fotstöd Delat består av fotstödsrör och fotplatta.


Fotstödsrör

Fotstödsröret finns i två längder, standard och kort (H) som kombineras med benstödet i tre olika längder.

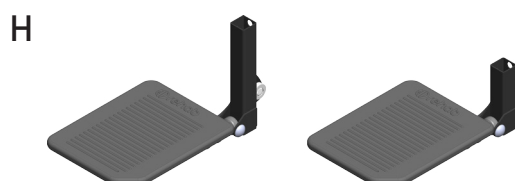

Fotplatta

Delade fotplattor finns i två storlekar, stora till chassi med sittbredd 34 och små till chassi med sittbredd 30 (I).

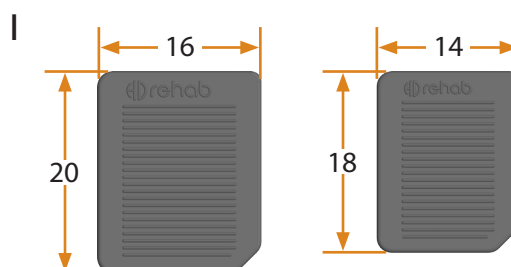


Fotplattorna består av metallplattor och täckande gummiplattor. Metallplattorna (J) har hål/skåror för fotrem och vristhållare. Ovansidorna på metallplattorna är täckta med avtagbara, helgjutna gummiplattor. Möjlighet finns att själva skära ut önskade hål/skåror i gummiplattorna eller beställa dessa färdigstansade.




Inställningar

Fotstöden kan vinklas uppåt/nedåt steglöst mellan 80° och 120° (K).

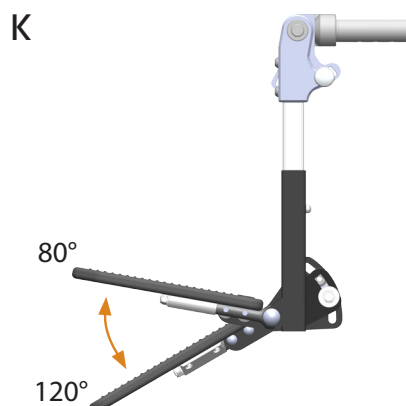

Vadstöd

Benstöd Delat kan vid behov utrustas med Vadstöd, stort eller litet (L). Vadstöd består av vadstödsfäste och en vadplatta.

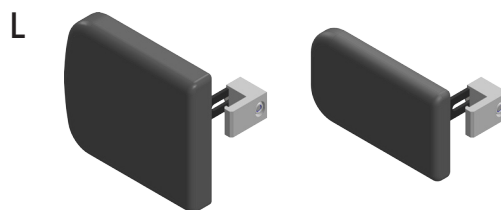


Vadstödsfäste

Vadstöd stort och litet har samma vadstödsfäste.


Vadplatta

Vadplattan finns i två storlekar, stor och liten (M).

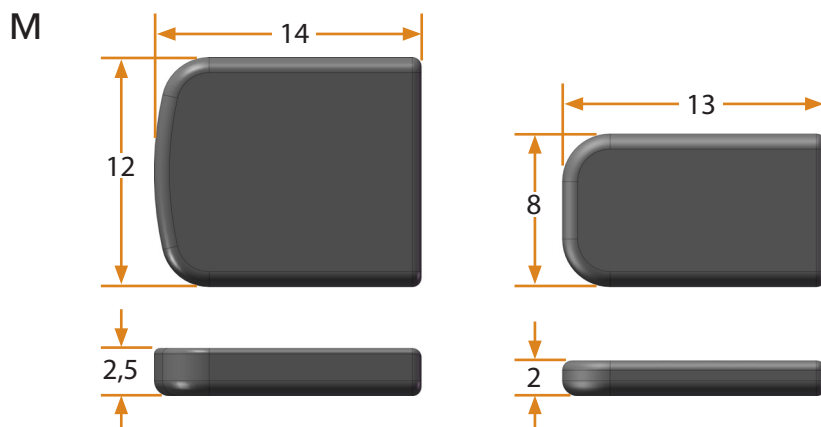

Inställningar

Vadstöden kan ställas i höjd, hur mycket beror på längd och läge på benstöd/fotstöd. Möjlighet finns även att justera vadstöden framåt 2,5 cm och inåt i sidled 1,5 cm (N).

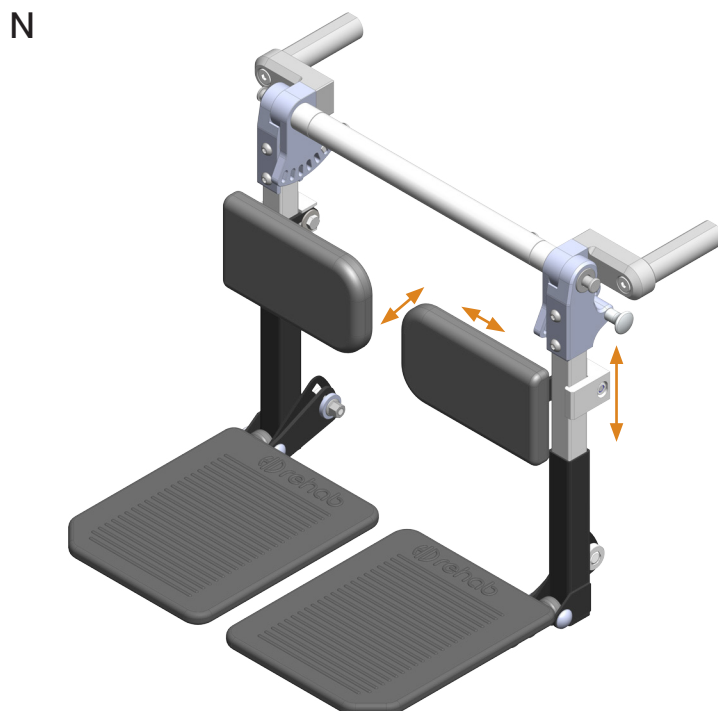


Benstödslängd

Benstöden finns i tre olika längder, kort, standard och långt. Dessa kombineras med Fotstöd Delat, kort eller standard, beroende på vilken benstödslängd som behöver uppnås. Se tabell 1 nedan.

Tabell 1 - Funktionell längd [cm]. Mäts från sittbrickans ovansida till fotplattans tramppyta med benstödet i 90° vinkel.

Benstöd	Fotstöd	a min	a max
Kort	Kort	19	25
Standard	Standard	23	35
Långt	Standard	35	47

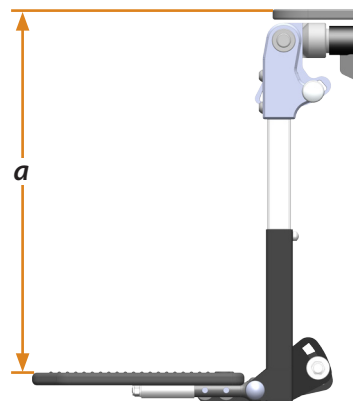

Klädsel

Vadplattor är klädda med Dartex som är avtorkbart.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.