


Armstöd finns i tre varianter; Armstöd Standard (A), Armstöd Låg (B) och Armstöd Vinkelställbart (C).

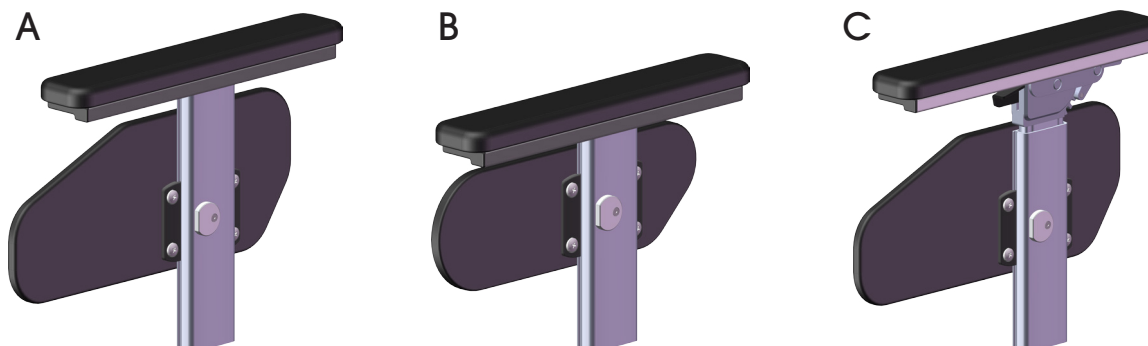

Armstöd Standard

Armstöd Standard består av en formgjuten armstödsplatta i polyuretan samt ett polstrat sidostöd. Det kan höjdställas i 9 lägen samt djupinställas i 9 lägen. Inställning i höjd och djup görs utan verktyg. Graderad skala finns för höjdställning.

Armstöd Låg

Armstöd Låg består av en formgjuten armstödsplatta i polyuretan samt ett polstrat sidostöd. Det kan höjdställas i 6 lägen samt djupinställas i 9 lägen. Inställning i höjd och djup görs utan verktyg. Graderad skala finns för höjdställning.

Armstöd Vinkelställbart

Armstödsplattan på Armstöd Vinkelställbart kan ställas i vinkel uppåt/nedåt (36° i 4 lägen), utöver höjdställning (7 lägen) och djupinställning (9 lägen). Graderad skala finns för höjdställning. Sidostöd på Armstöd Vinkelställbart är detsamma som på Armstöd Standard.


Sidostöd Kil

Som alternativ kan armstöd utrustas med Sidostöd Kil 5° (D). Vid utåtrotation i höftlederna rätar dessa sidostöd upp brukarens lårben till ett parallellt läge. Trycket fördelas längs med låren och risken för punkttryck mot knälederna minskar. Sidostöd Kil har något längre sidostöd än armstöd Standard och Låg och kan ej kombineras med utfyllnadskuddar.




Mått - Armstöd


(Alla mått i cm)

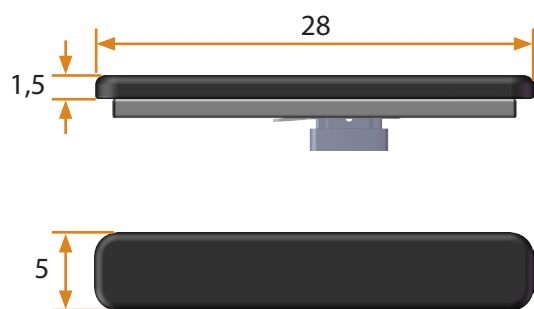

Bakre läget

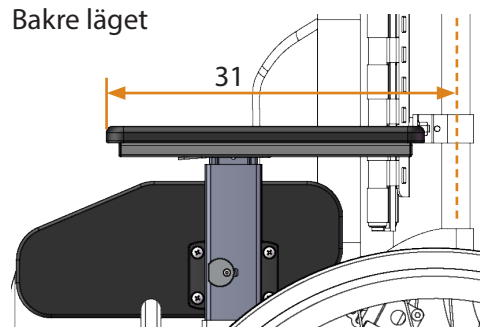


Främre läget

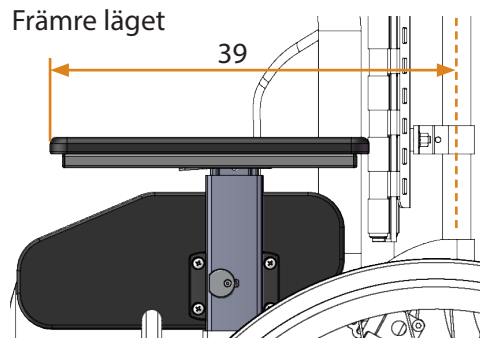


Höjd

Tabell 1 - Armstödshöjd [cm]

Modell	<i>a</i> lägsta	<i>a</i> högsta
Standard	22	30
Låg	18	23
Vinkelställbart	24	30

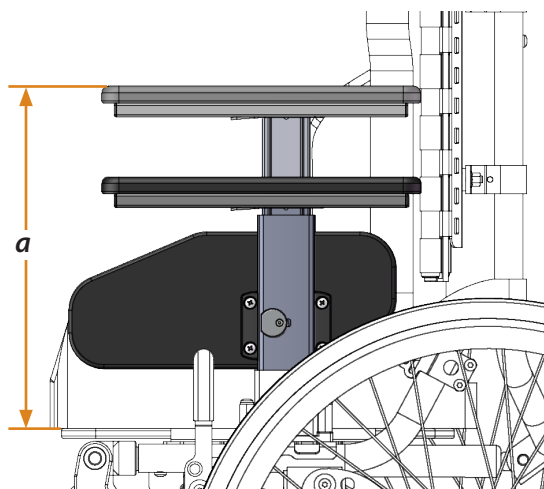


Vinkel - Armstöd Vinkelställbart

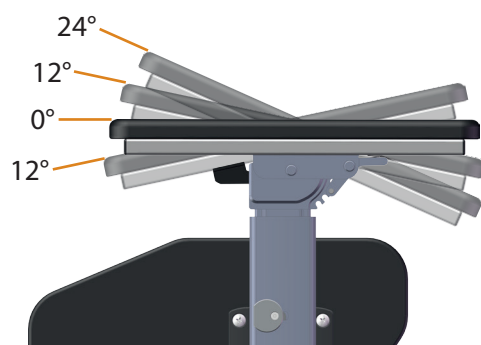


Mått - Sidostöd


Sidostöd - Standard

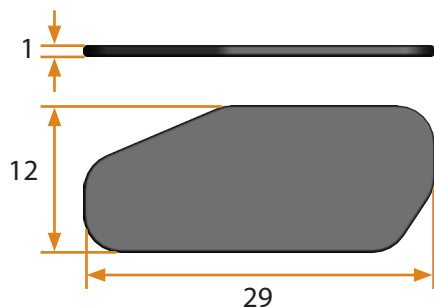


Sidostöd - Låg

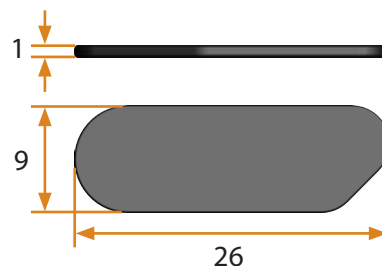

Sidostöd Kil - Standard

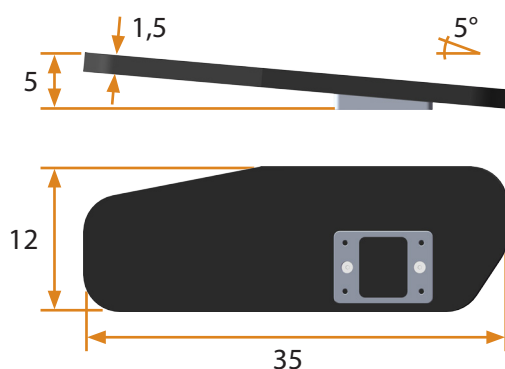

Sidostöd Kil - Låg

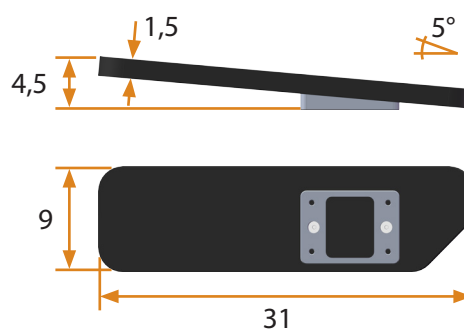

Tänk på

- Om armstödsplattan ställs in i ett bakre läge med ryggen vinklad bakåt, kan det hända att ryggen, när den vinklas upp, krockar med armstödsplattan. Kontrollera och flytta armstödsplattan framåt vid behov.
- Med sittbredden i det bredaste läget och armstödsplattorna ställda i ett bakre läge kan dessa ta i stänkskydden när rullstolen är tiltad bakåt. Rullstolen får aldrig köras i detta läge.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.